

### **Informacja dot. bezpieczeństwa**

**Produkt: TARGON FN TELESCREWS (śruby teleskopowe)  
K0820T, K0822T, K0823T, K0824T, K0825T, K0826T, K0828T**

W ramach badań własnych potwierdzono, że w niektórych przypadkach śruby Targon FN trudno wkręca się do płytek udowych Targon FN. Celem uniknięcia jakichkolwiek niepewności i niejasności w zakresie użytkowania produktu, pragniemy poinformować was o następujących faktach.

Naturalną właściwością systemu jest to, że główki śrub teleskopowych (TeleScrews) mogą wystawać po zamocowaniu w płytce Targon FN. Wystające główki nie pełnią w ten sposób żadnej dodatkowej funkcji, ponieważ głębokość śruby to wyłącznie warunkowe kryterium stabilizacji połączenia oferowanego przez śrubę.

Dzięki swojej konstrukcji wymagany moment obrotowy w procedurze dokręcania śruby wynoszący 8 Nm, uzyskać można już po dokonaniu połowy obrotu śruby, w zależności od tolerancji śruby teleskopowej (TeleScrew) i płytki. Aby zapewnić bezpieczne połączenie płytki Targon FN i śrub teleskopowych (TeleScrews), generalnie zaleca się przed skręceniem tych elementów upewnienie się, czy gwinty płytki Targon FN i śruby teleskopowej (TeleScrew) wolne są od fragmentów kości, pozostałości krwi i tkanek. W razie wątpliwości lub w przypadku jakichkolwiek problemów w trakcie dokręcania śruby do płytki, należy wyjąć śrubę i oczyścić gwint płytki i śruby.

W instrukcji obsługi zamieszczono stosowne informacje. Twój konsultant ds. wyrobów medycznych

**Zarząd:**Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu  
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu  
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejonowy Spółki:**Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto  
i Wilda w Poznaniu  
Wydział IX Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000094176  
NIP 788-00-08-829  
wys. kapitału zakładowego: 12.680.000 zł**Banki:**PKO BP SA o/Nowy Tomyśl  
85 1020 4144 0000 6302 0003 4348 PLNBRE Bank SA o/Poznań  
76 1140 1124 0000 3430 7800 1002 PLN  
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR  
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

firmy Aesculap dostarczy Tobie zaktualizowaną instrukcję jak tylko będzie ona dostępna. W razie pytań prosimy o kontakt:

Pan Andrzej Kochman  
nr.tel.+48-608-609-892

Prosimy upewnić się, że przedmiotowa informacja dot. bezpieczeństwa zostanie dostarczona każdemu użytkownikowi w/w produktu oraz wszystkim osobom, które winny zostać poinformowane o tym fakcie.

Jeśli przekazaliście ten produkt osobom trzecim, prosimy o przekazanie tym osobom kopii przedmiotowej informacji, a także poinformowanie o tym fakcie firmy Aesculap Chifa.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej informacji do:

**Aesculap Chifa Sp. z o.o.**  
**Tysiąclecia 14**  
**64-300 Nowy Tomyśl**  
**Fax:+ 48-614420487**  
adres e-mail: [Joanna.kowalczyk@bbraun.com](mailto:Joanna.kowalczyk@bbraun.com)

Prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie do Pani Kerstin Rothweiler, Dept. QMV  
Fax: +49 7461-95 1555 lub E-mail: kerstin.rothweiler@aesculap.de

**Potwierdzenie otrzymania**  
**Informacja dot. bezpieczeństwa**  
**ŚRUBY TELESKOPOWE TARGON FN (TELESCREWS)**  
**KO820T, KO822T, KO823T, KO824T, KO825T, KO826T, KO828T**

1. Potwierdzamy otrzymanie informacji dot. bezpieczeństwa.

2. Proszę zaznaczyć właściwe pole:

Użytkownik:

Przyjęliśmy do wiadomości informację dot. bezpieczeństwa.

Dystrybutor detaliczny:

Przekazaliśmy informację dot. bezpieczeństwa do naszych klientów i załączamy listę tych klientów.

Zakład \_\_\_\_\_ Lokalizacja \_\_\_\_\_

Nazwisko \_\_\_\_\_

Dział \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_