

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

<u>Typ i model urządzenia:</u>	Primus model PrimusRS (PRRS)
<u>Identyfikator FSCA:</u>	2015-03-19
<u>Typ działania:</u>	Modernizacja i porada dotycząca użytkowania urządzenia
<u>Produkt objęty działaniem:</u>	Systemy, które posiadają opcjonalny drążek typu Chop / Lift
<u>Do wiadomości:</u>	Użytkownicy systemu Primus

Do Wszystkich, których może to dotyczyć:

Istnieje niska szansa, że drążek Chop / Lift może przypadkowo wyjąć się z karabińczyka podczas użytkowania. Może to prowadzić do urazu użytkownika z powodu upadku. BTE dobrowolnie przekazuje zestaw naprawczy w celu eliminacji tego ryzyka. Nie odnotowano żadnych urazów ciała spowodowanych taką sytuacją. Żadna inna część lub akcesorium dołączane do urządzenia nie jest zagrożone opisanym ryzykiem.

W celu pozbycia się tego błędu, prosimy o niezwłoczną instalację dostarczonego zestawu modernizacyjnego zgodnie z instrukcją BTE 751W2519 dołączonej do zestawu. Od tego momentu, pierścień na drążku Chop / Lift nie może być użyty do podłączenia do karabińczyka przystawki nr 191 i żadnej innej przystawki zakończonej karabińczykiem. Jedynie oczkowe zakończenie przystawki mogą być użyte do przyłączenia do karabińczyka.

Prosimy o przekazanie niniejszej NOTATKI BEZPIECZEŃSTWA do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani tą informacją w placówce klienta. Po wykonaniu modernizacji prosimy o poinformowanie BTE przy użyciu odpowiedniego formularza potwierdzającego wdrożenie Notatki Bezpieczeństwa.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z niniejszym działaniem. Prosimy o niezwłoczny kontakt ze wsparciem technicznym BTE pod nr telefonu +1 410-850-0333 w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag.

Odpowiedzialne jednostki rejestracyjne dla wyrobów medycznych zostały powiadomione.

Z poważaniem,

właściwe połączenie:



niewłaściwe połączenie:

