

# Pilna Notatka Bezpieczeństwa dotycząca Korekty Urządzenia

16.05.2019

Szanowni Państwo,

<b>Dotyczy produktu</b>	PRISMAFLEX 6.10 ROW, PRISMAFLEX 7.XX ROW, PRISMAFLEX 8.XX ROW i PRISMAFLEX SYSTEM
<b>Opis problemu</b>	<p>Baxter Healthcare otrzymał raporty dotyczące urządzeń Prismaflex 8.10 z nieaktywną pompą strzykawkową podczas zabiegu ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT) z zastosowaniem RCA (regionalnej antykoagulacji cytrynianowej). Ustalono, że istnieje możliwość nie wystąpienia alarmu urządzenia z powodu nieaktywnej pompy strzykawkowej po zakończeniu procedury wymiany strzykawki.</p> <p>Baxter zaktualizuje wszystkie urządzenia Prismaflex z wersją oprogramowania 8.10 do wersji oprogramowania 8.20. Nowa wersja oprogramowania będzie zawierała ulepszenie zapewniające generowanie alarmu, gdy problem wystąpi podczas wykonywania zabiegu z zastosowaniem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej (RCA)</p>
<b>Ryzyko</b>	Nieaktywna pompa może skutkować obniżeniem podaży wapnia, prowadzącym do hipokalcemii. Hipokalcemia może spowodować poważne, niekorzystne konsekwencje zdrowotne. Istnieją dwa raporty o poważnych urazach związanych z tym problemem.
<b>Działania do podjęcia przez użytkowników</b>	<p>Baxter uprzejmie prosi o podjęcie następujących działań:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Urządzenia Prismaflex mogą nadal być bezpiecznie stosowane, do momentu wykonania aktualizacji oprogramowania, przy zachowaniu dodatkowej ostrożności, w celu zapewnienia, że pompa strzykawkowa działa zgodnie z przeznaczeniem po zakończeniu procedury wymiany strzykawki.</li><li>2. Należy stosować odpowiednie strzykawki podczas korzystania z urządzenia Prismaflex zgodnie z instrukcją obsługi, patrz punkt 15.6.2 Metoda cytrynian - wapń.</li><li>3. Lokalny przedstawiciel serwisu firmy Baxter skontaktuje się z Państwem w celu uaktualnienia oprogramowania dla wszystkich urządzeń Prismaflex z aktualną wersją oprogramowania 8.10. Aktualizacja oprogramowania jest bezpłatna.</li></ol>

4. Jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio od Baxter, prosimy o wypełnienie załączonego formularza odpowiedzi klienta firmy Baxter i odesłanie go do firmy Baxter na numer fax 22 488 38 08 lub na adres e-mail dorota\_pawlukowiec@baxter.com, nawet jeśli produkt nie występuje już na stanie. Odesłanie odpowiedzi zwrotnej klienta jest potwierdzeniem otrzymania tej informacji i zapobiegnie powtórnemu jej otrzymaniu.
5. Jeśli ten produkt został zakupiony od dystrybutora, formularz odpowiedzi klienta firmy Baxter nie ma zastosowania. Jeśli formularz odpowiedzi zostanie dostarczony przez dystrybutora lub hurtownika, należy zwrócić go dostawcy zgodnie z ich instrukcjami
6. Jeśli dystrybuowali Państwo ten produkt do innych ośrodków lub oddziałów Państwa instytucji, prosimy o odpowiednie przekazanie kopii tego listu.
7. Jeśli są Państwo sprzedawcą, dystrybutorem, prowadzą Państwo działalność hurtową lub są Państwo producentem oryginalnego wyposażenia (OEM), który dystrybuował produkt, którego dotyczy ten problem, do innych ośrodków, prosimy o powiadomienie Państwa klientów o tej Pilnej Korekcie Urządzenia, zgodnie z Państwa procedurami.

**Dalsze  
informacje i  
wsparcie**

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Baxter.

Przepraszamy za wszelkie spowodowane niedogodności. Baxter zaktualizuje oprogramowanie w celu dalszego zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Baxter dokłada wszelkich starań, aby nasze produkty i usługi stale spełniały najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa dla naszych pacjentów i świadczeniodawców.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych został powiadomiony o tej akcji.

Z poważaniem,

Anna Szewczyk  
Kierownik Hurtowni

Załącznik: Formularz Odpowiedzi Klienta  
Załącznik 1: Tabela produktów, których dotyczy problem

**Formularz Odpowiedzi Klienta**  
(PILNA KOREKTA URZĄDZENIA Z DNIA 16.05.2019)

**NAZWY PRODUKTU:** PRISMAFLEX 6.10 ROW, PRISMAFLEX 7.XX ROW, PRISMAFLEX  
8.XX ROW i PRISMAFLEX SYSTEM

**Kod produktu:** 114870, 107493, 955052, 114489

**Numery serii:** patrz Załącznik 1 do Listu do klientów

Proszę wypełnić ten formularz i odesłać po jednym formularzu z danego ośrodka faksem (Faks: 22 488 38 08) lub na adres e-mail ([dorota\\_pawlukowiec@baxter.com](mailto:dorota_pawlukowiec@baxter.com)) jako potwierdzenie, że otrzymali Państwo niniejsze powiadomienie.

List przewodni faksu nie jest wymagany.

Nazwa i adres ośrodka:	
Potwierdzenie odpowiedzi wypełnione przez: <i>(proszę wpisać drukiem nazwisko)</i>	
Tytuł: <i>(proszę wpisać drukiem)</i>	
Adres e-mail i (lub) numer telefonu (z numerem kierunkowym):	

<b>Podpis/Data:</b>  <b>POLE WYMAGANE</b>	<hr/>
---	-------

Otrzymaliśmy wyżej wymieniony list, wykonaliśmy działania opisane w liście i przekazaliśmy informacje/dokumentację naszym pracownikom, innym usługodawcom/ośrodkom i klientom, jeśli dotyczy.

## Załącznik 1: Tabela produktów

Numer serii	Kod produktu	Opis produktu
PA16039	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11161	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11166	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11229	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11232	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11233	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11277	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11281	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11282	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11283	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11595	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11600	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11602	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11745	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11752	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11869	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11870	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12102	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12104	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12113	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12116	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12280	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12281	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12480	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12483	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12484	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12498	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13083	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13090	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13211	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13218	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13219	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13292	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13634	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13636	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13639	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13937	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13940	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14706	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14716	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14717	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14720	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14721	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15115	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15259	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15260	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15262	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15277	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15736	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15741	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA16058	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA16620	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA16628	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA16643	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA16644	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA17138	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA17140	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA17144	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA17146	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA17479	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA17480	114870	Prismaflex 7.XX Row

Numer serii	Kod produktu	Opis produktu
PA18703	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA17884	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA18863	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA19720	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20848	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20850	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20878	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20879	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20881	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20882	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20883	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21542	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21547	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21548	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21549	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21552	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21599	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21600	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21602	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21603	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21604	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21615	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21650	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21651	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21652	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21653	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21656	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21657	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21659	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21660	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21661	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21662	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21663	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21664	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21669	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21670	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21671	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21674	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21676	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21679	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21688	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21968	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21969	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21970	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21971	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21972	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21973	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21974	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21975	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21976	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21977	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21979	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21981	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21983	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21993	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21994	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA22797	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA22799	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA22801	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA22803	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA22963	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW

Załącznik 1: Tabela produktów

PA18082	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA18083	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA18085	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11183	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11209	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13150	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13185	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13290	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14106	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14784	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11215	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA16687	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA16702	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14913	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14048	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11859	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11860	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11866	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12314	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12316	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14351	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14377	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14390	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10728	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11385	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12285	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12682	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15092	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15319	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11285	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11296	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12011	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13072	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14580	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14615	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14710	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14712	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12870	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13223	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13224	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13228	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13232	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13976	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14701	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10469	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10475	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10482	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11386	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11761	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11764	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12354	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12468	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12613	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13463	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13468	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13479	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13481	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13482	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13760	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13787	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13788	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13795	114870	Prismaflex 7.XX Row

PA0107	107493	Prismaflex System
PA0120	107493	Prismaflex System
PA0124	107493	Prismaflex System
PA1089	107493	Prismaflex System
PA1092	107493	Prismaflex System
PA1093	107493	Prismaflex System
PA1094	107493	Prismaflex System
PA1137	107493	Prismaflex System
PA1239	107493	Prismaflex System
PA1257	107493	Prismaflex System
PA2125	107493	Prismaflex System
PA2126	107493	Prismaflex System
PA2127	107493	Prismaflex System
PA2129	107493	Prismaflex System
PA2341	107493	Prismaflex System
PA2418	107493	Prismaflex System
PA2421	107493	Prismaflex System
PA2791	107493	Prismaflex System
PA2792	107493	Prismaflex System
PA2793	107493	Prismaflex System
PA2795	107493	Prismaflex System
PA2796	107493	Prismaflex System
PA2797	107493	Prismaflex System
PA3759	107493	Prismaflex System
PA3762	107493	Prismaflex System
PA3763	107493	Prismaflex System
PA3767	107493	Prismaflex System
PA3769	107493	Prismaflex System
PA3772	107493	Prismaflex System
PA12408	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12663	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12665	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12666	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12668	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12669	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13050	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13053	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13062	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13063	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13066	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13067	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13068	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13070	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13129	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14885	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14886	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14909	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14912	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14914	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14930	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14945	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA20455	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20944	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20945	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20946	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20948	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20949	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20950	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21386	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21388	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21389	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21390	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW

Załącznik 1: Tabela produktów

PA13855	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13859	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14552	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14830	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14833	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15086	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15099	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15104	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15124	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15143	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15179	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15222	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15309	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15385	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15387	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15390	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15393	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15394	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15395	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15420	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15438	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15439	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA0229	114870	Prismaflex System
PA1918	114870	Prismaflex System
PA1924	114870	Prismaflex System
PA1925	114870	Prismaflex System
PA1926	114870	Prismaflex System
PA2202	114870	Prismaflex System
PA2238	114870	Prismaflex System
PA2603	114870	Prismaflex System
PA2604	114870	Prismaflex System
PA15057	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10996	114870	PRISMAFLEX 6.10 ROW
PA5673	114870	PRISMAFLEX 4.11
PA10580	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10585	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10703	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10708	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11094	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11102	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11105	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11112	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11685	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11689	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11690	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11694	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11698	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11699	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11702	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11944	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11958	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11961	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11962	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11997	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11998	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12512	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12519	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12523	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12525	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12528	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12529	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12530	114870	Prismaflex 7.XX Row

PA21391	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21397	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21765	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21766	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21774	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA21779	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA0186	107493	Prismaflex System
PA0226	107493	Prismaflex System
PA0238	107493	Prismaflex System
PA1004	107493	Prismaflex System
PA1016	107493	Prismaflex System
PA1031	107493	Prismaflex System
PA1039	107493	Prismaflex System
PA1044	107493	Prismaflex System
PA1045	107493	Prismaflex System
PA1047	107493	Prismaflex System
PA1053	107493	Prismaflex System
PA1068	107493	Prismaflex System
PA1213	107493	Prismaflex System
PA1234	107493	Prismaflex System
PA1254	107493	Prismaflex System
PA1281	107493	Prismaflex System
PA20346	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20347	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20354	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20378	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20379	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20380	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20382	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20383	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20384	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20425	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20426	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20428	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA10467	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10476	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10485	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10551	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10554	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10555	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11420	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11421	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11422	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11423	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11424	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11441	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12053	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13192	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13770	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13773	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13774	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13776	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13954	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14050	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14924	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15377	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15378	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15379	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA8720	114489	PRISMAFLEX 6.10 ROW
PA9388	114489	PRISMAFLEX 6.10 ROW
PA20683	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20685	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW

## Załącznik 1: Tabela produktów

PA12671	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12722	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13091	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13117	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13118	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA13841	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14026	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14027	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14028	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14057	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14188	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14191	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14194	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14217	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14223	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14265	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14451	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14713	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14835	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14836	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14838	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15315	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15317	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15892	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15893	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15905	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15910	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15992	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15999	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA16020	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14388	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14389	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11912	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11915	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11916	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11918	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11919	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11922	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11951	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11955	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12009	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12058	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12618	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12683	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12685	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12690	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA14925	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA15734	114870	Prismaflex 7.XX Row

PA20989	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20990	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20552	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA19948	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA19969	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20033	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20035	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20064	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20065	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20066	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20067	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20068	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20069	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20071	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20072	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20085	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20164	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20208	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20210	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20212	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20214	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20315	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20317	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20319	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20321	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20348	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20349	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20350	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20352	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20355	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20182	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA20213	955052	PRISMAFLEX 8.XX ROW
PA10525	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10570	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10571	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA10601	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11174	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11175	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11177	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11276	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11556	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11559	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11567	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11669	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11670	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA11671	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12043	114870	Prismaflex 7.XX Row
PA12157	114870	Prismaflex 7.XX Row