

**PILNE: POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE  
PRODUKTU MEDYCZNEGO  
WSTĘPNE PISMO POWIADAMIAJĄCE**Żel do ultrasonografii EXOGEN  
Potencjalne skażenie**Powiadomienie dotyczące  
urządzenia:  
3010203571-12/14/20-001-R**

14 grudzień 2020

Szanowni Państwo,

Dowiedzieliśmy się, że niektóre partie butelek z pompką żelu do ultrasonografii EXOGEN używanych z urządzeniem EXOGEN mogą być skażone mikroorganizmami. Zidentyfikowaliśmy partie, których dotyczy problem, i prosimy pacjentów, aby wyrzucali butelki żelu z tych partii. Do chwili obecnej firma Bioventus nie otrzymała żadnych zgłoszeń dotyczących zdarzeń niepożądanych związanych z powiadomieniem. W niniejszym piśmie wskazano, jak zidentyfikować butelki z żelem, których dotyczy problem, i jakie działania podjąć.

**Numerы partii, których dotyczy powiadomienie**

To powiadomienie dotyczy wszystkich numerów partii w tej tabeli.

<b>Nazwa produktu</b>	Pompka do żelu do ultrasonografii EXOGEN
<b>Numerы partii</b>	190204, 190211, 190213, 190215, 190226, 190228, 190230, 190235, 190235T, 190250, 190251, 190252, 190263  200201, 200203, 200207, 200212, 200212T, 200215, 200215T, 200218, 200227, 200228, 200228T, 200229, 200240, 200240T

Sprawdzić wszystkie butelki z żelem. Numer partii znajduje się na dolnej krawędzi pompki do żelu, jak pokazano tutaj. Jeśli którykolwiek z numerów partii jest zgodny z którymkolwiek z numerów wymienionych powyżej, wykonać czynności wymagane na następnej stronie.



**URGENT: MEDICAL DEVICE RECALL**  
**3010203571-12/14/20-001-R**

**Wymagane czynności**

1. Zanotować numer partii każdej butelki. Wyrzucić każdą butelkę z żelem, która ma numer partii z powyższej tabeli.
2. Wypełnić poniższy formularz zaświadczenia o utylizacji.
3. Wypełniony formularz należy przesłać do firmy Bioventus, **wybierając jedną z poniższych opcji:**
  - a. Wypełnić i wysłać pocztą zaadresowaną i opłaconą kartę zwrotną dostarczoną z tym powiadomieniem.
  - b. Zeskanować i wysłać kopię przez e-mail na adres [exogensystem@stericycle.com](mailto:exogensystem@stericycle.com).
  - c. Używając smartfona, zrobić zdjęcie wypełnionego świadectwa utylizacji i wysłać na adres e-mail [exogensystem@stericycle.com](mailto:exogensystem@stericycle.com).
4. Jeśli nadal używane jest urządzenie Exogen i potrzebny jest żel zastępczy, aby kontynuować terapię, zadzwonić do obsługi klienta Bioventus pod numer 00800-02-04-06-08, a my szybko wyślemy żel zastępczy.
5. W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer 00800-02-04-06-08.
6. Ważne: W przypadku dalszej dystrybucji produktu, którego dotyczy problem, prosimy o dostarczenie kopii tego powiadomienia swoim klientom.



## ŚWIADECTWO UTYLIZACJI

1. Czy wśród posiadanych pompek żelowych, znajdują się partie, których dotyczy problem?  
TAK\_\_\_ NIE\_\_\_
2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi TAK, proszę wypełnić poniższą tabelę i zutylizować pompkę do żelu.

Zapisać numer partii i ilość posiadanego produktu, którego dotyczy problem

Numer partii	Ilość zutylizowana

Potwierdzam utylizację posiadanych przeze mnie butelek z żelem, których dotyczył problem.

Nazwa klienta: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefon: (    ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

