



Pilne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Korekta instrukcji użytkowania
w sprawie

Rękojeść akumulatorowa Economy do laryngoskopów

01.04.2022

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z naszymi danymi, otrzymałeś następujący produkt:

Grupa produktów	REF	Model	LOT, którego to dotyczy
Laryngoskopy	03.41001.721	Uchwyt baterii F.O.-Economy, zielony	U =2013; V =2014; W =2015; X =2016; Y =2017; Z =2018; A =2019; B =2020
	03.11001.721	Uchwyt baterii WL- Economy, niebieski	

Opis problemu:

Okres użytkowania powyższych uchwytów jest ograniczony do 5 lat. W przypadku użytkowania po upływie okresu eksploatacji uchwyt z tworzywa sztucznego może pęknąć z powodu starzenia się materiału.

Tej informacji brakowało w instrukcjach użytkowania dołączonych do wspomnianych uchwytów.


Brakujące informacje zostały uzupełnione w wersji instrukcji QM-GAP-0140D.

Wymagane środki:

Proszę sprawdzić LOT uchwytów baterii Economy.

Po przekroczeniu 5-letniego okresu eksploatacji należy je zutylizować.

LOT można znaleźć na etykiecie opakowania i/lub na główce uchwytu (patrz zdjęcia):

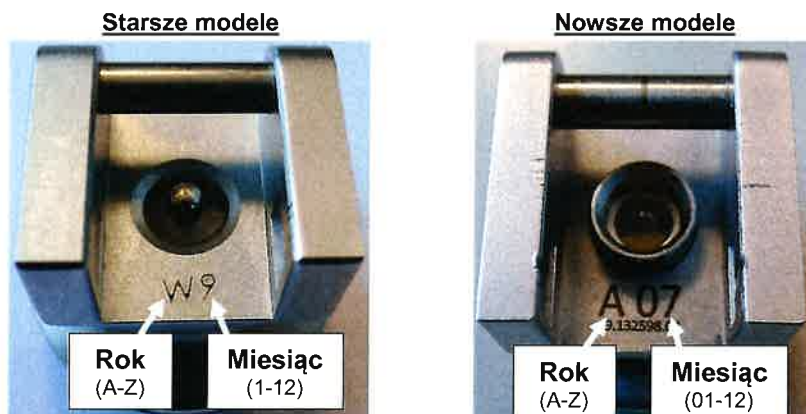

Pod poniższym linkiem znajdują się aktualnie obowiązujące instrukcje użytkowania do pobrania na naszej stronie internetowej: <https://www.kawemed.com/en/downloads/manuals/>

KIRCHNER & WILHELM
GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56
71679 Asperg, Germany
www.kawemed.com
info@kawemed.de

Zentrale / Switchboard
Fon +49 (0)7141 / 68 188 - 0
Fax +49 (0)7141 / 68 188 - 11
Verkauf / Sales Department
Fon +49 (0)7141 / 68 188 - 44
Fax +49 (0)7141 / 68 188 - 55

kompetenz in medizintechnik
weltweit
seit 1890



Ujawnienie informacji opisanych w niniejszym dokumencie:

Należy dopilnować, aby wszyscy użytkownicy powyższych produktów oraz inne osoby, które należy poinformować, zapoznali się z niniejszymi Pilnymi Informacjami dotyczącymi Bezpieczeństwa. Jeśli produkty zostały przekazane osobom trzecim, prosimy o przekazanie kopii tej informacji lub poinformowanie o tym osoby kontaktowej wskazanej poniżej.

Należy zachować te informacje przynajmniej do czasu zakończenia działania.

Właściwe władze krajowe otrzymały kopię niniejszej "Pilnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa".

Firma **KIRCHNER & WILHELM** wyraża ubolewanie z powodu wszelkich niedogodności spowodowanych tym problemem.

Z wyrazami szacunku **KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG**

**Eberhardstr. 56
D-71679 Asperg
Germany**

Sandrina Lerch
qm@kawemed.de
Zarządzanie jakością

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Amtsgericht Stuttgart HRA 202237
Persönlich haftender Gesellschafter: Kirchner Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Stuttgart HRB 203363
Geschäftsführerin: Regina Kirchner-Gottschalk

POSTANSCHRIFT:
Postfach 11 18
71673 Asperg - Deutschland

SITZ DER GESELLSCHAFT: Asperg

USt-IdNr.: DE 146132614
WEEE-Reg.-Nr.: DE 63702395

KaWe Customer (Poland)

REF: 03.11001.721

REF: 03.41001.721

Time period: 2013 – 2020

Client no.	Customer	Address	E-mail
21065	Horn Wellness Group Sp. z o.o.	ul. Zonkilowa 11 60-175 Poznan/POLEN	kontakt@trafficpeaks.pl
21133	SKLEP DLA LEKARZA SP ZOO	Ul. Jasminowa 12 62-070 Dabrowka / POLEN	sklep@sklepdialekarza.pl