

12 stycznia, 2021

## **Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania reduktora wysokiego ciśnienia MMR firmy GCE**

### **Szczegóły urządzeń:**

Reduktor wysokiego ciśnienia MMR, Poz:

0729200

0762170

0762180

316638

325197517

325197518

325396786

325396787

325396840

325396901

325396904

325396905

325397702

Firma GCE zainicjowała w sposób dobrowolny działania naprawcze dotyczące bezpieczeństwa w przypadku wyżej wymienionych produktów. Niniejszy komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu stanowi rozszerzenie komunikatu wydanego 1 lipca 2016 r., który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Załącznik nr 1 komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu\_S2 + Reduktora wielostopniowego\_AGA 1607

### **Opis problemu:**

GCE zidentyfikował problem związany z partiami pokryw. Podczas użytkowania może potencjalnie wystąpić awaria polegająca na mechanicznym uszkodzeniu/rozpadzie pokrywy. Na poniższych zdjęciach pokazujemy sytuację, w której w miejscu kontaktu sprężyny i podkładki z pokrywą reduktora pękła pokrywa reduktora, powodując rozerwanie części pokrywy.




### Ocena ryzyka:

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka firma GCE zdecydowała się wdrożyć następujące działania naprawcze dotyczące bezpieczeństwa:

- Dystrybucję informacji dotyczących bezpieczeństwa dla klientów, dystrybutorów, sprzedawców i użytkowników produktów MMR posiadających reduktory wysokiego ciśnienia.
- Instrukcje dotyczące działań naprawczych - zobacz poniżej zalecane działania, które powinni podjąć klienci, dystrybutorzy, personel sprzedaży i użytkownicy produktów MMR posiadający reduktory wysokiego ciśnienia.

### Rekomendowane działania

1. Wizualne sprawdzenie numeru seryjnego na korpusie reduktora, jak wskazano poniżej, a następnie porównanie z listą produktów, których dotyczy problem, załączoną poniżej.
2. Jeśli pierwsza i druga cyfra numeru seryjnego to **15** lub **16** (od 1501XXXXXX do 1612XXXXXX), prosimy:
  - 2.1 Nie używać produktu
  - 2.2 Skontaktować się z dystrybutorem lub firmą, która przesłała Ci niniejszą informację dotyczącą bezpieczeństwa, lub z lokalnym przedstawicielem GCE w celu wymiany produktu.

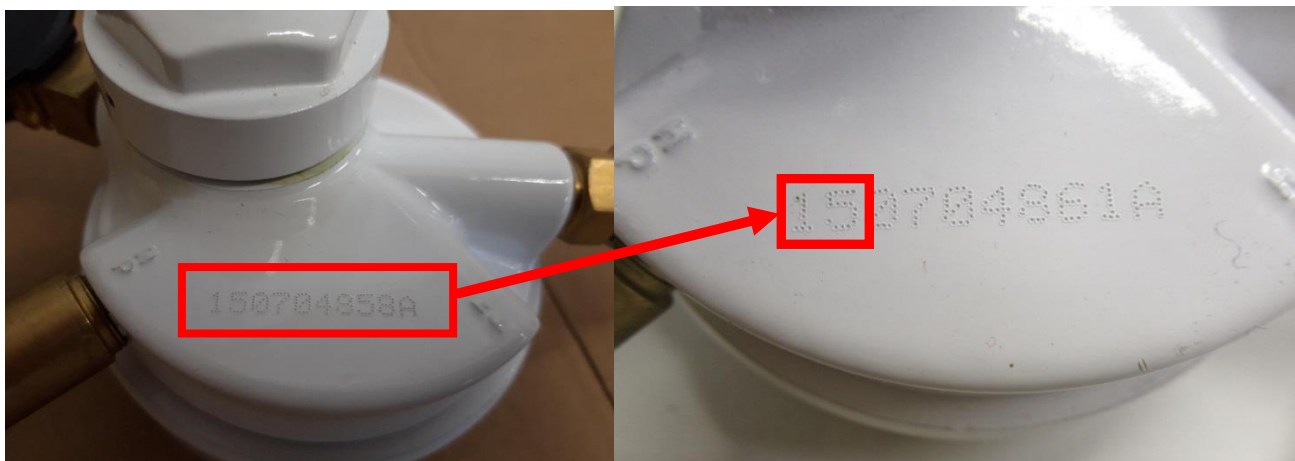

### Dystrybucja i rozpowszechnianie niniejszego komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa stosowania (FSN) produktu

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu został przekazany wszystkim odbiorcom reduktora wysokociśnieniowego MMR, który pochodzi z podejrzanych partii, a także właściwym organom rynków, których to dotknęło. Odbiorcy powinni przekazać niniejszy numer FSN wszystkim osobom, które należy powiadomić za pośrednictwem Państwa organizacji lub dowolnej organizacji, do której zostały dostarczone produkty, których może to dotyczyć. Prosimy w obiegu niniejszego komunikatu o uwzględnienie użytkowników końcowych i innych osób w łańcuchu dostaw.

GCE zobowiązuje się do dostarczania bezpiecznych produktów wysokiej jakości. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności, które niniejszy FSN może spowodować dla Państwa i Państwa działań. Jeśli macie Państwo inne pytania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym lub dowolnym oddziałem sprzedaży GCE.

Aby uzyskać lokalne dane kontaktowe, odwiedź stronę [www.gcegroup.com](http://www.gcegroup.com).

W imieniu i na rzecz GCE,

Inż. Vlastimil Strnad  
Quality and Lean Sigma Manager

Załącznik nr 1 Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania\_S2 + Reduktora wielostopniowego\_AGA 1607

Lista produktów, których dotyczy problem, wraz z zamówieniami klientów

Nr pozycji	Opis produktu	Zamówienie klienta	Ilość (szt.)	Kraj
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120051283	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120051307	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120051566	3	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120051687	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120051690	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120051781	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120052073	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120052181	3	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120052202	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120052243	4	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120052249	11	FI
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120052256	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120052383	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120053129	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120053427	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120053522	7	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120053669	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120053669	9	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120053772	4	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120053801	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120053875	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120053923	2	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120054168	24	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120054168	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120054241	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120054549	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120054660	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120055191	4	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120055387	2	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120055696	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120055871	5	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120056253	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120056266	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120056303	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120056359	4	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120056501	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120056684	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120056969	2	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120057218	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120057249	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120057370	1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1122005523	-1	NO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124133938	1	SE

Nr pozycji	Opis produktu	Zamówienie klienta	Ilość (szt.)	Kraj
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124133989	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124134069	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124134184	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124134223	3	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124134319	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124134516	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124134516	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124134516	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124134615	3	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124135262	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124135286	10	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124135386	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124135386	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124135472	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124135537	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124135766	3	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124135880	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124136160	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124136402	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124136721	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124136721	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124136798	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124136999	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124137329	4	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124137446	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124137523	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124137624	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124137642	3	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124137704	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124137811	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124137906	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124138181	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124138537	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124138692	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124139166	5	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124139421	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124139445	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124139445	5	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124139584	8	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124140198	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124140305	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124140436	7	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124140635	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124140684	5	SE

Nr pozycji	Opis produktu	Zamówienie klienta	Ilość (szt.)	Kraj
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124140743	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124140893	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124140893	9	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124141306	9	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124141330	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124141376	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124141459	4	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124141748	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124141863	5	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124141895	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124141895	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124142027	1	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1124142030	2	SE
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	3600009052	1	RO
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	3210178630	1	PL
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	3210180366	1	PL
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	3210186257	2	PL
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	3210186600	1	PL
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	4600023972	1	CZ
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	4600023972	1	CZ
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	4600025920	2	CZ
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	4600026730	2	CZ
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	4600028734	1	CZ
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	4600030850	1	CZ
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	4600031221	1	CZ
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	4600032066	2	CZ
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	4600032475	3	CZ
325396786	MMR O2 W21.8 G3/8 G	4600034456	1	CZ
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120051283	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120051307	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120051307	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120051687	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120051690	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120051781	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120052073	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120052073	4	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120052181	3	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120052202	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120052243	4	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120052249	11	FI
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120052256	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120052383	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053129	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053427	1	NO

Nr pozycji	Opis produktu	Zamówienie klienta	Ilość (szt.)	Kraj
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053521	4	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053521	4	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053521	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053522	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053522	2	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053669	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053669	9	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053772	4	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053801	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120053875	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120054067	12	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120054067	3	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120054168	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120054168	23	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120054241	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120054660	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120055191	5	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120055191	2	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120055191	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120055387	2	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120055696	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120055871	5	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120056253	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120056266	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120056501	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120056684	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120056969	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120056969	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120057163	3	IS
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120057249	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1120057370	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1122005523	1	NO
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124133844	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124133900	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124134319	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124134421	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124134516	5	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124134516	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124134615	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124134689	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124135108	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124135147	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124135262	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124135386	7	SE

Nr pozycji	Opis produktu	Zamówienie klienta	Ilość (szt.)	Kraj
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124135472	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124135537	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124135766	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124135880	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124136160	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124136321	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124136721	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124136798	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124136999	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124137329	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124137446	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124137523	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124137624	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124137642	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124137642	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124137704	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124137811	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124137826	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124137906	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124138006	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124138306	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124138537	4	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124138548	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124138692	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124139022	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124139022	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124139166	5	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124139445	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124139445	6	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124139584	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124139584	7	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124140399	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124140684	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124140743	1	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124140893	9	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124140893	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124141459	6	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124142030	2	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	1124142118	3	SE
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	3210187336	5	CY
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	3210202283	2	CY
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	3210208154	1	CY
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	3210208154	4	CY
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	3210208289	1	CY

Nr pozycji	Opis produktu	Zamówienie klienta	Ilość (szt.)	Kraj
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	3210180366	1	PL
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	3210186257	2	PL
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	3210192557	1	PL
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	4600023972	1	CZ
325396787	MMR AIR G5/8 G3/8 G	4600033750	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600023503	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600023798	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600023798	4	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600023798	4	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600023934	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600024035	4	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600024363	4	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600024888	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600025126	6	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600025126	14	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600025252	6	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600025276	10	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600025519	1	SK
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600025660	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600026137	1	SK
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600026341	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600026341	3	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600026341	3	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600026341	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600027060	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600027595	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600028094	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600028103	5	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600028679	5	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600028755	5	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600029307	4	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600029307	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600029307	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600029307	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600029307	3	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600029307	3	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600029307	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600029307	10	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600029307	10	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600031035	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600031046	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600031219	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600031626	1	CZ
Nr pozycji	Opis produktu	Zamówienie klienta	Ilość (szt.)	Kraj



0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600031706	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600031837	1	SK
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600032064	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600032103	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600032194	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600032542	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600032645	3	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600032645	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600033599	8	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600033599	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600033749	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600033752	8	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600033976	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600033976	3	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600033976	6	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600034025	2	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600034062	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600034592	1	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	4600034646	5	CZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200000284	1	RU
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200000543	2	KZ
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200000621	1	RU
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200001376	1	RU
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200002918	1	RU
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200003020	2	RU
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200003684	1	RU
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200004032	3	RU
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200004032	1	RU
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200004032	2	RU
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200004032	1	RU
0762180	MMR+ CO2 G3/4 G3/8 1.5B G	5200004032	6	RU
325197517	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120051480	5	SE
325197517	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120051911	5	SE
325197517	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120052182	3	SE
325197517	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120052876	5	SE
325197517	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120053511	10	SE
325197517	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120054391	8	SE
325197517	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120057068	4	SE
325197517	MMR O2 W21.8 G3/8 G	1120057068	4	SE
325197518	MMR+ AIR G5/8 G3/8 G	1120051480	2	SE
325197518	MMR+ AIR G5/8 G3/8 G	1120051911	5	SE
325197518	MMR+ AIR G5/8 G3/8 G	1120052182	7	SE
325197518	MMR+ AIR G5/8 G3/8 G	1120052876	5	SE
325197518	MMR+ AIR G5/8 G3/8 G	1120053511	10	SE
Nr pozycji	Opis produktu	Zamówienie klienta	Ilość (szt.)	Kraj

325197518	MMR+ AIR G5/8 G3/8 G	1120054391	8	SE
325197518	MMR+ AIR G5/8 G3/8 G	1120057068	1	SE
325197518	MMR+ AIR G5/8 G3/8 G	1120057068	3	SE
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1120051081	2	SE
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1120052249	11	FI
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1120052383	1	SE
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1120052552	1	IS
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1124133742	2	SE
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1124135856	1	SE
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1124135856	1	SE
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1124136962	1	SE
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1124138397	4	SE
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1124138584	1	SE
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	1124141509	2	SE
316638	MMR AIR8 G5/8 G3/8 G	4600025920	1	CZ
0729200	MMR N G3/4 G3/8 G	3210187336	5	CY
0729200	MMR N G3/4 G3/8 G	3210193705	5	CY
0729200	MMR N G3/4 G3/8 G	3210195493	1	CY
325396840	SIMPLEX MMR O2 1x3 CG AGA	3210178294	1	PL
325396901	SIMPLEX MMR O2 1x2 CG AGA	1120053555	1	SE
325396901	SIMPLEX MMR O2 1x2 CG AGA	1120053863	1	SE
325396901	SIMPLEX MMR O2 1x2 CG AGA	1120056087	1	SE
325396901	SIMPLEX MMR O2 1x2 CG AGA	1124136271	1	SE
325396904	SIMPLEX MMR AIR 1x3 CG AGA	1120052256	1	NO
325396905	SIMPLEX MMR AIR 1x2 CG AGA	1120053391	1	SE
325396905	SIMPLEX MMR AIR 1x2 CG AGA	1120057003	1	SE
325397702	SIMPLEX MMR 1x3 CG GCE	1120054659	1	SE
325397702	SIMPLEX MMR 1x3 CG GCE	1120054659	1	SE
325397702	SIMPLEX MMR 1x3 CG GCE	2810124054	3	FR
325397702	SIMPLEX MMR 1x3 CG GCE	2810124054	3	FR
325397702	SIMPLEX MMR 1x3 CG GCE	2810131653	1	FR
325397702	SIMPLEX MMR 1x3 CG GCE	2810134547	1	FR
325397702	SIMPLEX MMR 1x3 CG GCE	3010053485	1	IT
325397702	SIMPLEX MMR 1x3 CG GCE	3210193496	1	HU
325397702	SIMPLEX MMR 1x3 CG GCE	3210196584	1	PL