



## **PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

GE Healthcare

GE Healthcare IT  
540 W. Northwest Hwy  
Barrington IL 60010  
USA

Znak wewn. GE Healthcare: FMI 85410

5 października 2015

Do: Kierowników zakładów radiologii  
Dyrektorów szpitali  
Ordynatorów oddziału radiologii  
Administratorów systemu PACS  
Dyrektorów działów informatycznych

**DOTYCZY: Centricity PACS-IW – możliwość braku obrazów w badaniach**

Firma GE Healthcare wykryła niedawno potencjalny problem dotyczący bezpieczeństwa związany z Centricity PACS-IW, wersje 3.5.0 do 3.7.3.9 SP2, 3.7.3 SPA10 i 4.0.1. **Prosimy upewnić się, że wszyscy użytkownicy tych urządzeń w Państwa jednostce zapoznali się z treścią niniejszego powiadomienia dot. bezpieczeństwa wraz z zalecanymi działaniami.**

### **Problem dotyczący bezpieczeństwa**

Firma GE Healthcare wykryła niedawno problem, który może wpływać na kompletność badań. Kiedy parametr systemowy „MapRoute” zostanie ustawiony na wartość powyżej 1, istnieje ryzyko, że nie wszystkie obrazy w badaniu zostaną przetworzone; może wówczas brakować jednego lub większej liczby obrazów. W opisywanym przypadku nie doszło do żadnych obrażeń ciała.

### **Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**

Firma GE Healthcare przeprowadzi zdalną kontrolę Państwa systemu, aby potwierdzić wartość parametru „MapRoute”. Jeśli wartość okaże się być większa niż zalecane ustawienie wynoszące 1, firma GE zresetuje ten parametr systemowy do wartości 1. Nie wolno w żaden sposób zmieniać wartości tego parametru.

Do momentu naprawienia problemu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Wykorzystać w ramach procesu KJ licznik obrazów, aby umożliwić użytkownikowi wykrycie rozbieżności między liczbą obrazów przekazaną ze sprzętu diagnostycznego a liczbą obrazów dostępnych w PACS IW Viewer.
  - a. W przypadku wykrycia rozbieżności należy spróbować ponownie wysłać badanie do PACS.
  - b. Jeśli ponowne wysyłanie zakończy się niepowodzeniem, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu firmy GE Healthcare, aby uzyskać pomoc oraz instrukcje dotyczące postępowania z badaniem, którego dotyczy problem. Nagłe przypadki dotknięte tym problemem należy interpretować na poziomie sprzętu diagnostycznego.
2. Jeśli moduł DICOM Storage Commit jest skonfigurowany i używany, do sprzętu diagnostycznego nie są wysyłane żadne powiadomienia o składowaniu dotyczące obrazów dotkniętych problemem.

### **Dane szczegółowe problematycznego produktu**

Centricity PACS-IW wersje 3.5.0 do 3.7.3.9 SP2, 3.7.3 SPA10 i 4.0.1.

### **Korekta dotycząca produktu**

Firma GE Healthcare dokona bezpłatnie korekty wszystkich systemów, których dotyczy problem, dostarczając aktualizację oprogramowania.

**Informacje  
kontaktowe**

W razie jakichkolwiek pytań związanych z powyższą "Informacją dotyczącą bezpieczeństwa produktu" bądź z określeniem zakresu objętych nią produktów, uprzejmie prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub serwisu GE.

GE Medical Systems Sp. Z o.o.  
02-583 Warszawa  
Ul. Wołoska 9  
Tel.: (0-22) 330 83 30 Dział Serwisu

Service manager : Gerwald Steiger - [gerwald.steiger@med.ge.com](mailto:gerwald.steiger@med.ge.com) +49- 175 934 1199

GE Healthcare potwierdza, iż niniejszy dokument został przekazany do wiadomości odpowiednich organów państwowych.

Pragniemy zapewnić, że utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowi dla nas najwyższy priorytet. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o natychmiastowy kontakt.

Dziękujemy!



Russell Roberson  
Wiceprezes QARA  
GE Healthcare IT



lek. med. Jeff Hersh  
Główny Inspektor Medyczny - Rozwiązania Medyczne  
GE Healthcare