



## **PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

GE Healthcare

Healthcare Systems  
9900 Innovation Drive  
Wauwatosa, WI 53226  
USA

Znak wewn. GE Healthcare: FMI 36102

28 czerwca 2014

Do: Administratora opieki zdrowotnej/Kierownika zespołu zarządzania ryzykiem  
Pielęgniarki Naczelnej  
Kierownika Działu Inżynierii Biomedycznej

DOTYCZY: Potencjalny problem dotyczący awarii dźwięku w monitorze CARESCAPE™ B650

Firma GE Healthcare wykryła niedawno potencjalny problem dotyczący bezpieczeństwa związany z możliwą awarią dźwięku w monitorze CARESCAPE B650. **Prosimy upewnić się, że wszyscy użytkownicy tych urządzeń w Państwa jednostce zapoznali się z treścią niniejszego powiadomienia dot. bezpieczeństwa wraz z zalecanymi działaniami.**

**Problem dotyczący bezpieczeństwa** Po podłączeniu zewnętrznego wyświetlacza do monitora CARESCAPE B650 za pomocą przedłużacza USB z aktywnym rozdzielaczem USB w systemie może wystąpić awaria dźwięku, w tym dźwięków alarmowych emitowanych przez monitor pacjenta. Problem ten może także wystąpić po wyłączeniu i włączeniu zasilania zewnętrznego wyświetlacza w trakcie zwyczajnej pracy monitora.

### **Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**

Aby uniknąć potencjalnej awarii dźwięku w monitorze CARESCAPE B650:

1. Nie wyłączać i nie włączać ponownie zewnętrznego wyświetlacza w trakcie zwykłej pracy monitora.
2. Nie używać przedłużacza USB z aktywnym rozdzielaczem.

Jeśli awaria dźwięku wystąpi w trakcie zwykłej pracy monitora, można ponownie włączyć dźwięk, uruchamiając monitor ponownie.

Problem ten nie wpływa na inne funkcje monitora CARESCAPE B650.

### **Dane szczegółowe problematycznego produktu**

Opisany powyżej problem może wystąpić w monitorze CARESCAPE B650 z oprogramowaniem w wersji 1.1.12.26 lub starszej.

### **Korekta dotycząca produktu**

W celu skorygowania tego problemu firma GE Healthcare udostępni bezpłatną poprawkę do oprogramowania.

### **Informacje kontaktowe**

W razie jakichkolwiek pytań związanych z powyższą "Informacją dotyczącą bezpieczeństwa produktu" bądź z określeniem zakresu objętych nią produktów, uprzejmie prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego PROMED S.A., Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa, tel. 22 8391944 fax. 22 8398185, email [serwis@promed.com.pl](mailto:serwis@promed.com.pl)


GE Healthcare potwierdza, iż niniejszy dokument został przekazany do wiadomości odpowiednich organów państwowych.

Pragniemy zapewnić, że utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowi dla nas najwyższy priorytet. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o natychmiastowy kontakt.

Dziękujemy!



James Dennison  
Wiceprezes QARA  
GE Healthcare Systems



Douglas M. Hansell, M.D., MPH  
Dyrektor Medyczny  
GE Healthcare