

## Notatka bezpieczeństwa

### Trwałość użytkowa podnośnika basenowego Oxford<sup>®</sup> Dipper

Numer ref.: 000017

### Wymagana czynność:

Joerns Healthcare zaleca wszystkim autoryzowanym dystrybutorom produktów Oxford wyszukanie obiektów, do których dostarczono podnośniki basenowe Oxford Dipper, aby poinformować je o nowym brzmieniu informacji dotyczącej trwałości użytkowej oraz zaleceniach producenta.

Brytyjskie Rozporządzenie o pracach dźwigowych i sprzęcie dźwigowym z 1998 r. (Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998) obowiązuje tylko w Wielkiej Brytanii.

### Opis:

W egzemplarzach starszych niż 7 lat usterki, np. korozja, mogą zacząć występować gwałtownie oraz mogą nie być widoczne od zewnątrz. Ze względu na trudne warunki, w których podnośnik jest przechowywany i użytkowany, Joerns Healthcare usilnie zaleca przeprowadzanie próby obciążenia podczas każdego półrocznego przeglądu. W pobliżu basenów panuje wysoka wilgoć i warunki sprzyjające korozji. Usterki powstające w tych warunkach mogą pozostać niewidoczne od zewnątrz.

### Informacja:

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące trwałości użytkowej podnośnika basenowego Oxford Dipper.

**Aby ograniczyć ryzyko urazu pacjenta i opiekuna, należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami oraz opisem działań zapobiegawczych.**

W wyniku szeroko zakrojonych testów wytrzymałościowych oraz w oparciu o zaufanie wobec produktu i powiązane z nim informacje zwrotne od użytkowników firma Joerns Healthcare modyfikuje



Oxford Dipper (Nr prod. OP10014)



Oxford Dipper (Nr prod. OP10013)

informacje dotyczące trwałości użytkowej podnośnika basenowego Oxford Dipper. W nowym brzmieniu informacja ta brzmi następująco:

***Podnośnik basenowy Oxford Dipper ma założony i potwierdzony testami okres eksploatacji minimum 5 lat, o ile jest użytkowany, konserwowany i czyszczony zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi.***

***Ze względu na trudne warunki użytkowania produktu maksymalny okres użytkowania produktu wynosi 7 lat. Użytkowanie produktu po upływie tego okresu może stwarzać zagrożenie dla klienta i opiekuna.***

***Aby podnośnik basenowy Oxford Dipper był bezpieczny i sprawny technicznie, należy przeprowadzać codzienne czynności kontrolne, regularnie go czyścić oraz wykonywać półroczne przeglądy zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Pozwoli to w odpowiednim momencie wykryć oraz usunąć wszelkie usterki, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.***

***Użytkowanie niezgodnie z instrukcją obsługi może spowodować skrócenie okresu użytkowania.***

### Działania wymagane i zapobiegawcze:

**Joerns Healthcare informuje, że ze względów bezpieczeństwa podczas następnego zaplanowanego (półrocznego) przeglądu, który powinien obejmować próbę obciążenia, należy sprawdzić, czy dany egzemplarz jest starszy niż 7 lat. Podnośniki starsze niż 7 lat muszą zostać wymienione na nowy przed następnym zaplanowanym (półrocznym) przeglądem.**

### Podnośniki Dipper starsze niż 7 lat:

Datę produkcji można sprawdzić na podstawie **numeru seryjnego**. Znajduje się on na ramie produktu.

Wiek podnośnika Dipper można także sprawdzić w firmie Joerns Healthcare. W tym celu należy podać numer zamówienia oraz nazwę grupy zakupowej lub numer faktury sprzedaży dostarczonej przez producenta.

W przypadku stwierdzenia, że podnośnik ma ponad 7 lat, należy skontaktować się z firmą Joerns Healthcare e-mailem: [info@joerns.co.uk](mailto:info@joerns.co.uk) lub telefonicznie: +44 (0)844 811 1156.

Numerы części zamiennych produktów objętych zmianą:

Opis	Nr części
Oxford® Dipper z siedziskiem Ranger Commode i rozpórką	OP10014
Oxford® Dipper z siedziskiem Ranger Commode i przenośnikiem	OP10013

**Należy pamiętać, że gniazdo montażowe (A, B lub C), w którym mocowany jest maszt podnośnika, nie wymaga modyfikacji, dlatego też wymiana podnośnika nie wymaga żadnych prac budowlanych.**

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości należy skontaktować się ze swoim kierownikiem sprzedaży lub bezpośrednio z firmą Joerns Healthcare pod numerem +44 844 811 1156.

# Formularz potwierdzenia odbioru

**NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA: Nr ref. 000017**

**W sprawie: PODNOŚNIK OXFORD DIPPER – okres użytkowania ponad 7 lat**

- Joerns Healthcare wymaga potwierdzenia otrzymania i zrozumienia informacji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej notatce bezpieczeństwa nr 000017.
- Niniejsze potwierdzenie odbioru należy wypełnić i odesłać do firmy Joerns Healthcare listownie lub e-mailem: [warranty@joerns.co.uk](mailto:warranty@joerns.co.uk).
- Pierwotny nabywca podnośnika Dipper ma obowiązek powiadomienia o zrealizowaniu przez klienta wymaganych czynności opisanych w notatce 000017.

**Część A** (należy wypełnić):

Nazwa sprzedawcy lub usługodawcy: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Ja, (*IMIĘ I NAZWISKO CZYTELNICIE*) \_\_\_\_\_ potwierdzam odbiór notatki 000017.

- Wszystkie informacje zawarte w tej notatce zostały przekazane odpowiednim pracownikom w mojej organizacji.
- Kopie tej notatki bezpieczeństwa zostały także przesłane domom opieki, szpitalom, użytkownikom prywatnym, do których moja organizacja dostarczyła wskazany produkt i których pracownicy sami odpowiadają za organizację przeglądów podnośnika Oxford Dipper.

**Część B** (W odniesieniu do produktu jestem: - opiekunem, partnerem, krewnym, znajomym, sprzedawcą itd.)

Poniższe podnośniki Dipper zostały wymienione lub zostaną wymienione zgodnie z informacjami w notatce bezpieczeństwa 000017 podczas następnego przeglądu:

Nr. seryjne \_\_\_\_\_

Lokalizacja podnośników (adres domu opieki, hospicjum, prywatnego domu itd.)

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Formularz wypełniony przez: (Drukowanymi): \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_ Data: \_\_. \_\_. 2017

Formularz należy wypełnić i odesłać:

**Joerns Healthcare Ltd  
Drakes Broughton Business Park,  
Worcester Rd, Drakes Broughton,  
Pershore, Worcestershire,  
WR10 2AG Wielka Brytania**