

PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA **Przegubowe ładunki wprowadzające Covidien Endo GIA™**

Maj 2018 r.

Nr ref. Medtronic: FA816

Szanowni Klienci!

Celem niniejszego pisma jest przekazanie informacji o tym, że spółka Medtronic z własnej inicjatywy wycofuje ładunki staplera endoskopowego z artykulacją Covidien Endo GIA™ z określonych partii produkcyjnych.

Opis problemu:

Powodem niniejszego dobrowolnego wycofania opisywanego wyrobu jest możliwy brak elementu przesuwnego urządzenia. Element przesuwny odpowiada za formowanie zszywek. Jego brak uniemożliwia ich formowanie. Użycie produktu z opisaną wadą może skutkować brakiem możliwości utworzenia linii zespolenia rozdzielonych tkanek, a w efekcie krwawieniem lub wyciekami zawartości światła ww. tkanek. Firma Medtronic otrzymała cztery zgłoszenia dotyczące wystąpienia obrażeń związanych z tym problemem.

Niniejsze dobrowolne wycofanie produktu dotyczy wyłącznie wyrobów o numerach partii produkcyjnych wymienionych w Załącznikach A i B.

Firma Medtronic prosi o niezwłoczne zaprzestanie stosowania objętych wycofaniem wyrobów wymienionych w Załącznikach A i B. Prosimy o objęcie kwarantanną i zwrot wszystkich nieużytych wyrobów o wymienionych numerach partii produkcyjnych. Nieużyte wyroby z partii, których dotyczy problem, należy zwrócić, postępując zgodnie z instrukcją w części *Wymagane działania* poniżej. Jeżeli przekazali Państwo wymienione w Załącznikach A i B wyroby Endo GIA™ innym osobom lub placówkom, należy niezwłocznie przekazać informacje z niniejszego pisma odbiorcom tych wyrobów. Nieużyte wyroby z partii, których dotyczy problem, należy zwrócić.

Wymagane działania:

1. Prosimy o niezwłoczne zaprzestanie użytkowania i objęcie kwarantanną wyrobów pochodzących z partii produkcyjnych wymienionych w Załącznikach A i B.
2. Wyroby, których dotyczy problem, należy zwrócić zgodnie z poniższą instrukcją.
3. Prosimy o wypełnienie Formularza weryfikacji zwrotu, **nawet jeśli nie posiadają Państwo produktów objętych wycofaniem na stanie magazynowym.**

	Klienci posiadający wyroby na stanie magazynowym	Klienci nieposiadający wyrobów na stanie magazynowym	Odbiorca wypełnionego formularza
Wyrób zakupiony bezpośrednio od firmy Medtronic	Należy w całości wypełnić załączony Formularz weryfikacji zwrotu. Po otrzymaniu formularza Dział obsługi klienta firmy Medtronic skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów zwrotu wyrobów. Otrzymają Państwo notę kredytową na niewykorzystane zwrócone wyroby.	Wypełnić formularz i zaznaczyć pole „brak w magazynie”.	Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną lub faksem do osoby odpowiedzialnej za kontakt z ramienia firmy Medtronic.
Wyrób zakupiony od dystrybutora	Należy wypełnić wszystkie pola formularza i skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem w celu ustalenia szczegółów zwrotu wyrobu.	Wypełnić formularz i zaznaczyć pole „brak w magazynie”.	Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną lub faksem do dystrybutora oraz osoby odpowiedzialnej za kontakt z ramienia firmy Medtronic wymienionej w formularzu weryfikacyjnym.

O niniejszych działaniach został poinformowany Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Egzemplarz niniejszej notatki należy przechowywać w dokumentacji placówki.

W przypadku problemów wynikających z niedostatecznej jakości wyrobu lub wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy skontaktować się z firmą Medtronic.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z opisanym problemem. Zależy nam na bezpieczeństwie pacjentów i będziemy wdzięczni za szybkie podjęcie odpowiednich działań. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego pisma należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic.

Z poważaniem

Adam Kozuch
Business Unit Manager / Area Sales Manager

Załącznik A

Nr katalogowy	Opis produktu	Partie, których dotyczy problem		
030450	Endo GIA™ Auto Suture™ Universal Articulating Loading Unit 30mm- 2.0mm	N7L0306KX	N8B0724KX	N8C1303KRX
		N7M0221KX	N8C0958KX	
030451	Endo GIA™ Auto Suture™ Universal Articulating Loading Unit 30mm - 2.5mm	N7L0071KX	N7M0464KX	N8A1014KX
		N7L0527KX	N7M0786KX	N8B0304KX
		N7L0792KX	N8A0154KX	N8C0830KX
		N7L0914KX	N8A0553KX	N8C0847KRX
		N7L1014KX	N8A0850KX	N8C0848KRX
030452	Endo GIA™ Auto Suture™ Universal Articulating Loading Unit 30mm - 3.5mm	N7L0191KX	N8B0234KX	N8C0147KX
		N7M0944KX		
030454	Endo GIA™ Auto Suture™ Universal Articulating Loading Unit 45mm - 2.5mm	N7K1146KX	N7M0509KX	N8A0434KX
		N7L0355KX	N7M0520KX	N8A0435KX
		N7L1119KX	N7M0521KX	N8B0487KX
		N7M0088KX	N8A0312KRX	N8C0026KX
		N7M0343KX	N8A0360KX	N8C0119KX
		N7M0477KRX	N8A0433KX	N8C0630KX
030455	Endo GIA™ Auto Suture™ Universal Articulating Loading Unit 45mm- 3.5mm	N7F0576KX	N7M0383KX	N8A0324KX
		N7L0032KX	N7M0584KX	N8A0477KRX
		N7L0239KX	N7M0696KX	N8A0551KX
		N7L0519KX	N8A0036KX	N8C0357KX
		N7M0104KX		
030457	Endo GIA™ Auto Suture™ Universal Articulating Loading Unit 60mm -2.5mm	N7D0492KRX	N7L0699KX	N8A0213KX
		N7F0518KX	N7L0732KX	N8B0002KX
		N7F0651KX	N7L1043KX	N8C0429KX
		N7L0270KX		
030458	Endo GIA™ Auto Suture™ Universal Articulating Loading Unit 60mm - 3.5mm	N7F0631KX	N7M0646KX	N8B0099KX
		N7L0117KX	N7M0740KX	N8C0008KX
		N7L0397KX	N7M0972KX	N8C0205KX
		N7L0465KX	N8A0172KX	N8C0532KX
		N7L0768KX	N8A0539KX	N8C0571KX
		N7L0911KX	N8A0679KX	N8C0758KX
		N7L1075KX	N8A0910KX	N8C0795KX
		N7M0067KX	N8A0961KX	N8C1284KRX
EGIA30CTAV	Endo GIA™ 30mm Gray Curved Tip Articulating Vascular Reload with Tri-Staple™ Technology	N7G0756KX		
EGIA30AV	Endo GIA™ 30mm Gray Articulating Vascular Reload with Tri-Staple™ Technology	N7G0757KX		
EGIA45CTAV	Endo GIA™ 45mm Gray Curved Tip Articulating Vascular Reload with Tri-Staple™ Technology	N7G0796KX		

Załącznik B

Numer katalogowy	Opis zestawu	Partie, których dotyczy problem
SLEEVEGK3	BOX SLEEVEGK3	0215050387
SLEEVEGK3	BOX SLEEVEGK3	0215193250
01KBAR006116V	BOX 01KBAR006116V PROC BYPASS 01KBAR0061	0214710711
KITDE0143	BOX KITDE0143 BYPASS BOX	0214463634
KITDE0143	BOX KITDE0143 BYPASS BOX	0215280952
KITDE0108	BOX KITDE0108 BYPASS KIT LUEBECK	0214894171
KIT1095V	BOX KIT1095V KIT OBESITAS	0214062622
KITDE0154	BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST	0214013887
KITDE0154	BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST	0214144177
KITDE0154	BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST	0214260194
KITDE0154	BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST	0214470767
KITDE0154	BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST	0214620382
KITDE0154	BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST	0214744957
KITDE0154	BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST	0214956044
KITDE0154	BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST	0215079103
KITDE0154	BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST	0215151206
KIT1171C	BOX KIT1171C KIT LAP CYSTECTOMY	0214090852
KIT1171C	BOX KIT1171C KIT LAP CYSTECTOMY	0214522213
KIT1171C	BOX KIT1171C KIT LAP CYSTECTOMY	0215009132
KIT1171C	BOX KIT1171C KIT LAP CYSTECTOMY	0215153445
PST01199	BOX PST01199 BARIATRIC TRISTAPLE	0214109631
PST01199	BOX PST01199 BARIATRIC TRISTAPLE	0214909770
VATS1SCDX	BOX VATS1SCDX DO ZABIEGOW VATS	0214874566
VATS1SCDX	BOX VATS1SCDX DO ZABIEGOW VATS	0215001737
VATS1SCDX	BOX VATS1SCDX DO ZABIEGOW VATS	0215151361
KIT00713	BOX KIT00713 KIT BY PASS	0215234651
KIT00713	BOX KIT00713 KIT BY PASS	0215288296
KIT00713	BOX KIT00713 KIT BY PASS	0214364763
KIT00713	BOX KIT00713 KIT BY PASS	0214456590
KIT00713	BOX KIT00713 KIT BY PASS	0214435328
KIT00713	BOX KIT00713 KIT BY PASS	0214983139
KIT00713	BOX KIT00713 KIT BY PASS	0215042012
KIT00714	BOX KIT00714 KIT SLEEVE	0215159225
KIT00714	BOX KIT00714 KIT SLEEVE	0215234652
KIT00714	BOX KIT00714 KIT SLEEVE	0214915642


Numer katalogowy	Opis zestawu	Partie, których dotyczy problem
KIT00714	BOX KIT00714 KIT SLEEVE	0214983138
TGGLOGOWX1	BOX TGGLOGOWX1 DO TOTAL GASTRECTOMIII	0214726876
BOX1073180APPE1	BOX BOX1073180APPE1 APPENDIX KIT ZAMS	0214050554
BOX1073180APPE1	BOX BOX1073180APPE1 APPENDIX KIT ZAMS	0214907029
BOX1073180APPE1	BOX BOX1073180APPE1 APPENDIX KIT ZAMS	0214991119
BOX1073180APPE1	BOX BOX1073180APPE1 APPENDIX KIT ZAMS	0215130754
BOX1073180APPE1	BOX BOX1073180APPE1 APPENDIX KIT ZAMS	0215158268
SLEEVEJAWI	BOX SLEEVEJAWI SLEEVE GASTRECTOMY BOX	0214030210
SLEEVEJAWI	BOX SLEEVEJAWI SLEEVE GASTRECTOMY BOX	0215041719
SLEEVEJAWI	BOX SLEEVEJAWI SLEEVE GASTRECTOMY BOX	0215161529
SLEEVEJAWI	BOX SLEEVEJAWI SLEEVE GASTRECTOMY BOX	0215272924
VATSLOB11	BOX VATSLOB11 ZESTAW DO VATS LOBECTOMII	0214866335
VATSLOB11	BOX VATSLOB11 ZESTAW DO VATS LOBECTOMII	0214993030
VATSLOB11	BOX VATSLOB11 ZESTAW DO VATS LOBECTOMII	0215178525
LAPPH	BOX LAPPH ZASTAW DO PRAWEJ HEMIKOLEKTOMI	0215015272
LAPPH	BOX LAPPH ZASTAW DO PRAWEJ HEMIKOLEKTOMI	0215298205
LAPGAR	BOX LAPGAR ZESTAW DO GB35	0214049704
LAPGAR	BOX LAPGAR ZESTAW DO GB35	0214529057
LAPGAR	BOX LAPGAR ZESTAW DO GB35	0215176564
LAPZD	BOX LAPZD ZESTAW DO SG	0215082707
LAPZD	BOX LAPZD ZESTAW DO SG	0215176563
BOX1073076GASB0	BOX BOX1073076GASB0 BBR STVEIT GASTRIC B	0214043771
BOX1073076GASB0	BOX BOX1073076GASB0 BBR STVEIT GASTRIC B	0214232317
BOX1073076GASB0	BOX BOX1073076GASB0 BBR STVEIT GASTRIC B	0214375093
BOX1073076GASB0	BOX BOX1073076GASB0 BBR STVEIT GASTRIC B	0215113531
BOX1073076GASB0	BOX BOX1073076GASB0 BBR STVEIT GASTRIC B	0215132607
KITDE0183	BOX KITDE0183 APPENDIX LIPPE DETMOLD	0214014173
KITDE0183	BOX KITDE0183 APPENDIX LIPPE DETMOLD	0214573291
KITDE0183	BOX KITDE0183 APPENDIX LIPPE DETMOLD	0214621781
KITDE0183	BOX KITDE0183 APPENDIX LIPPE DETMOLD	0214909631
KITDE0183	BOX KITDE0183 APPENDIX LIPPE DETMOLD	0215068744
KITDE0183	BOX KITDE0183 APPENDIX LIPPE DETMOLD	0215068743
KITDE0183	BOX KITDE0183 APPENDIX LIPPE DETMOLD	0215068743
KITDE0183	BOX KITDE0183 APPENDIX LIPPE DETMOLD	0215108743
KITDE0183	BOX KITDE0183 APPENDIX LIPPE DETMOLD	0215108744
KITDE0183	BOX KITDE0183 APPENDIX LIPPE DETMOLD	0215276369
LAPIMBGP1	BOX LAPIMBGP1 ZESTAW DO MGBP	0214793818

Numer katalogowy	Opis zestawu	Partie, których dotyczy problem
LAPIMBGP1	BOX LAPIMBGP1 ZESTAW DO MGBP	0214930629
LAPIMBGP1	BOX LAPIMBGP1 ZESTAW DO MGBP	0214993038
LAPIMBGP1	BOX LAPIMBGP1 ZESTAW DO MGBP	0215068848
LAPIMBGP1	BOX LAPIMBGP1 ZESTAW DO MGBP	0215124286
LAPIMBGP1	BOX LAPIMBGP1 ZESTAW DO MGBP	0215124285
LAPIMBGP1	BOX LAPIMBGP1 ZESTAW DO MGBP	0215130759
LAPIMBGP1	BOX LAPIMBGP1 ZESTAW DO MGBP	0215243237
LAPISG1	BOX LAPISG1 ZESTAW DO SG	0214793817
LAPISG1	BOX LAPISG1 ZESTAW DO SG	0214930628
LAPISG1	BOX LAPISG1 ZESTAW DO SG	0214930630
LAPISG1	BOX LAPISG1 ZESTAW DO SG	0214993037
LAPISG1	BOX LAPISG1 ZESTAW DO SG	0215068849
LAPISG1	BOX LAPISG1 ZESTAW DO SG	0215124284
LAPISG1	BOX LAPISG1 ZESTAW DO SG	0215243236
PST03403	BOX PST03403 ALTERNATIVE APPENDIX KIT	0214975597
SLEEVEGK4	BOX SLEEVEGK4 SLEEVE GASTRECTOMY	0214933111
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0214860061
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215036238
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215036240
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215018854
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215018855
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215036239
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215102248
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215068746
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215050428
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215102247
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215102246
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215050429
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215068748
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215068747
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215050427
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215117409
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215117410
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215117411
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215125963
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215125962
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215125964

Numer katalogowy	Opis zestawu	Partie, których dotyczy problem
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215275313
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215275314
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215275315
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215282505
PST03533	BOX PST03533 KIT APP STAPLER	0215282506
PST03699	BOX PST03699 KIT APP MED ALTERNATIV STAP	0215050309
PST03699	BOX PST03699 KIT APP MED ALTERNATIV STAP	0215108007
PST03699	BOX PST03699 KIT APP MED ALTERNATIV STAP	0215050308
PST03699	BOX PST03699 KIT APP MED ALTERNATIV STAP	0215050310
PST03699	BOX PST03699 KIT APP MED ALTERNATIV STAP	0215108008
PST03699	BOX PST03699 KIT APP MED ALTERNATIV STAP	0215050313
PST03699	BOX PST03699 KIT APP MED ALTERNATIV STAP	0215050312
PST03699	BOX PST03699 KIT APP MED ALTERNATIV STAP	0215050311
PST03699	BOX PST03699 KIT APP MED ALTERNATIV STAP	0215037144
PST03699	BOX PST03699 KIT APP MED ALTERNATIV STAP	0215037143
PST03627	BOX PST03627 BYPASS AIWA CLINIC	0214701832
PST03627	BOX PST03627 BYPASS AIWA CLINIC	0214999435
PST03627	BOX PST03627 BYPASS AIWA CLINIC	0214999435
LAPISGW	BOX LAPISGW ZESTAW DO SG	0215120700
SGGLOGX1	BOX SGGLOGX1 ZESTAW DO BARIATRII	0215017846
SGGLOGX1	BOX SGGLOGX1 ZESTAW DO BARIATRII	0215191012
HEMIGX1	BOX HEMIGX1 ZESTAW DO HEMICOLECTOMII	0214909888
HEMIGX1	BOX HEMIGX1 ZESTAW DO HEMICOLECTOMII	0214916144
MGBGLOGX1	BOX MGBGLOGX1 ZESTAW MINI GASTRIC BYPASS	0215124172
MGBGLOGX1	BOX MGBGLOGX1 ZESTAW MINI GASTRIC BYPASS	0215253056
SGSWP1	BOX SGSWP1 ZESTAW DO RESEKCJI REKAWOWEJ	0215218687
PST04090	BOX PST04090 BYPASS AIWA CLINIC	0215282382
PST04090	BOX PST04090 BYPASS AIWA CLINIC	0215237527
PST04090	BOX PST04090 BYPASS AIWA CLINIC	0214991347
PST04090	BOX PST04090 BYPASS AIWA CLINIC	0214991348
PST04090	BOX PST04090 BYPASS AIWA CLINIC	0214991349
PST04089	BOX PST04089 SLEEVE AIWA CLINIC	0215237526
PST04089	BOX PST04089 SLEEVE AIWA CLINIC	0214991350
PST04089	BOX PST04089 SLEEVE AIWA CLINIC	0214991351
PST04089	BOX PST04089 SLEEVE AIWA CLINIC	0215157997
PST04089	BOX PST04089 SLEEVE AIWA CLINIC	0215157998
VMIN	BOX VMIN ZESTAW DO VATS PODSTAWOWY	0215122341

Numer katalogowy	Opis zestawu	Partie, których dotyczy problem
VMIN	BOX VMIN ZESTAW DO VATS PODSTAWOWY	0215226207
VWR	BOX VWR ZESTAW DO VATS KLIN	0215122344
BOX1073076GASB1	BOX BOX1073076GASB1 BBR GASTRIC BYPASS S	0215227169
KIT00486R	KIT00486R OBESIDAD D. WORWARLD 2 X1	0213984473
KIT00486R	KIT00486R OBESIDAD D. WORWARLD 2 X1	0213583578
KIT00486R	KIT00486R OBESIDAD D. WORWARLD 2 X1	0214068986
KIT00486R	KIT00486R OBESIDAD D. WORWARLD 2 X1	0213596057
KIT00486R	KIT00486R OBESIDAD D. WORWARLD 2 X1	0213589227
KIT4184	KIT4184 APEN LOBECTOMY KIT X1	0214962218
KITBAR021	KITBAR021- BARIATRIC KIT X1	0215065486
KIT-DE-0080	KIT-DE-0080 BYPASS KIT LOHNE X1	0214049646
KIT-DE-0080	KIT-DE-0080 BYPASS KIT LOHNE X1	0214370002
KIT-DE-0080	KIT-DE-0080 BYPASS KIT LOHNE X1	0214470664
KIT-DE-0080	KIT-DE-0080 BYPASS KIT LOHNE X1	0215208426
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0214618312
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0214795633
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0214798114
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0215002022
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0215010930
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0215010931
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0215010932
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0215132611
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0215132612
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0215132613
KIT-DE-0083	KIT-DE-0083 APPENEKTOMIE KIT NAUENX1	0215264173
LAPBARLECZNA	LAPBARLECZNA ZESTAW BARIATRYCZNY LECZNA.	0215274505
SLEEVEGK1	SLEEVEGK1 ZESTAW DO ZABIEGOW SLEEVE X1	0215244887
SSLEEVE	SSLEEVE ZEST DO SLEEVE GASTREKTOMIIX1	0214985253
SSLEEVE	SSLEEVE ZEST DO SLEEVE GASTREKTOMIIX1	0215104506
SSLEEVE	SSLEEVE ZEST DO SLEEVE GASTREKTOMIIX1	0215298203
MGBX	MGBX ZESTAW GB LS X1	0215017845
MGBX	MGBX ZESTAW GB LS X1	0215002541
MGBX	MGBX ZESTAW GB LS X1	0215104507

Załącznik C

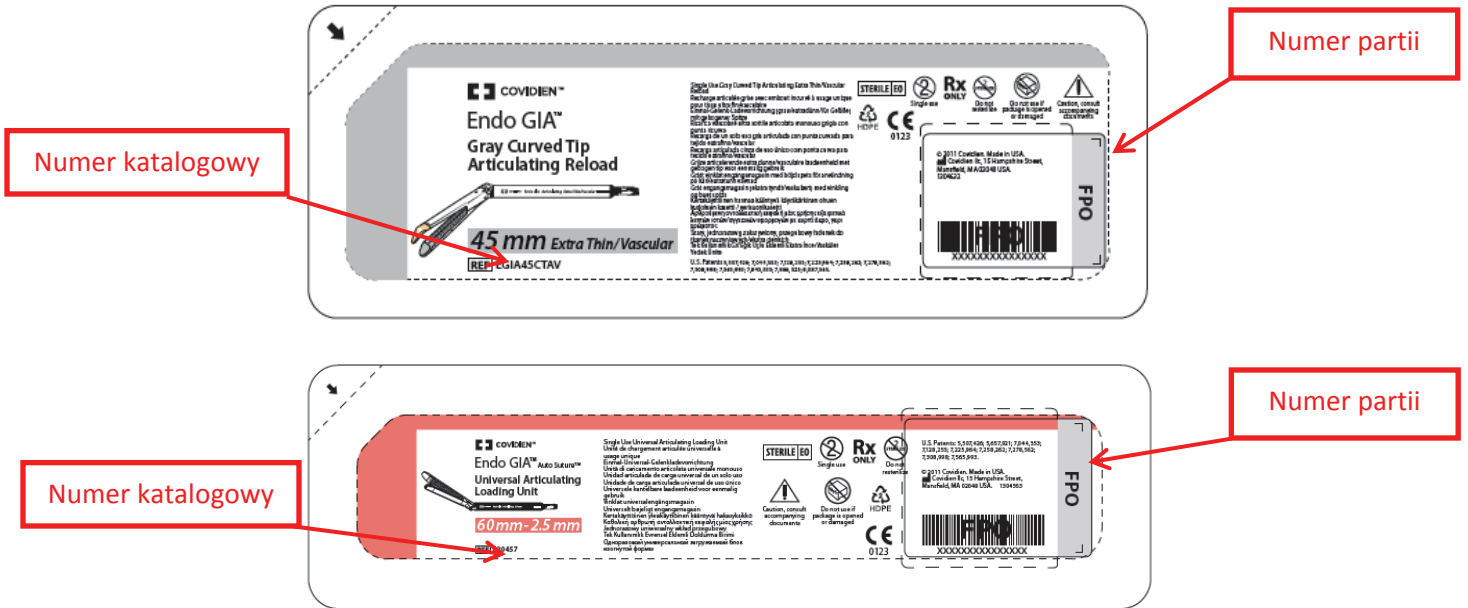

Medtronic
BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST

2020-05-02
REF | KITDE0154
LOT | 0214470767

Medtronic
KUNDENSPEZIFISCHE BEHANDLUNGSEINHEIT

REF | KITDE0154

Name des Kits

Anzahl	REF
1	EGIAUSTND
2	030455
2	030458
1	030432
2	030457

BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST

Bezeichnung
EGIAUSTND ENDOGIA ULTRA UNIV STD STAPLER
030455 ENDO GIA UNI ROT 45 3.5 DLLJ
030458 ENDO GIA FCOR 60 3.5MM
030432 ENDO GIA FCOR JU 3.5MM
030457 ENDO GIA FCOR 60 2.5MM

CE	CE
CE9123	Covidien Itc
CE9123	Covidien Itc
CE9123	Covidien Itc
CE9123	Covidien Itc

2018-05-02
WY19M ED
2020-05-02
WY19M ED
LOT | 0214470767

FW NUMBER:
M966602A-007 (Rev. A)
German - large
FILE NAME:
M966602A007A.PDF
Variable data file
M964671A.001

PIN No. KITDE0154

Medtronic
BOX KITDE0154 BYPASS KH NORDWEST

2020-05-02
REF | KITDE0154
LOT | 0214470767

Numer katalogowy

Covidien AG, Victor von Brunnsstrasse 19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland



SH96602A-007
SHELF BOX LABEL

Numer partii

FOR YOUR RECORDS LABELS

REF KITDE0154	LOT 0214470767
REF KITDE0154	LOT 0214470767
REF KITDE0154	LOT 0214470767
REF KITDE0154	LOT 0214470767

UNIVERSAL LABELSET COVIDIEN CPN M966699A001 Rev: C

Pilna notatka dotycząca bezpieczeństwa
Przegubowe ładunki wprowadzające Covidien Endo GIA™

Formularz weryfikacyjny

Prosimy o wypełnienie formularza w całości

14 maja 2018 r.

Dane kontaktowe klienta:	Dane kontaktowe firmy Medtronic
Nazwa szpitala: Numer konta klienta:	Do: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Adres placówki: Oddział: Ulica: Miasto: Kod pocztowy: Osoba do kontaktu:	Adres: Ul. Polna 11 00-633 Warszawa
Nr telefonu:	Nr telefonu: lokalny przedstawiciel handlowy firmy Medtronic
Nr faksu:	Fax: +48 22 46 56 952
E-mail:	E-mail: rs.regulatorypoland@medtronic.com

Prosimy o wyszczególnienie poniżej liczny wyrobów objętych niniejszą akcją, które posiadają Państwo na stanie. Jeśli nie posiadają Państwo produktów, proszę zaznaczyć poniżej:

Brak na stanie (proszę zaznaczyć):

Numer katalogowy	Faktura lub WZ (jeśli dostępna)	Numer partii	Ilość (sztuki lub pełne opakowania); proszę wskazać

Prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza do firmy Medtronic nawet jeśli nie posiadają Państwo produktów objętych wycofaniem.

Informacje dla kuriera:

Liczba paczek do odbioru: _____

Waga: < 45kg > 45kg

Podpis klienta stanowi potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z Pilną Notatką Dotyczącą Bezpieczeństwa dotyczącą wyrobu medycznego „Przegubowe ładunki wprowadzające Covidien Endo GIA™ z maja 2018 r.

<u>Dane klienta: (prosimy wypełnić drukowanymi literami)</u>	<u>Podpis:</u>	<u>Data:</u>

- Prosimy o zwrot niniejszego formularza do firmy Medtronic Poland za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w ciągu 10 dni (numer faksu lub adres e-mail podane są w pierwszej części formularza)
- Przedstawiciel działu Obsługi Klienta skontaktuje się z Państwem w celu odebrania produktów objętych wycofaniem; za zwrócone produkty otrzymają Państwo korektę do faktury
- Prosimy o nieodsyłanie produktów przed otrzymaniem dokumentacji dotyczącej zwrotu;
- **Niniejsze działania podejmowane są za wiedzą Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.**