

-PILNE-

Life-Point AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) Temat Wymiany Elektrod

Drodzy użytkownicy Life-Point;

Wykryto, że w niektórych elektrodach marki MEDEKS, dostarczanych do produkowanych przez nas modeli Life-Point AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), z upływem czasu następuje deformacja.

Celem tego powiadomienia, jest dostarczenie informacji dotyczących poniższych zagadnień.

- Przedstawienie problemu oraz możliwych warunków, w których może wystąpić
- Z perspektywy pacjenta oraz użytkownika, w celu uniknięcia ryzyka wymaganych do podjęcia przez użytkownika czynności
- Planowane przez firmę METsis Medikal Ltd. oraz lokalnych dystrybutorów działania mające na celu usunięcie problemu

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu wraz z wszystkimi pracownikami, którzy zobowiązani są do posiadania tych informacji. Właściwe zrozumienie zagadnień zawartych w tym dokumencie jest bardzo ważne dla użytkownika i pacjenta.

Prosimy o zachowanie kopii tego dokumentu wraz z instrukcją użytkowania.

Firma METsis Medikal Ltd. rozpoczęła prace w celu rozwiązania przewidywanego problemu, dzięki którym elektrody jednorazowego użytku marki MEDEKS zostaną bezpłatnie wymienione na nowe. Prosimy Państwa o jak najszybsze wymienienie wspomnianego produktu poprzez kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Dziękujemy za wsparcie i wyrozumiałość okazane w trakcie przeprowadzonej procedury. Jeśli potrzebne będą Państwu związane z tematem dodatkowe informacje lub wsparcie prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy METsis Medikal Ltd.

Z wyrazami szacunku,

Firma METsis Medikal Ltd.

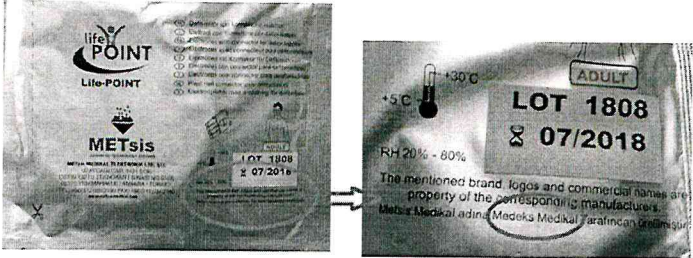
Dyrektor Generalny

Zeki KUTLU



METsis
ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS

METsis Medikal Teknik Sistemler Elektronik Oto. İnş. Tur. ve San. Tic. Ltd. Şti.
MERKEZ / HEAD OFFICE : Yeni Batı Mahallesi 2402.Cadde No:2 06370 Yenimahalle / Ankara - TURKEY
Tel : +90 (312) 3862190 Fax : +90 (312) 3862180
e-mail : info@metsismedikal.com web: www.metsismedikal.com

<p>1. DOTYCZY PRODUKTU</p>	<p>Marka MEDEKS</p> 
<p>2. DOTYCZY OKRESU</p>	<p>Dotyczy wszystkich elektrod jednorazowych marki MEDEKS</p>
<p>3. WYJAŚNIENIE</p>	<p>Produkty będące podmiotem tego powiadomienia, nie należące do naszej firmy elektrody jednorazowe marki MEDEKS.</p>
<p>4. OPIS PROBLEMU</p>	<p>Wykryto, że dostarczane wraz z urządzeniem automatycznego defibrylatora marki Life-Point, elektrody jednorazowe marki MEDEKS wraz z upływem czasu i przed upłynięciem daty ważności ulegają deformacji chemicznej.</p>
<p>5. WYMIANA ELEKTROD UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA, KTÓRE MUSI ZOSTAĆ PRZEPROWADZONE PRZEZ NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW</p>	<p>Drodzy użytkownicy;</p> <p>Pomimo tego, że nasz firma nie jest producentem wyżej wymienionych elektrod, w związku z tym, że dostarczane są one wraz z urządzeniem defibrylatora marki Life-Point, reputacja naszej marki oraz zaufanie do niej zostają naruszone.</p> <p>Od dnia 18.05.2015 roku zakończone zostało używanie elektrod marki MEDEKS dla naszych produktów.</p> <p>Od wyżej wymienionej daty rozpoczęliśmy współpracę z innym producentem i na podstawie bio -zgodności oraz raportów z przeprowadzonych testów w pełni mu zaufaliśmy.</p>



METsis
ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS

METsis Medikal Teknik Sistemler Elektronik Oto. İnş. Tur. ve San. Tic. Ltd. Şti.
MERKEZ / HEAD OFFICE : Yeni Batı Mahallesi 2402.Cadde No:2 06370 Yenimahalle / Ankara - TURKEY
Tel : +90 (312) 3862190 Fax : +90 (312) 3862180
e-mail : info@metsismedikal.com web: www.metsismedikal.com


	<p>Jeżeli posiadacie Państwo elektrody jednorazowe marki MEDEKS, prosimy o nawiązanie kontaktu z lokalnym dystrybutorem w celu bezpłatnej wymiany elektrod na nowe innego producenta.</p> <p>Prosimy o zwrot elektrod firmy MEDEKS do lokalnego dystrybutora w trakcie wymiany.</p> <p>W przypadku wymiany elektrod w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji oraz pomocy prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy METsis Medikal Ltd. albo o kontakt pod numerem telefonu +90 312 386 21 90 albo o kontakt droga mailową na adres service@metsismedikal.com.</p> <p>Zostanie Państwu zapewniona bezpłatna pomoc w jak najkrótszym czasie.</p>
<p>METsis oświadcza, że wraz z wymianą elektrod opisany problem nie będzie występował, i dziękuje wam drodzy użytkownicy za wyrozumiałość.</p>	

Z wyrazami szacunku

Firma METsis Medikal Ltd.

Dyrektor Generalny

Zeki KUTLU

 **METsis**
METsis Medikal Teknik Sistemler
Elekt. Oto. İnş. Tur. ve San. Tic. Ltd. Şti.
Yeni Batı Mah. 2402 Cad. No:2
Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0312) 386 21 90 Fax: (0312) 386 21 80
Osım Vergi Dairesi: 020 030 14 31