

Miele Werk Bürmoos GmbH · Miele-Straße 1 · A-5111 Bürmoos

Adres

Ihre Zeichen/Nachricht vom

Unsere Zeichen
BM/ATSEV

Durchwahl Tel. 06274/6344-
89401

Fax 06274/6344-
89120

Datum
2016-06-20

Ważna wskazówka bezpieczeństwa dla wielkokomorowych myjni dezynfektorów Miele PG 8821, PG 8822, PG8825, PG8830, PG 8922 i PG8930: Działania korekcyjne - system kontroli ruchu ramion spryskujących - ograniczona ruchliwość pojedynczych ramion spryskujących

Szanowni Państwo,

w ramach naszej odpowiedzialności oraz wysokich wymagań bezpieczeństwa wobec naszych urządzeń chcielibyśmy prosić o zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie regularnych kontroli funkcyjnych urządzeń dezynfekujących.

Firma Miele stwierdziła, że w pojedynczych przypadkach, w szczególnych okolicznościach, może dojść do wystąpienia usterki systemu napędowego rurek dysz. W efekcie jedna lub kilka rurek spryskujących nie może się prawidłowo obracać. W efekcie może to doprowadzić do ograniczenia wydajności czyszczenia a przy dezynfekcji chemotermicznej zachodzi niewielkie ryzyko ograniczenia dezynfekcji ładunku (niskie ryzyko).

Aby być pewnym, że Państwa myjnia dezynfektor pracuje niezawodnie, należy regularnie, przynajmniej raz dziennie, kontrolować wzrokowo i ręcznie ustawienie rurek spryskujących w myjni dezynfektorze. Wszystkie dysze muszą być skierowane w tę samą stronę (za wyjątkiem pary dysz przy drzwiach). Proszę sprawdzić ręcznie

możliwość obrotu każdej rurki - jeśli pojedyncze rurki dają się obrócić ręcznie, prawdopodobnie nie jest zapewnione prawidłowe połączenie całego systemu i nie można wykluczyć usterki. Jeśli w toku powyższej kontroli stwierdzą Państwo występowanie nieprawidłowości, proszę natychmiast zwrócić się do serwisu Miele.

Aby niezawodnie zidentyfikować usterkę systemu spryskującego, podwyższając w ten sposób bezpieczeństwo, firma Miele opracowała system kontroli ramion spryskujących. W ciągu następnych kilku tygodni skontaktuje się z Państwem pracownik serwisu Miele w celu ustalenia terminu na wyposażenie urządzenia/urządzeń w system kontrolny. Dzięki temu ograniczona ruchliwość ramion spryskujących zostanie natychmiast rozpoznana i zasygnalizowana przez urządzenie.

Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji, proszę ewentualnie przekazać to pismo do odpowiedniego oddziału.

O podjętych działaniach zostały poinformowane odpowiednie instytucje.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności związane z tą sprawą. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami lub ze swoim partnerem serwisowym. W każdym przypadku prosimy o wypełnienie i odesłanie do nas załączonej ankiety w terminie do 05.08.2016.

Z poważaniem

Miele Werk Bürmoos GmbH

Manfred Neuhauser
Werkleitung

Andreas Kühner
Qualitätsmanagement

Tel.: +43 6274 6344 89424
Mobil: +43 664 81 98 683
Fax: +43 6274 6344 89120

Strona 2 z 3

Miele Werk Bürmoos GmbH
Managementsystem
Miele-Straße 1
13485,
A-5111 Bürmoos
Telefon +43 (0)6274/6344-0
Telefax +43 (0)6274/6344-89120

Bank: UniCredit Bank Austria AG
Konto-Nr.: 52962 016 101, BLZ: 12000
DVR: 0004081
FN 322459 f, Landesgericht Salzburg
UID-Nr.: ATU64917326
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT42 1200 0529 6201 6101

E-Mail: buermoos@miele.at
Internet: <http://www.miele-buermoos.at>

Zertifiziertes
nach ISO 9001, ISO
ISO 14001 & SA 8000

Ankieta

Email: buermoos@miele.at

Fax: 0043 6274 6344 89120

Miele Werk Bürmoos GmbH

Miele – Straße 1

5111 Bürmoos

Austria

Szanowni Państwo,

niniejszym potwierdzam otrzymanie pisma z informacją „**Działania korekcyjne - system kontroli ruchu ramion spryskujących - ograniczona ruchliwość pojedynczych ramion spryskujących**“. Informacje te zostaną przekazane dalej do odpowiednich osób.

Data:

Imię i nazwisko:

Szpital:

Oddział:

Ulica:

Kod pocztowy:

Typ/Nr ser.:

Dezynfekcja:

☐

chemotermiczna

☐

termiczna

Strona 3 z 3

Miele Werk Bürmoos GmbH
Managementsystem
Miele-Straße 1
13485,
A-5111 Bürmoos
Telefon +43 (0)6274/6344-0
Telefax +43 (0)6274/6344-89120

Bank: UniCredit Bank Austria AG
Konto-Nr.: 52962 016 101, BLZ: 12000
DVR: 0004081
FN 322459 f, Landesgericht Salzburg
UID-Nr.: ATU64917326
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT42 1200 0529 6201 6101

E-Mail: buermoos@miele.at
Internet: <http://www.miele-buermoos.at>

Zertifiziertes
nach ISO 9001, ISO
ISO 14001 & SA 8000