

Adres

Ihre Zeichen/Nachricht vom

Unsere Zeichen
BM/ATOEH

Durchwahl Tel. 06274/6344-
89424

Fax 06274/6344-
89120

Datum
2016-01-20

Ważne wskazówki dotyczące Wielkokomorowej instalacji do mycia i dezynfekcji PG 8822, PG8825, PG8830: Kontrola wielkokomorowej instalacji do mycia i dezynfekcji – możliwe ograniczenia w obszarze obracania się pojedynczych ramion natryskujących,

Szanowni Państwo,

w ramach naszej odpowiedzialności i naszych wysokich wymogów bezpieczeństwa w stosunku do urządzeń, chcemy zwrócić się do Państwa, aby wskazać znaczenie regularnych kontroli sprawności myjni - dezynfektorów medycznych.

W niewielu pojedynczych przypadkach / w niekorzystnych warunkach / zaobserwowano, że może dojść do przerwania w systemie napędowym rur natryskowych (rur z dyszami). Konsekwencją tego może być to, że jedna, czy kilka rur z dyszami nie będą właściwie się obracać. W wielkokomorowej instalacji z procesem chemiczno-termicznym może ten stan prowadzić do ograniczonej dezynfekcji załadunku (małe ryzyko).

Aby upewnić się, że Państwa urządzenie pracuje sprawnie, powinniście Państwo regularnie, przynajmniej raz dziennie, przeprowadzać kontrolę wizualną ustawienia rur natryskowych w wielkokomorowej instalacji do mycia i dezynfekcji. Wszystkie dysze muszą być skierowane w tą samą stronę (oprócz par dyszy na drzwiach). Proszę sprawdzić manualnie ruch obrotowy każdej rury dyszy – w przypadku gdy, można

ręcznie przekręcić pojedyncze rurki, prawdopodobnie brak jest połączenia z systemem i awaria nie jest wykluczona.

W następnych tygodniach skontaktuje się z Państwem pracownik Serwisu Miele.

W przypadku, gdy spotkacie się Państwo z nieprawidłowościami, podczas prowadzonych, wyżej wymienionych kontroli, prosimy skontaktować się niezwłocznie z Serwisem Miele.

W przypadku, gdy jesteście Państwo niewłaściwym adresatem niniejszego pisma, prosimy przekazać je do właściwego działu.

Odpowiedzialne urzędy zostały poinformowane o podjętych krokach.

W przypadku pytań prosimy zwracać się do nas lub do swojego partnera serwisowego. Prosimy o odesłanie załączonego formularza w każdym przypadku do nas do 22.02.2016.

Z poważaniem

Miele Werk Bürmoos GmbH

Manfred Neuhauser
Werkleitung

Andreas Kühner
Qualitätsmanagement

Tel.: +43 (0)6274 6344 89424

Mobil: +43 (0)664 81 98 683

Fax: +43 (0)6274 6344 89120

Seite 2 von 3

Miele Werk Bürmoos GmbH
Managementsystem
Miele-Straße 1
13485,
A-5111 Bürmoos
Telefon +43 (0)6274/6344-0
Telefax +43 (0)6274/6344-89120

Bank: UniCredit Bank Austria AG
Konto-Nr.: 52962 016 101, BLZ: 12000
DVR: 0004081
FN 322459 f, Landesgericht Salzburg
UID-Nr.: ATU64917326
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT42 1200 0529 6201 6101

E-Mail: buermoos@miele.at
Internet: <http://www.miele-buermoos.at>

Zertifiziertes
nach ISO 9001, ISO
ISO 14001 & SA 8000

FORMULARZ

Email: buermoos@miele.at

Fax: 0043 6274 6344 89120

Miele Werk Bürmoos GmbH

Miele – Straße 1

5111 Bürmoos

Austria

Szanowni Państwo,

niniejszym potwierdzam otrzymanie Państwa pisma „**Kontrola wielkokomorowej instalacji do mycia i dezynfekcji - możliwe ograniczenia w obszarze obracania się pojedynczych ramion natryskujących**“. Wszystkie informacje przekazemy właściwym osobom.

Data: _____

Nazwisko: _____

Szpital: _____

Dział: _____

Ulica: _____

Kod pocztowy: _____

Seite 3 von 3

Miele Werk Bürmoos GmbH
Managementsystem
Miele-Straße 1
13485,
A-5111 Bürmoos
Telefon +43 (0)6274/6344-0
Telefax +43 (0)6274/6344-89120

Bank: UniCredit Bank Austria AG
Konto-Nr.: 52962 016 101, BLZ: 12000
DVR: 0004081
FN 322459 f, Landesgericht Salzburg
UID-Nr.: ATU64917326
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT42 1200 0529 6201 6101

E-Mail: buermoos@miele.at
Internet: <http://www.miele-buermoos.at>

Zertifiziertes
nach ISO 9001, ISO
ISO 14001 & SA 8000