
Ważna informacja bezpieczeństwa

Obowiązkowa aktualizacja oprogramowania do Pentacam® AXL

Natychmiastowe działanie jest obowiązkowe

15. listopada 2017 r

Adres klienta

.....

List ten jest skierowany do wszystkich użytkowników, operatorów i dystrybutorów oprogramowania Pentacam® AXL

Drodzy klienci,

Dziękujemy za korzystanie z oprogramowania Pentacam® AXL. Bezpieczeństwo, jakość i wasze zadowolenie są dla nas najwyższym priorytetem.

Aby zapewnić niezawodne użytkowanie Pentacam® AXL, które spełnia Wasze i nasze oczekiwania, a także bezpieczeństwo pacjentów, firma OCULUS Optikgeräte GmbH planuje obowiązkowe działania w zakresie bezpieczeństwa.

Ten list informuje o obowiązkowej aktualizacji oprogramowania Pentacam® AXL.


Wersje oprogramowania Pentacam® AXL 1.21r01, 1.21r03, 1.21r11, 1.21r13 posiadają błędy programowe. Inne wersje oprogramowania są bez wad.

Wspomniane powyżej wersje oprogramowania Pentacam® AXL mają anomalię oprogramowania, która może skutkować błędnym kolorowym wyświetlaniem wartości specyfikacji jakości.

Instrukcja identyfikacji numeru wersji oprogramowania Pentacam® AXL znajduje się na następnych stronach.

Identyfikacja numeru wersji oprogramowania Pentacam® AXL

1. Uruchom oprogramowanie Pentacam® AXL
2. Wybierz pacjenta w panelu zarządzaniu danymi pacjenta
3. Kliknij przycisk "Pentacam", a oprogramowanie Pentacam® AXL uruchomi się automatycznie
4. Kliknij w górnym pasku narzędzi oprogramowania Pentacam® AXL przycisk "Ustawienia" („Settings”) i wybierz z rozwijanego przycisk menu "Zmiana ustawień" („ Miscellaneous Settings”)
5. Numer wersji oprogramowania Pentacam® AXL znajduje się w lewym dolnym rogu, patrz rysunek poniżej.

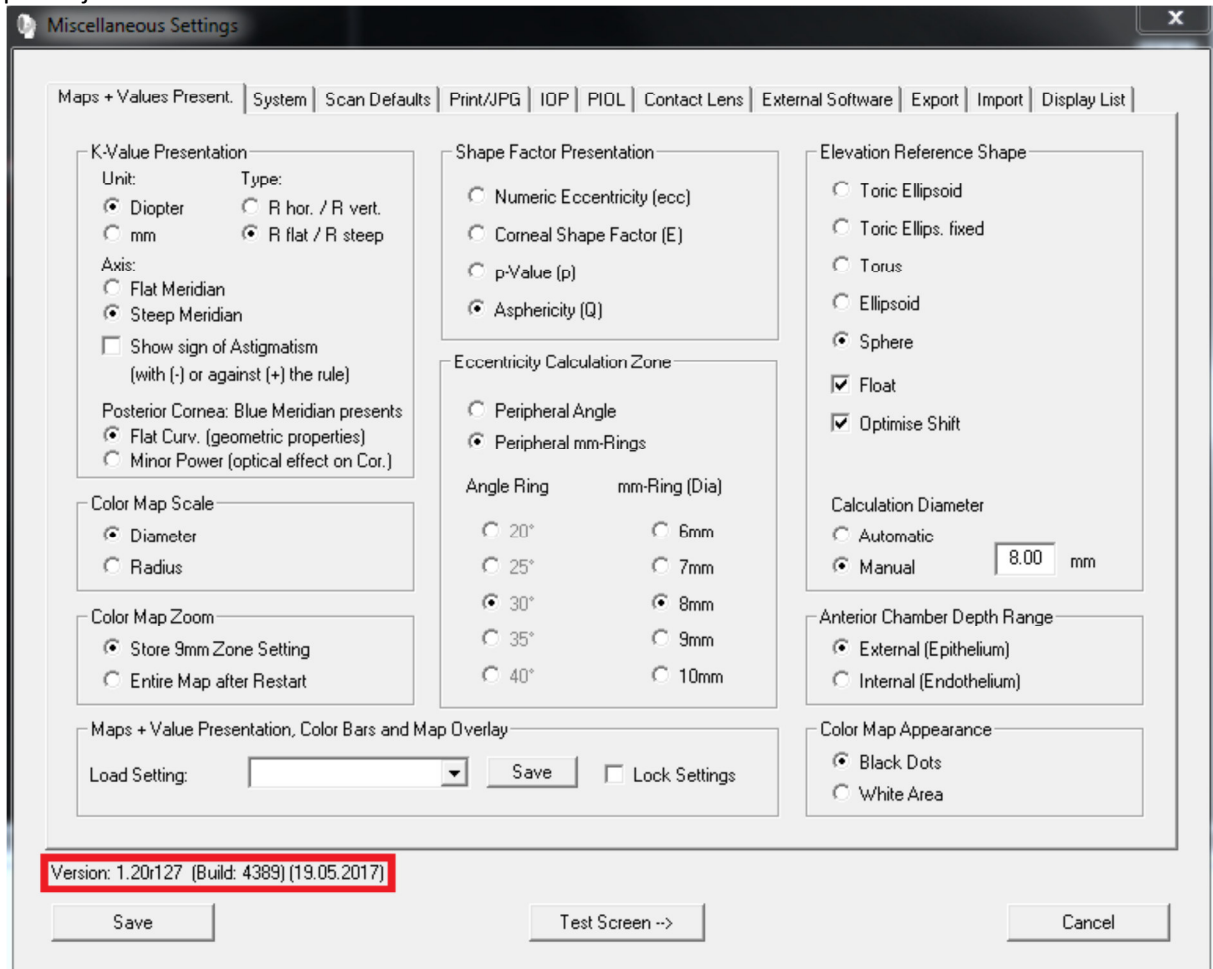

Wykonanie aktualizacji oprogramowania

Aby skorygować błąd oprogramowania, należy zaktualizować oprogramowanie Pentacam® AXL, do wersji 1.21r24

Załącznik do tego listu zawiera pamięć USB i instrukcję instalacji oprogramowania Pentacam® AXL. W przypadku problemów z przeprowadzeniem obowiązkowej aktualizacji oprogramowania, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Rozpowszechnianie opisanych informacji:

Upewnij się, czy wszyscy użytkownicy wyżej wymienionych produktów i wszystkie osoby odpowiedzialne mają szczegółową wiedzę na temat tych ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku dystrybucji tych produktów, przekaż kopię tych informacji odpowiednim osobom.

Proszę zabezpieczyć kopię tych informacji do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania.

Niemiecki urząd o nazwie "Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte" otrzymał już kopię tej ważnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa.

OCULUS Optikgeräte GmbH

Andreas Steinmüller

Specjalista ds. Raportowania urządzeń medycznych

Münchholzhäuser Str. 29

35582 Wetzlar

Tel .: 0641 2005405

E-mail: softwareupdateAXL@oculus.de

Podpis

Załączniki:

A : Obowiązkowe potwierdzenie aktualizacji oprogramowania Pentacam® AXL

B : Instrukcja aktualizacji oprogramowania Pentacam® AXL

Pamięć USB z aktualizacją oprogramowania wersja 1.21r24

Załącznik A: Obowiązkowe potwierdzenie aktualizacji oprogramowania Pentacam® AXL

Proszę zwrócić wypełniony formularz do:

OCULUS Optikgeräte GmbH

Andreas Steinmüller

Müncholzhäuser Str. 29

35582 Wetzlar

FAKS: 0641-2005-542

Email: softwareupdate@oculus.de

- Niniejszym potwierdzam otrzymanie ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i obowiązkowej aktualizacji oprogramowania Pentacam® AXL.
- Niniejszym potwierdzam, że przekazałem te informacje i obowiązkowe działania moim pracownikom i współpracownikom.
- Niniejszym potwierdzam, że obowiązkowa aktualizacja oprogramowania została zainstalowana we wszystkich miejscach pracy, w których działa oprogramowanie Pentacam® AXL lub że ta procedura została przeprowadzona przez autoryzowanego dystrybutora.

Numer seryjny Pentacam: _____

Podpis: _____

Imię: _____

Data: _____

Nazwa szpitala lub kliniki: _____


Adres: _____

Załącznik B: Instrukcja aktualizacji oprogramowania Pentacam® AXL


Aktualizacja oprogramowania Pentacam® AXL musi być wykonana na każdej stacji roboczej lub komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Pentacam® AXL.

Czynności:

1. Wyłącz głowicę pomiarową Pentacam® AXL
2. Zamknij oprogramowanie Pentacam® AXL i program zarządzania danymi pacjentów OCULUS
3. Upewnij się, że jesteś zalogowany jako administrator
4. Wyjmij pamięć USB z opakowania i podłącz ją do wolnego gniazda USB. Pojawi się następujący komunikat:

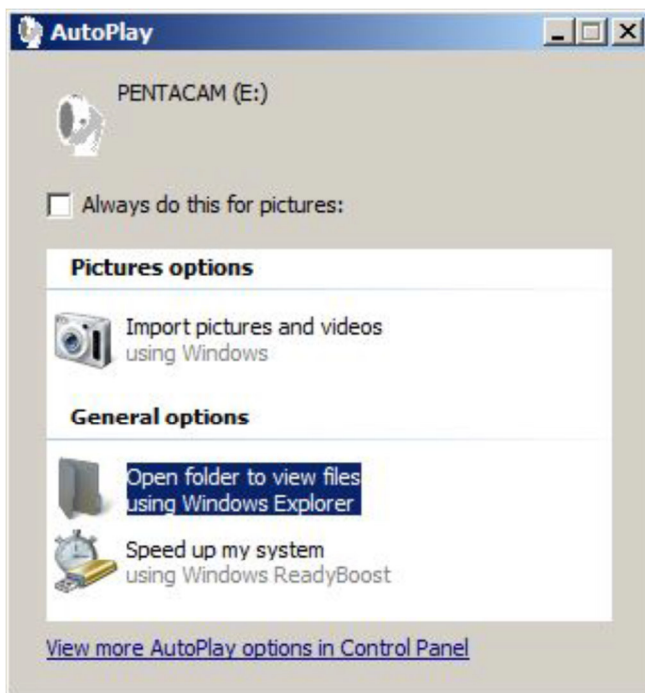


5. Kliknij "Otwórz folder, aby wyświetlić pliki przy użyciu Eksploratora Windows"
6. Kliknij dwukrotnie plik "Pentacam_1-21r24_Setup.exe", wtedy rozpocznie się proces instalacji oprogramowania
7. Wybierz odpowiedni język i kliknij przycisk "OK"

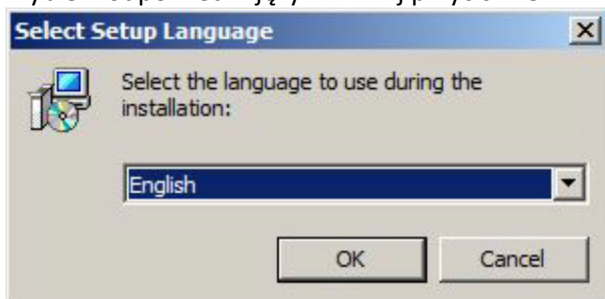


8. Kliknij przycisk "Dalej" („Next”)




9. Wybierz "Akceptuję umowę" („I accept the agreement”)i kliknij przycisk "Dalej" („Next”)

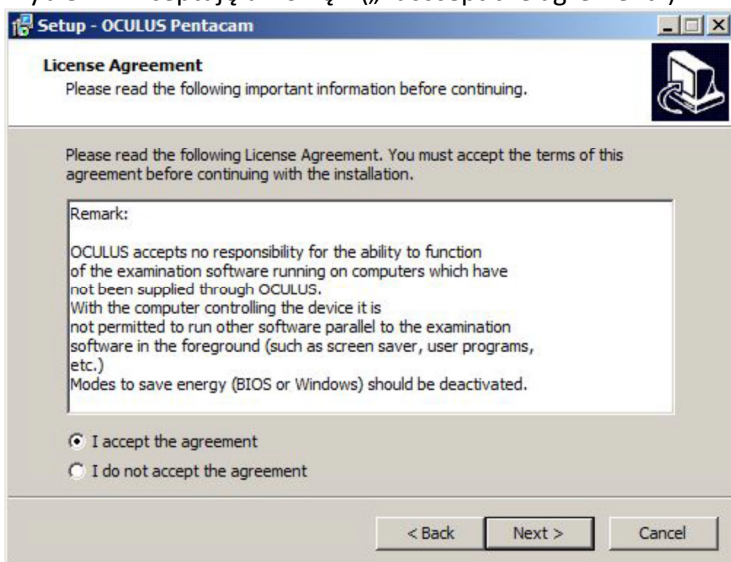


10. Wybierz "Pełna instalacja" („Full installation”)i kliknij przycisk "Dalej" („Next”)

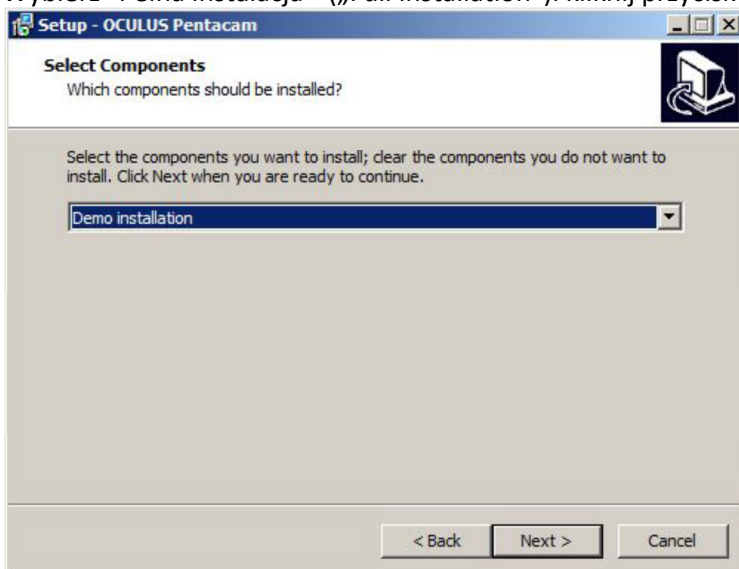


11. Kliknij przycisk "Dalej" („Next”)

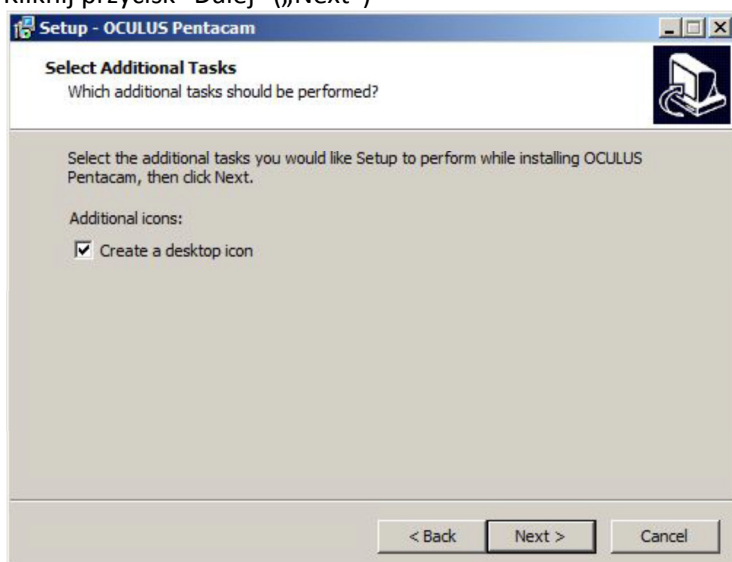

12. Kliknij przycisk "Zainstaluj" („Install”), oprogramowanie Pentacam® jest teraz zainstalowane na komputerze

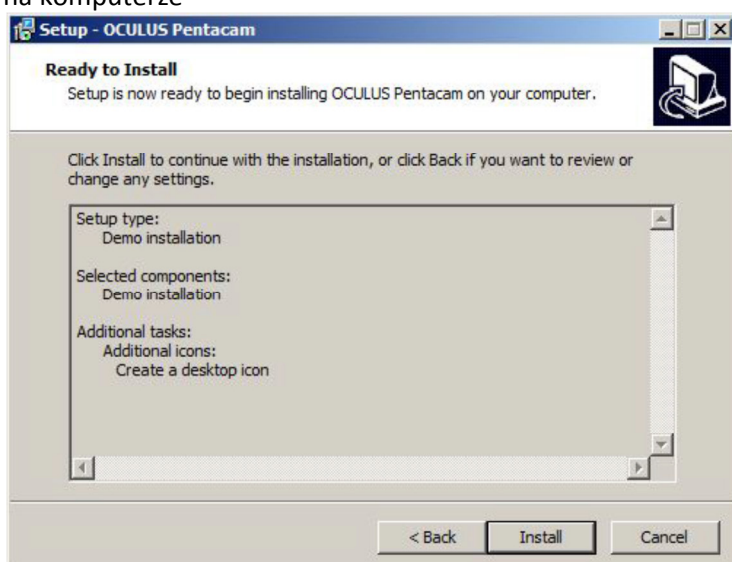


13. Jeśli do danego komputera podłączony jest klucz licencji sieciowej, pojawi się następujący komunikat:

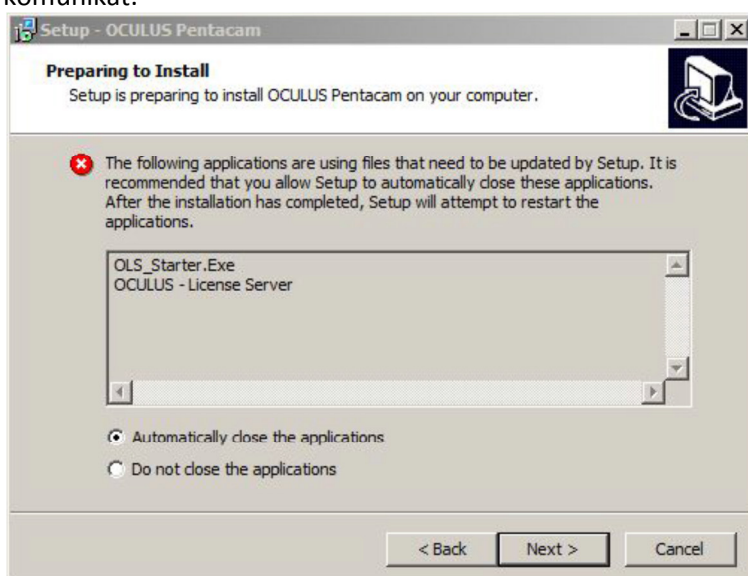

14. Kliknij przycisk "Dalej" („Next”)
15. Jeśli nie jest podłączony klucz licencji sieciowej, nie pojawi się żaden komunikat. Kontynuuj dalej od punktu 16
16. Kliknij przycisk "Zakończ" („Finish”)



17. Zostanie otwarty program zarządzania danymi pacjentów OCULUS
18. W zależności od poprzednio zainstalowanego oprogramowania Pentacam sterownik USB zostanie również zaktualizowany. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć aktualizację oprogramowania.
19. Kliknij przycisk "Zakończ"

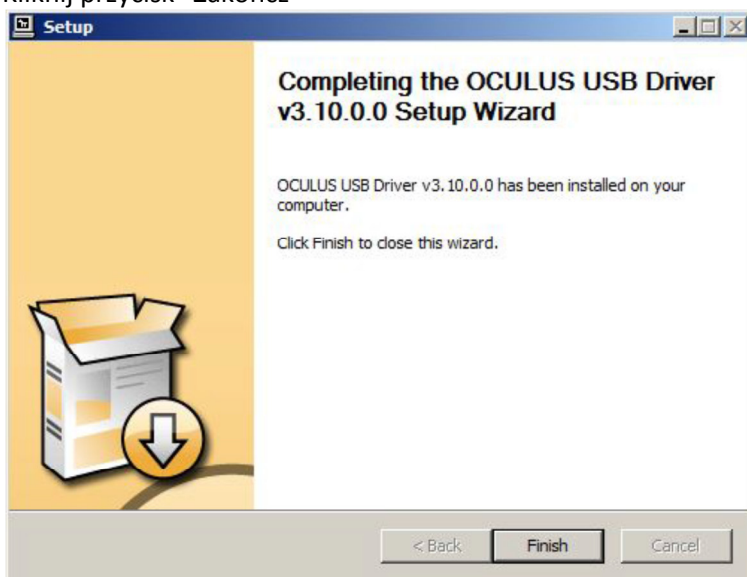

20. Włącz ponownie głowicę pomiarową Pentacam® AXL.