

Otto Bock Polska Sp. z o.o. | ul. Koralowa 3 | 61-029 Poznań

Poznań, 10.05.16

**Otto Bock
Polska Sp. z o.o.**

ul. Koralowa 3
61-029 Poznań
T + 48 61 6538 250
F + 48 61 6538 031

NOTA BEZPIECZEŃSTA DOT. Mygo Stander

ottobock@ottobock.pl
www.ottobock.pl

UWAGA:

Użytkownicy, Opiekuni, rodzice, Fizjoterapeuci, Dystrybutorzy.

WADLIWE PRODUKTY:

Leckey Mygo Stander wyprodukowane pomiędzy styczniem 2012, a sierpniem 2013.

Nazwa	Kod	Zasięg numeru seryjnego	Miesiąc produkcji
Mygo Stander rozm. 1	143-1600	LEC/087023 – LEC/108416	Styczeń 2012 – Sierpień 2013
Mygo Stander rozm. 2	143-2600	LEC/087023 – LEC/108416	Styczeń 2012 – Sierpień 2013

OPIS PROBLEMU:

Oryginalny projekt mechanizmu zmiany kąta umożliwiał osobie obsługującej pionizator zapięcie pinu bezpieczeństwa (A) co pozwalało na regulację przy użyciu jednej ręki. Jeśli ręka ześliznęłaby się z rączki (B) kiedy użytkownik byłby przypięty do polonizatora rączka mogłaby odwinąć się z powrotem do pozycji początkowej. Nie stanowi to niebezpieczeństwa dla osoby pionizowanej, jednak szybko poruszająca się rączka mogłaby zranić rękę osoby obsługującej jeśli ta chciała by powstrzymać przewijanie. Jako, że niebezpieczeństwo jest poważne producent postanowił przeprowadzić akcję serwisową. W sierpniu 2013 został zmieniony pin bezpieczeństwa. Nie ma już możliwości jego zapięcia, a do


Quality for life

NIP 972 08 16 993
REGON 631066884
Nr rachunku bankowego
59 1750 1019 0000 0000 0969 8493

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr
KRS 0000117673

Wysokość kapitału zakładowego:
1 248 000,00 PLN

regulacji kąta niezbędne jest użycie obu rąk jak na ilustracji poniżej.

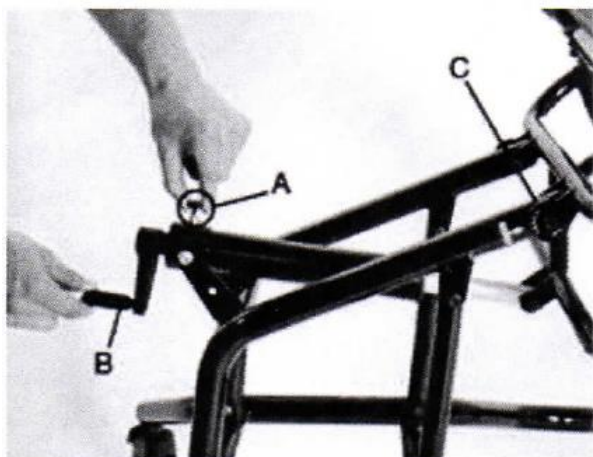

ROZWIĄZANIE PROBLEMU:

Wprowadzone zostało proste rozwiązanie eliminujące zagrożenie. Zaleca się wymianę pinu zabezpieczającego na taki, który uniemożliwia jego stałe zapięcie do ramy. Dzięki temu osoba ustawiająca kąt jest zmuszona jedną ręką cały czas trzymać pin, a drugą operować rączką. Jeśli ręka na rączce się ześlizgnie wystarczy puścić trzymany pin żeby zatrzymać cały mechanizm.

ŚRODKI:

Jeśli posiadacie Państwo produkt objęty akcją serwisową prosimy o kontakt z serwisem technicznym firmy Otto Bock Polska Sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 61 65 38 269 lub adresem email serwis.wozki@ottobock.pl. Zostanie wówczas wysłany do Państwa pin o zmienionej konstrukcji. Prosimy o wymianę oryginalnego na nowy i odesłanie do nas starego na nasz koszt. W czasie oczekiwania na nowy pin prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy regulowaniu kąta pochylenia.

Jeśli nie posiadacie już Państwo w/w sprzętu prosimy o wskazanie jego nowego posiadacza.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

Serwis Techniczny