

PILNE informacje dotyczące bezpieczeństwa

Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid (867172)
Awaryjne urządzenia po przeprowadzeniu akcji naprawczej nr 2021-CC-EC-002
lub aktualizacji oprogramowania do wersji 1.00.39 bądź wyższej

16 czerwca 2023 r.

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące dalszego bezpiecznego i właściwego użytkowania sprzętu.

Należy przekazać poniższe informacje wszystkim członkom personelu, którzy powinni się z nimi zapoznać. Istotne jest zrozumienie implikacji wynikających z niniejszego zawiadomienia.

Kopię niniejszego dokumentu należy przechowywać wraz z instrukcją obsługi danego urządzenia.

Szanowni Państwo!

Firma Philips wykryła problem w monitorach/defibrylatorach HeartStart Intrepid, który może się pojawić po przeprowadzeniu akcji naprawczej w związku z problemem opisanym w poprzednich informacjach dotyczących bezpieczeństwa nr 2021-CC-EC-002 (dotyczącym możliwych zakłóceń pracy innych urządzeń monitorujących) lub po aktualizacji oprogramowania urządzenia do wersji 1.00.39 lub wyższej. Problem ten może stanowić zagrożenie dla pacjentów. Przeprowadzenie akcji naprawczej problemu opisanego w informacjach dotyczących bezpieczeństwa nr 2021-CC-EC-002 zostało wstrzymane w celu zbadania nowo wykrytego problemu. Niniejsze PILNE zawiadomienie dotyczące bezpieczeństwa ma na celu poinformowanie:

1. Na czym polega problem i w jakich sytuacjach może się pojawić

Firma Philips otrzymała skargi dotyczące usterki, która pojawiła się w monitorach/defibrylatorach HeartStart Intrepid po przeprowadzeniu akcji naprawczej w związku z problemem opisanym w poprzednich informacjach dotyczących bezpieczeństwa nr 2021-CC-EC-002. Zgłoszono, że natychmiast lub po pewnym czasie w urządzeniu wyświetlał się komunikat „Equipment Disabled: System Failure” (Sprzęt wyłączony: błąd systemu).

Przyczyny tego problemu mogą być następujące:

- Fizyczne uszkodzenie płytki obwodu drukowanego modułu wejścia-wyjścia wewnątrz urządzenia podczas przeprowadzania akcji naprawczej. Problem ten dotyczy tylko niektórych urządzeń.
- Na urządzeniach ze starszą wersją płytki obwodu drukowanego modułu terapii zainstalowano oprogramowanie w wersji 1.00.39 lub wyższej.

Problem został stwierdzony w wyniku skarg klientów. Nie zgłoszono żadnego przypadku obrażeń ciała pacjenta.

Przeznaczenie produktu, którego dotyczy niniejsze zawiadomienie:

Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid stosowany jest w ratownictwie medycznym oraz środowisku szpitalnym przez wykwalifikowany personel medyczny przeszkolony w jego używaniu na potrzeby stymulacji, defibrylacji oraz kardiowersji. Urządzenie to służy do pomiaru częstości akcji serca oraz jego rytmu, saturacji

krwi, stężenia wydychanego CO₂, skurczowego, rozkurczowego oraz średniego ciśnienia krwi, temperatury, a także do wykonywania zewnętrznej stymulacji serca.

2. Zagrożenia związane z opisywanym problemem

Podczas korzystania z monitora/defibrylatora HeartStart Intrepid użytkownik może napotkać błąd spowodowany przez rozwiązanie poprzedniego problemu lub aktualizację oprogramowania, który może opóźnić lub uniemożliwić przeprowadzenie terapii.

3. Jakich produktów dotyczy ten problem i jak je zidentyfikować

Produkty, których dotyczy niniejsze zawiadomienie, to:

- Wszystkie monitory/defibrylatory HeartStart Intrepid, w których rozwiązanie problemu przeprowadzono przed styczniem 2023 r.
- Wszystkie monitory/defibrylatory HeartStart Intrepid z płytkami obwodów drukowanych modułu terapii wyprodukowanymi przed 15 kwietnia 2020 r.

Numery seryjne defibrylatorów/monitorów HeartStart Intrepid, których dotyczy opisywany problem, wymieniono w dodatku A. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

4. Jakie działania powinien podjąć klient/użytkownik w celu wyeliminowania zagrożenia dla pacjentów lub użytkowników

Monitora/defibrylatora HeartStart Intrepid można nadal używać, aczkolwiek trzeba przedsięwziąć poniższe środki ostrożności:

- Należy nadal stosować się do zaleceń podanych w informacjach dotyczących bezpieczeństwa nr 2021-CC-EC-002 (w związku z możliwymi zakłóceniami pracy innych urządzeń monitorujących), dopóki urządzenie nie zostanie naprawione:
 - Oczekując na rozwiązanie problemu, należy zlokalizować wszystkie obszary w placówce, w których pacjenci mogą być jednocześnie monitorowani przez zewnętrzny monitor pacjenta i podłączeni do monitora/defibrylatora korzystającego z zasilania sieciowego. Sytuacja taka może mieć na przykład miejsce w pracowni hemodynamiki.
 - W przypadku wykrycia zakłóceń firma Philips zaleca odłączenie monitora/defibrylatora Intrepid od zasilania sieciowego i korzystanie z zasilania akumulatorowego, co wyeliminuje zakłócenia. Jeżeli korzystanie z zasilania akumulatorowego nie jest możliwe i występują tylko zakłócenia EKG, do monitorowania EKG zamiast monitora głównego można użyć monitora/defibrylatora Intrepid. Jest to możliwe, ponieważ zakłócenia te nie mają wpływu na funkcję monitorowania EKG monitora/defibrylatora Intrepid.
 - Należy się ponadto upewnić, że filtr zasilania sieciowego (jeśli jest dostępny) we wszystkich innych monitorach podłączonych do ciała pacjenta został skonfigurowany odpowiednio do częstotliwości źródła zasilania (50 Hz lub 60 Hz). Może to zmniejszyć liczbę niepożądanych zakłóceń w tym monitorze.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi i zapewnić wykonywanie testów funkcjonalnych zgodnie z instrukcją obsługi.
- Należy kontynuować wykonywanie codziennych i cotygodniowych testów automatycznych opisanych w instrukcji obsługi urządzenia.
- Kopię niniejszych Pilnych informacji dotyczących bezpieczeństwa należy przechowywać wraz z instrukcją obsługi urządzenia.

- Należy uzupełnić i odesłać formularz odpowiedzi Pilnych informacji dotyczących bezpieczeństwa nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

Jeśli w urządzeniu pojawi się opisywany problem, należy wycofać je z użytku i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

Niniejsze informacje należy przekazać wszystkim odpowiednim osobom w placówce lub wszystkim placówkom, które otrzymały potencjalnie wadliwe wyroby (stosownie do sytuacji).

5. Opisane działania zaplanowane przez firmę Philips Emergency Care (CN-MF-00003921) mających na celu rozwiązanie problemu

W przypadku urządzeń, w których wdrożono poprzednie rozwiązanie, firma Philips wymieni płytkę obwodu drukowanego modułu wejścia-wyjścia. W urządzeniach z płytką obwodu drukowanego modułu terapii wyprodukowaną przed 15 kwietnia 2020 r. firma Philips wymieni ten komponent. Firma Philips przewiduje, że te oraz wszelkie inne rozwiązania problemów związanych z urządzeniami Intrepid zostaną wdrożone do połowy czerwca 2023 r.

W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy w związku z opisanym problemem prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Philips [Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, Dział Serwisu, serwis.medyczny@philips.com](mailto:serwis.medyczny@philips.com).

Niniejsze powiadomienie zostało przekazane właściwym instytucjom nadzorującym. Każde wystąpienie opisywanego problemu należy zgłaszać do firmy Philips, przedstawiciela firmy Philips lub do miejscowego organu nadzorującego.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z powyższym problemem.

Z poważaniem

Norma Ojeda
Sr. Director of Quality

Tony She
Sr. QMS Manager

PILNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — FORMULARZ ODPOWIEDZI

Dotyczy: awarie monitorów/defibrylatorów HeartStart Intrepid (867172) po przeprowadzeniu akcji naprawczej nr 2021-CC-EC-002 lub aktualizacji oprogramowania do wersji 1.00.39 bądź wyższej

Instrukcje: jak najszybciej (nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania) uzupełnić i odesłać niniejszy formularz do firmy Philips. Wypełnienie niniejszego formularza jest równoznaczne z potwierdzeniem otrzymania informacji dotyczących bezpieczeństwa, zrozumienia opisanego w nich problemu oraz działań, które należy wykonać.

Klient/odbiorca/placówka:

Ulica:

Miejscowość / województwo / kod
pocztowy / kraj:

Działania podejmowane przez klienta:

Monitora/defibrylatora HeartStart Intrepid można nadal używać, aczkolwiek trzeba wdrożyć poniższe środki ostrożności:

- Należy nadal stosować się do zaleceń podanych w informacjach dotyczących bezpieczeństwa nr 2021-CC-EC-002 (w związku z możliwymi zakłóceniami pracy innych urządzeń monitorujących), dopóki urządzenie nie zostanie naprawione.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi i zapewnić wykonywanie testów funkcjonalnych zgodnie z instrukcją obsługi.
- Należy kontynuować wykonywanie codziennych i cotygodniowych testów automatycznych opisanych w instrukcji obsługi urządzenia.
- Kopię niniejszych Pilnych informacji dotyczących bezpieczeństwa należy przechowywać wraz z instrukcją obsługi urządzenia.
- Należy uzupełnić i odesłać formularz odpowiedzi dotyczący Pilnych informacji dotyczących bezpieczeństwa nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

Jeśli w urządzeniu pojawi się opisywany problem, należy wycofać je z użytku i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

Potwierdzamy, że otrzymaliśmy dołączone Pilne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zrozumieliśmy ich treść, oraz że informacje zawarte w tym dokumencie zostały należycie przekazane wszystkim użytkownikom urządzeń HeartStart Intrepid.

Imię i nazwisko osoby wypełniającej niniejszy formularz:

Podpis:

Imię i nazwisko
(drukowanymi
literami):

Stanowisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail: _____

Data (DD-MMM-RRRR): _____

Niniejszy formularz należy zwrócić do firmy Philips pocztą e-mail serwis.medyczny@philips.com.**Dodatek A**

CN73900078	CN73900079	CN73900080	CN73900081	CN73900082	CN73900083	CN73900084	CN73900085
CN73900086	CN73900087	CN73900088	CN73900089	CN73900090	CN73900091	CN73900097	CN73900098
CN73900099	CN73900100	CN73900101	CN73900102	CN73900103	CN73900104	CN73900105	CN73900106
CN73900107	CN73900108	CN73900109	CN73900110	CN73900128	CN73900129	CN73900130	CN73900131
CN73900132	CN73900133	CN73900134	CN73900135	CN73900136	CN73900137	CN73900138	CN73900139
CN73900140	CN73900141	CN73900142	CN73900143	CN73900144	CN73900145	CN73900146	CN73900147
CN73900148	CN73900149	CN73900150	CN73900151	CN73900152	CN73900153	CN73900154	CN73900155
CN73900156	CN73900157	CN73900158	CN73900159	CN73900160	CN73900161	CN73900162	CN73900163
CN73900164	CN73900165	CN73900166	CN73900167	CN73900168	CN73900169	CN73900172	CN73900174
CN73900175	CN73900179	CN73900184	CN73900187	CN73900188	CN73900189	CN73900190	CN73900191
CN73900192	CN73900193	CN73900194	CN73900196	CN73900197	CN73900198	CN73900199	CN73900200
CN73900201	CN73900202	CN73900203	CN73900204	CN73900205	CN73900206	CN73900207	CN73900208
CN73900209	CN73900210	CN73900211	CN73900212	CN73900213	CN73900214	CN73900215	CN73900216
CN73900217	CN73900218	CN73900219	CN73900220	CN73900222	CN73900223	CN73900224	CN73900225
CN73900226	CN73900227	CN73900228	CN73900229	CN73900230	CN73900231	CN73900232	CN73900233
CN73900234	CN73900235	CN73900236	CN73900237	CN73900238	CN73900239	CN73900240	CN73900241
CN73900242	CN73900243	CN73900244	CN73900245	CN73900246	CN73900247	CN73900248	CN73900249
CN73900250	CN73900251	CN73900252	CN73900253	CN73900254	CN73900255	CN73900256	CN73900257
CN73900258	CN73900259	CN73900260	CN73900261	CN73900262	CN73900263	CN73900264	CN73900265
CN73900266	CN73900267	CN73900268	CN73900269	CN73900270	CN73900271	CN73900272	CN73900273
CN73900274	CN73900275	CN73900276	CN73900277	CN73900278	CN73900279	CN73900280	CN73900281
CN73900282	CN73900283	CN73900284	CN73900285	CN73900286	CN73900287	CN73900289	CN73900290
CN73900291	CN73900292	CN73900293	CN73900294	CN73900295	CN73900296	CN73900297	CN73900298
CN73900299	CN73900300	CN73900301	CN73900302	CN73900303	CN73900304	CN73900305	CN73900306
CN73900307	CN73900308	CN73900309	CN73900310	CN73900311	CN73900312	CN73900313	CN73900314
CN73900315	CN73900316	CN73900317	CN73900318	CN73900319	CN73900320	CN73900321	CN73900322
CN73900323	CN73900324	CN73900325	CN73900326	CN73900327	CN73900328	CN73900329	CN73900330
CN73900331	CN73900332	CN73900333	CN73900334	CN73900335	CN73900336	CN73900337	CN73900338
CN73900339	CN73900340	CN73900341	CN73900342	CN73900343	CN73900344	CN73900345	CN73900346
CN73900347	CN73900348	CN73900349	CN73900350	CN73900351	CN73900352	CN73900353	CN73900354
CN73900355	CN73900356	CN73900357	CN73900358	CN73900359	CN73900360	CN73900361	CN73900362
CN73900363	CN73900364	CN73900365	CN73900366	CN73900367	CN73900368	CN73900369	CN73900370
CN73900371	CN73900372	CN73900373	CN73900374	CN73900375	CN73900376	CN73900377	CN73900378
CN73900379	CN73900380	CN73900381	CN73900382	CN73900383	CN73900384	CN73900385	CN73900386
CN73900387	CN73900388	CN73900389	CN73900390	CN73900391	CN73900392	CN73900393	CN73900394
CN73900395	CN73900396	CN73900397	CN73900398	CN73900399	CN73900400	CN73900401	CN73900402
CN73900403	CN73900404	CN73900405	CN73900406	CN73900407	CN73900408	CN73900409	CN73900410
CN73900411	CN73900412	CN73900413	CN73900414	CN73900415	CN73900416	CN73900417	CN73900418
CN73900419	CN73900420	CN73900421	CN73900422	CN73900423	CN73900424	CN73900425	CN73900426
CN73900427	CN73900428	CN73900429	CN73900431	CN73900432	CN73900433	CN73900434	CN73900435
CN73900436	CN73900437	CN73900438	CN73900439	CN73900440	CN73900441	CN73900442	CN73900443
CN73900444	CN73900445	CN73900446	CN73900447	CN73900448	CN73900449	CN73900450	CN73900451
CN73900452	CN73900453	CN73900454	CN73900455	CN73900456	CN73900457	CN73900458	CN73900459
CN73900460	CN73900461	CN73900462	CN73900463	CN73900464	CN73900465	CN73900466	CN73900467
CN73900468	CN73900469	CN73900470	CN73900471	CN73900472	CN73900473	CN73900474	CN73900475
CN73900476	CN73900477	CN73900478	CN73900479	CN73900480	CN73900481	CN73900482	CN73900483

CN73901595	CN73901596	CN73901597	CN73901598	CN73901599	CN73901600	CN73901601	CN73901623
CN73901630	CN73901660	CN73901665	CN73901666	CN73901667	CN73901668	CN73901669	CN73901670
CN73901671	CN73901672	CN73901673	CN73901674	CN73901680	CN73901681	CN73901682	CN73901683
CN73901684	CN73901685	CN73901686	CN73901687	CN73901688	CN73901689	CN73901691	CN73901737
CN73901738	CN73901740	CN73901741	CN73901742	CN73901743	CN73901745	CN73901751	CN73901752
CN73901753	CN73901754	CN73901755	CN73901756	CN73901757	CN73901758	CN73901759	CN73901760
CN73901761	CN73901762	CN73901763	CN73901764	CN73901765	CN73901766	CN73901767	CN73901768
CN73901825	CN73901826	CN73901829	CN73901830	CN73901832	CN73901833	CN73901834	CN73901835
CN73901836	CN73901837	CN73901838	CN73901839	CN73901840	CN73901848	CN73901851	CN73901852
CN73901853	CN73901854	CN73901855	CN73901856	CN73901861	CN73901924	CN73901925	CN73901926
CN73901927	CN73901928	CN73901929	CN73901930	CN73901931	CN73901932	CN73901933	CN73901934
CN73901935	CN73901936	CN73901950	CN73901951	CN73901957	CN73901964	CN73901991	CN73901993
CN73901994	CN73901995	CN73901996	CN73901997	CN73901998	CN73901999	CN73902000	CN73902001
CN73902002	CN73902005	CN73902027	CN73902028	CN73902029	CN73902036	CN73902037	CN73902039
CN73902040	CN73902042	CN73902044	CN73902048	CN73902049	CN73902060	CN73902065	CN73902071
CN73902072	CN73902073	CN73902074	CN73902075	CN73902076	CN73902078	CN73902081	CN73902082
CN73902083	CN73902084	CN73902085	CN73902086	CN73902087	CN73902088	CN73902089	CN73902090
CN73902091	CN73902092	CN73902094	CN73902095	CN73902096	CN73902106	CN73902107	CN73902108
CN73902109	CN73902110	CN73902111	CN73902112	CN73902113	CN73902114	CN73902115	CN73902116
CN73902117	CN73902118	CN73902119	CN73902120	CN73902121	CN73902122	CN73902123	CN73902124
CN73902125	CN73902126	CN73902127	CN73902128	CN73902129	CN73902130	CN73902131	CN73902132
CN73902133	CN73902134	CN73902135	CN73902136	CN73902137	CN73902297	CN73902301	CN73902302
CN73902303	CN73902306	CN73902316	CN73902319	CN73902323	CN73902326	CN73902337	CN73902340
CN73902342	CN73902344	CN73902364	CN73902365	CN73902366	CN73902367	CN73902368	CN73902369
CN73902370	CN73902382	CN73902383	CN73902384	CN73902385	CN73902386	CN73902389	CN73902390
CN73902391	CN73902393	CN73902394	CN73902395	CN73902462	CN73902463	CN73902464	CN73902465
CN73902466	CN73902467	CN73902468	CN73902469	CN73902470	CN73902474	CN73902476	CN73902478
CN73902480	CN73902482	CN73902483	CN73902484	CN73902485	CN73902488	CN73902489	CN73902493
CN73902494	CN73902535	CN73902536	CN73902537	CN73902539	CN73902541	CN73902542	CN73902543
CN73902546	CN73902547	CN73902548	CN73902549	CN73902550	CN73902551	CN73902552	CN73902553
CN73902554	CN73902555	CN73902556	CN73902557	CN73902558	CN73902559	CN73902562	CN73902563
CN73902564	CN73902566	CN73902567	CN73902570	CN73902571	CN73902572	CN73902578	CN73902579
CN73902580	CN73902581	CN73902582	CN73902590	CN73902591	CN73902592	CN73902593	CN73902594
CN73902595	CN73902602	CN73902619	CN73902622	CN73902626	CN73902638	CN73902657	CN73902658
CN73902666	CN73902667	CN73902668	CN73902670	CN73902675	CN73902679	CN73902680	CN73902682
CN73902683	CN73902687	CN73902693	CN73902694	CN73902695	CN73902697	CN73902698	CN73902704
CN73902705	CN73902707	CN73902709	CN73902711	CN73902717	CN73902719	CN73902720	CN73902721
CN73902725	CN73902727	CN73902736	CN73902743	CN73902745	CN73902748	CN73902749	CN73902756
CN73902759	CN73902767	CN73902769	CN73902773	CN73902778	CN73902780	CN73902784	CN73902785
CN73902786	CN73902788	CN73902789	CN73902797	CN73902799	CN73902800	CN73902803	CN73902806
CN73902807	CN73902815	CN73902818	CN73902819	CN73902821	CN73902823	CN73902826	CN73902830
CN73902832	CN73902833	CN73902835	CN73902844	CN73902846	CN73902849	CN73902850	CN73902851
CN73902852	CN73902854	CN73902857	CN73902858	CN73902860	CN73902869	CN73902870	CN73902872
CN73902873	CN73902874	CN73902875	CN73902876	CN73902877	CN73902879	CN73902881	CN73902883
CN73902884	CN73902885	CN73902886	CN73902887	CN73902888	CN73902889	CN73902890	CN73902891
CN73902894	CN73902907	CN73902909	CN73902914	CN73902959	CN73902974	CN73902975	CN73902976
CN73902977	CN73902978	CN73902979	CN73902980	CN73902981	CN73902990	CN73902991	CN73902992
CN73902993	CN73902996	CN73902997	CN73902998	CN73902999	CN73903000	CN73903013	CN73903016
CN73903017	CN73903018	CN73903020	CN73903036	CN73903037	CN73903038	CN73903039	CN73903040
CN73903041	CN73903042	CN73903043	CN73903044	CN73903045	CN73903046	CN73903047	CN73903048
CN73903049	CN73903050	CN73903051	CN73903080	CN73903083	CN73903107	CN73903108	CN73903109
CN73903110	CN73903113	CN73903114	CN73903115	CN73903116	CN73903117	CN73903118	CN73903119
CN73903120	CN73903121	CN73903122	CN73903123	CN73903124	CN73903125	CN73903126	CN73903127
CN73903128	CN73903129	CN73903130	CN73903131	CN73903132	CN73903140	CN73903215	CN73903217
CN73903223	CN73903227	CN73903228	CN73903230	CN73903231	CN73903234	CN73903240	CN73903241
CN73903247	CN73903248	CN73903252	CN73903254	CN73903255	CN73903260	CN73903263	CN73903264
CN73903268	CN73903271	CN73903276	CN73903277	CN73903280	CN73903282	CN73903293	CN73903294
CN73903295	CN73903301	CN73903302	CN73903304	CN73903305	CN73903306	CN73903307	CN73903308
CN73903309	CN73903310	CN73903311	CN73903312	CN73903313	CN73903314	CN73903315	CN73903316
CN73903371	CN73903385	CN73903389	CN73903390	CN73903391	CN73903392	CN73903398	CN73903399
CN73903400	CN73903417	CN73903418	CN73903419	CN73903420	CN73903424	CN73903428	CN73903435
CN73903436	CN73903437	CN73903438	CN73903439	CN73903440	CN73903441	CN73903442	CN73903443
CN73903444	CN73903445	CN73903446	CN73903447	CN73903448	CN73903449	CN73903452	CN73903453

CN73903454	CN73903457	CN73903460	CN73903463	CN73903464	CN73903465	CN73903466	CN73903467
CN73903468	CN73903469	CN73903531	CN73903552	CN73903558	CN73903574	CN73903575	CN73903576
CN73903577	CN73903593	CN73903595	CN73903642	CN73903644	CN73903646	CN73903647	CN73903652
CN73903660	CN73903664	CN73903665	CN73903685	CN73903689	CN73903692	CN73903694	CN73903695
CN73903696	CN73903697	CN73903698	CN73903700	CN73903702	CN73903704	CN73903705	CN73903706
CN73903708	CN73903709	CN73903710	CN73903711	CN73903713	CN73903715	CN73903717	CN73903719
CN73903720	CN73903721	CN73903722	CN73903723	CN73903724	CN73903725	CN73903790	CN73903791
CN73903792	CN73903793	CN73903794	CN73903795	CN73903796	CN73903797	CN73903798	CN73903799
CN73903800	CN73903801	CN73903802	CN73903803	CN73903804	CN73903805	CN73903806	CN73903807
CN73903808	CN73903809	CN73903810	CN73903811	CN73903812	CN73903813	CN73903814	CN73903815
CN73903816	CN73903817	CN73903818	CN73903819	CN73903820	CN73903821	CN73903822	CN73903823
CN73903824	CN73903825	CN73903826	CN73903827	CN73903828	CN73903829	CN73903830	CN73903831
CN73903832	CN73903833	CN73903836	CN73903838	CN73903839	CN73903840	CN73903841	CN73903842
CN73903843	CN73903844	CN73903845	CN73903846	CN73903847	CN73903848	CN73903849	CN73903850
CN73903851	CN73903852	CN73903853	CN73903854	CN73903855	CN73903856	CN73903857	CN73903858
CN73903859	CN73903860	CN73903861	CN73903862	CN73903863	CN73903864	CN73903865	CN73903866
CN73903867	CN73903868	CN73903869	CN73903870	CN73903871	CN73903872	CN73903873	CN73903874
CN73903875	CN73903876	CN73903877	CN73903878	CN73903879	CN73903880	CN73903881	CN73903882
CN73903884	CN73903885	CN73903932	CN73903933	CN73903934	CN73903935	CN73903936	CN73903937
CN73903938	CN73903939	CN73903940	CN73903941	CN73903989	CN73903990	CN73904002	CN73904089
CN73904104	CN73904105	CN73904110	CN73904113	CN73904114	CN73904115	CN73904116	CN73904117
CN73904118	CN73904119	CN73904222	CN73904223	CN73904224	CN73904240	CN73904241	CN73904242
CN73904243	CN73904244	CN73904245	CN73904246	CN73904247	CN73904254	CN73904260	CN73904261
CN73904262	CN73904263	CN73904264					