

# Komunikat Bezpieczeństwa - kod paska H754D

piątek, 17 maja 2013 08:00

Alerie Polska



## Komunikat Bezpieczeństwa

Przestrzegamy użytkowników systemów INRatio oraz INRatio2 o wprowadzaniu na rynek testów służących do kontroli wskaźnika INR oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi i prawdopodobnie zawierające przepakowane przeterminowane paski testowe. Testy te stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Testy oferowane są w opakowaniach z nadrukowaną aktualną datą ważności. Na wszystkich kwestionowanych testach widnieje ten sam nr **LOT 238788** oraz **kod paska H754D**.

Oryginalne opakowania testów zawsze są oznaczone innym nr **LOT**, nr LOT służy do identyfikacji partii towaru, a zatem nie może się powtarzać ten sam nr LOT. Na każdym opakowaniu testów powinien znajdować się zakres **kontroli jakości QC1** oraz **QC2**. Brak tych informacji uzasadnia podejrzenie o nielegalnym pochodzeniu testów. Stosowanie testów, których data ważności minęła, może skutkować nieprawidłowymi wynikami wskaźnika INR i w konsekwencji nieprawidłowym dawkowaniem leków. Zła diagnoza oraz dobranie nieodpowiedniej dawki leku może w takim przypadku stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.

Pacjenci którzy, używali testów z datą ważności **Luty 2013, Marzec 2014, Maj 2014**, których kod paska to **H754D**, proszeni są o kontakt z

Komendą Rejonową Policji Warszawa I,  
Wydział dw. z Przystępczością Gospodarczą,  
ul. **Zakroczyńska 3c, 00-225 Warszawa**  
tel. **22 603 79 60**

z powołaniem się na **sygnaturę sprawy KRP-PG-I 2753/13**,  
lub z najbliższą jednostką policji i wskazanie ww. sygnatury.

Każdorazowo prosimy informować nas także o tym fakcie, korzystając z formularza <http://www.hemosense.pl/kontakt.html>.



Poprawiony: piątek, 28 czerwca 2013 11:09

