

SCHILLER POLAND Sp. z o. o.

02-729 Warszawa, ul. Rolna 157 tel./fax (022) 843 20 89, 647 35 90 do 92
KRS: 0000177120, Kapitał zakładowy: 1.583.000,00 PLN, NIP: 521-012-45-21

Notatka bezpieczeństwa

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania wyrobu: Bateria defibrylatora FRED easy

Opis:


Użytkownicy zgłosili problem z niektórymi nowymi bateriami – po włożeniu do defibrylatora FRED easy wyświetla się komunikat "BATERIA PUSTA/ROZŁADOWANA".

Ryzyko:

Baterie z taką wadą nie mogą być stosowane. Wada jest wykrywana przez urządzenie FRED easy automatycznie – po umieszczeniu baterii w środku urządzenia.

Urządzenia, których dotyczy przedmiotowy problem:

Niniejszy Komunikat dotyczy baterii do defibrylatora FRED easy, oznaczenie 4-07-0001, numery partii: HYB 16-0056, HYB 16-0057, HYB 16-0058 i HYB 16-0059.

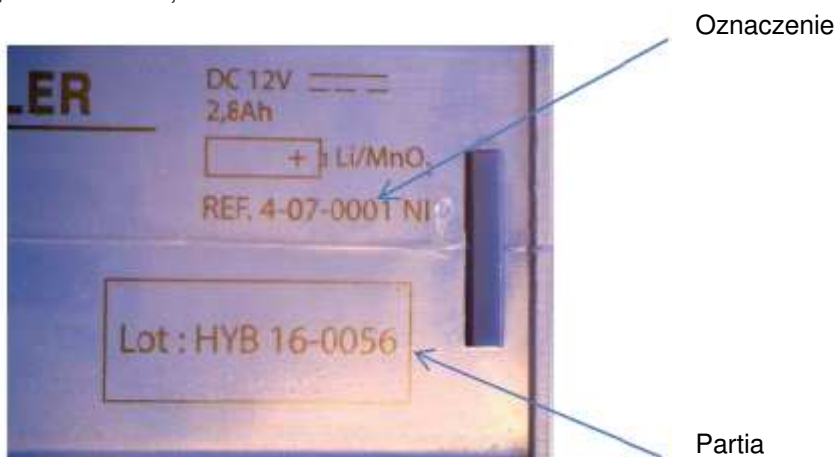

Działania/środki doraźne:

W przypadku, gdy zakupiliście Państwo baterię o numerze referencyjnym (oznaczeniu) 4-07-0001 lub defibrylator FRED easy w okresie pomiędzy 1 października 2016, a 15 stycznia 2017, istnieje prawdopodobieństwo, że otrzymaliście Państwo wadliwą baterię objętą niniejszym Komunikatem. Baterie z tych partii muszą zostać poddane testom przy użyciu poniżej opisanej procedury, w celu sprawdzenia, czy mogą być wykorzystywane w Państwa defibrylatorze FRED easy.

Rozwiązanie problemu: Procedura testowania:


Umieść baterię w urządzeniu FRED easy (patrz pkt. 3.1 "Wkładanie baterii" w instrukcji obsługi defibrylatora FRED easy).



SCHILLER POLAND Sp. z o. o.

02-729 Warszawa, ul. Rolna 157 tel./fax (022) 843 20 89, 647 35 90 do 92
KRS: 0000177120, Kapitał zakładowy: 1.583.000,00 PLN, NIP: 521-012-45-21

Urządzenie przeprowadzi automatyczny test. Pod koniec tego testu urządzenie wyłącza się i zaczyna migać zielona kontrolka LED, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

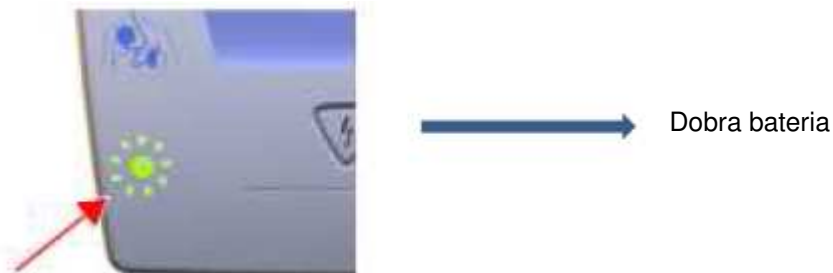

W tym przypadku Państwa bateria jest sprawna i może być używana bez ograniczeń.

Jednakże, jeśli po zakończeniu automatycznego testu zielona kontrolka nie włącza się, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat:



Oznacza to, że Państwa bateria posiada wyżej opisaną wadę.

W tym przypadku należy bezzwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Schiller w celu wymiany i otrzymania nowej baterii.

W imieniu producenta
przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Mamy nadzieję, że te informacje okazały się przydatne.

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania, bardzo prosimy o kontakt.

Tel./Fax: +22 647 35 90 do 92

Email: schiller@schiller.pl

Z poważaniem, mgr inż. Kamil Jakubiec (kierownik serwisu firmy Schiller Poland)

Warszawa, 03.02.2017



THE ART OF DIAGNOSTICS