

## **Notatka Bezpieczeństwa:**

### **Defibrylator FRED easy**

W Państwa defibrylatorze AED model FRED Easy znajduje się wewnętrzna bateria (popularna nazwa: bateria „backupowa” czyli podtrzymująca), która, niezależnie od głównej baterii zasilającej aparat (kolor niebieski) musi być wymieniana co 6 (sześć) lat. Informacja ta zamieszczona jest w każdej instrukcji obsługi, w rozdziale „Serwis”.

***Wymiana wewnętrznej baterii podtrzymującej w rytmie co 6 lat jest warunkiem koniecznym utrzymania defibrylatora w pełnej sprawności.***

Jeżeli ta, niezbędna do przeprowadzenia, czynność serwisowa nie zostanie wykonana, zachodzi niebezpieczeństwo, że aparat nie będzie mógł zostać uruchomiony.

W przypadku, gdy Państwa defibrylator jest starszy niż 6 lat, prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielstwem firmy SCHILLER (dane dla Polski podajemy na końcu niniejszej notatki), tak aby w trybie pilnym można było przeprowadzić niezbędną wymianę. Do tego czasu Państwa defibrylator może nadal pozostawać sprawny, jednak bezwzględnie prosimy przestrzegać reżimu przeprowadzania cotygodniowego testu urządzenia. W tym celu należy uruchomić aparat zielonym przyciskiem, pozwolić mu na przeprowadzenie samodzielnego testu, a następnie wyłączyć aparat, używać defibrylatora i poczekać do wyznaczonego terminu przeglądu serwisowego.

Jeżeli Państwa aparat nie osiągnął jeszcze wieku 6 lat, prosimy o zaplanowanie przeglądu serwisowego zgodnie z rytmem określonym przez Producenta.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do wieku urządzenia, mogą Państwo sprawdzić te dane w paszporcie urządzenia, tam gdzie jest pierwszy wpis dotyczący uruchomienia aparatu lub samodzielnie odnaleźć te dane na tabliczce znamionowej defibrylatora:

Jeżeli numer seryjny posiadanego przez Państwa urządzenia rozpoczyna się: **58xxxxxx** (ośmioznakowo) lub numer seryjny wygląda następująco: **058xx7xxxxxx**, **058xx8xxxxxx**, **058xx9xxxxxx** (dwunastoznakowy), oznacza to, że sześcioltni okres serwisowy został osiągnięty i **aparat wymaga natychmiastowego przeglądu.**

Wszystkie sprawy serwisowe prosimy zgłaszać do:

**SCHILLER Poland Sp. z o.o.**

ul. Rolna 157

02-729 Warszawa

Tel/fax: +48 22 6473590 do 92

e-mail: [schiller@schiller.pl](mailto:schiller@schiller.pl)