
Ważne powiadomienie nt. sprzętu medycznego

Temat: Łóżka szpitalne Völker™ 2080, 2082, S 280 lub S 282

Identyfikator FSCA: MOD1237

Rodzaj działania: Powiadomienie o działaniu naprawczym

Data:

Do: Kierownik ds. zarządzania ryzykiem placówki
Administrator placówki

Dotyczy urządzeń: Łóżka szpitalne Völker™ 2080, 2082, S 280 lub S 282

Kontekst:

Kupili Państwo od nas łóżka szpitalne Völker™ oznaczone symbolami 2080, 2082, S 280 lub S 282.

Mamy nadzieję, że są Państwo zadowoleni z naszego produktu i pragniemy poinformować o zmianie w dokumentacji technicznej wymienionych wyżej produktów.

Dzięki stałej kontroli funkcjonowania naszych produktów wykryliśmy, że po długim używaniu łóżek, w zależności od ich obsługi przez personel, w rzadkich przypadkach może wystąpić poluzowanie klejonych połączeń pomiędzy szyną boczną oraz przednią i tylną częścią łóżka. W ramach swojej strategii stałego rozwoju, firma Hill-Rom rozwinęła współpracę z Docapost (La Poste Group we Francji) w zakresie dystrybucji instrukcji bezpieczeństwa lub informacji związanych z wyrobami medycznymi Hill-Rom™.

W celu wykrycia tego problemu i aby zapobiec odpadaniu szyny bocznej podczas użycia dodaliśmy odpowiedni punkt na liście kontrolnej corocznej kontroli łóżek. Prosimy zwrócić uwagę na dołączony egzemplarz instrukcji i postępować zgodnie z nim podczas następnego badania technicznego.

Mamy nadzieję, że informacje są użyteczne i z przyjemnością będziemy współpracować z Państwem w przyszłości. W razie pytań chętnie udzielimy Państwu odpowiedzi.

Przekazanie niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa: (jeżeli dotyczy)
Kopię niniejszego powiadomienia należy przesłać do każdego pracownika placówki, zależnie od potrzeb.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z dystrybutorem, przedstawicielem Hill-Rom lub o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej www.hill-rom.com

Z poważaniem,

Dział obsługi technicznej Hill-Rom

Techniczna kontrola łóżek szpitalnych Völker™ i do opieki nad pacjentami

Obiekt, adres, nr klienta:					
Typ łóżka, produkt, miejsce, gdzie znajduje się łóżko:					
Oznaczenie łóżka (np. oznaczenie własne klienta lub numer identyfikacyjny firmy Völker™ ID-no.):					
Data kontroli:			Nazwisko technika:		
Rodzaj kontroli	Elementy do sprawdzenia	Raz do roku	Przyjęte	Nieprzyjęte	Nie dotyczy
Kontrola wzrokowa	Czytelny napis na urządzeniu				
	Dostępna instrukcja obsługi				
	Dolna rama	B*			
	Powierzchnia do leżenia, oparcie wezglowia i elementy sprężynowe (jeżeli występują)	B*			
	Adapter wysięgnika ręki, adapter do kroplówek	B*			
	Kabel zasilania, wtyczka lub ładowarka, podłączenie do ładowania	B*			
	Usunięcie naprężeń, ochrona, hak na kable	B*/S*			
	Kabel łączący, gniazdka, zaślepki	B*/S*			
	Ustawienie (odstęp 1 mm) i okablowanie czujnika (tylko łóżka Vis-a-Vis™)	B*/S*			
	Obudowa (silnik, elektronika sterująca)	B*			
	Ręczny przycisk sterujący (obudowa, kabel)	B*			
	Klawiatura dla pielęgniarki, sterowanie ręczne (obudowa, kabel)	B*			
	Wysięgnik ręki, pomocniczy panel do wsuwania szyny (środek bocznej szyny), dodatkowe akcesoria	B*/F*			
	Poprzeczne silniki i pokrywa, końce od strony głowy i stóp	B*			
	Kółka samonastawne	B*			
	Zabezpieczenie przed uderzeniem łóżka o ścianę (jeżeli występuje)	B*			
	Szyny boczne, w tym odcinek teleskopowy, jeżeli stosuje się	B*			
	Zmiana pozycji góra/dół: sprawdzić śrubę blokującą (tylko w modelu 5380)	S*			
Funkcjonalna kontrola szyn bocznych, w tym odcinka teleskopowego, jeżeli stosuje się	Blokady	X*			
	Zniekształcenie	X*			
	Otarcia	X*			
Funkcjonalna kontrola napędów ze sterowaniem ręcznym i sterowaniem przez pielęgniarkę z klawiatury/ręcznym	Tyłny odcinek, odcinek na górną część nóg, odcinek na dolną część nóg, regulacja wysokości, pozycja Trendelenburga, odwrotna pozycja Trendelenburga, regulacja długości (łóżka Vis-a-Vis™) — dostęp do wszystkich pozycji końcowych	X*/M*			
	Ograniczenie kąta (odcinek plecy-górna część nóg >90°)	X*			
	Regulacja odcinka dolnej części nóg (rastomat/hydrauliczne urządzenie podnośnikowe/płyta wspierająca)	X*			
	Funkcja CPR (jeżeli jest)	X*			
	Hamulec (elektryczny lub mechaniczny) - pozycja hamowania - swobodny ruch	X*			
	(jedynie dla wózków szpitalnych i - w pozycji sterowania S 280/S 310/S 380/S 282/S 382 (Vis-a-Vis™))				
	Zwalnianie mechaniczne (jedynie dla hamulców elektrycznych łóżek szpitalnych)	X*			
Kontrola wzrokowa Wymiana	Bateria blokowa 9 V (tylko na łóżkach z urządzeniami Oki-/ Ilcomat z wyjątkiem S 960-1 W/S 961) Wymiana (tak/ nie)	A2*			
	Uchwyt regulacji wysokości i – pas (jeżeli jest) Dokonywana wymiana (tak/nie)	A*			
Kontrola wzrokowa informacje różne	Przedłużanie łóżka (jeżeli występuje)	B*			
	Przechowywanie pościeli/ szuflada na pościel (jeżeli występuje)	B*			
	Sprawdzić połączenia klejone płyty od strony głowy i stóp (jeżeli występują)	B*			
Uwagi					
Całkowity wynik badania:					
Podpis technika:			Następna planowa kontrola:		

A*: Do wymiany co 5 lat dla uchwytów (H) oraz dla uchwytów z funkcją kółek tocznych (RF) w trybie opieki domowej; co 3 lata dla uchwytów i kółek tocznych w szpitalu i co 2 lata dla uchwytów z kółkami tocznymi do czyszczenia w systemach automatycznego prania pościeli · A2*: Do wymiany co dwa lata · B*: Zbadać, czy nie występują uszkodzenia · F*: Zbadać, czy nie występują zniekształcenia · M*: Sprawdzić funkcjonowanie silników i wyłączników krańcowych, czy silnik wyłącza się, kiedy dochodzi do pozycji końcowej? · S*: Sprawdzić odpowiednie ustawienie · X*: Ogólna kontrola funkcji

VÖLKER