

**OSTRZEŻENIE dot. BEZPIECZEŃSTWA: Balon IAB „uwięziony w koszulce”  
PRODUCENT: Teleflex Medical/Arrow  
DOTYCZY PRODUKTÓW:  
Koszulka IAB-05800 Seria IAB z SuperArrowFlex (wzmocniony drutem)**

Szanowny kliencie Cardiac Care,

Firma Arrow International dowiedziała się o wzroście ilości doniesień o „uwięzieniu w koszulce” w czasie używania koszulki SuperArrowFlex (wzmocnionej drutem) z naszymi produktami IAB-05800. Gdy balon IAB pozostaje uwięziony w koszulce, użytkownik nie ma możliwości poruszania cewnikiem IAB w przód, ani w tył, co potencjalnie powoduje opóźnienie w tej ważnej terapii. Nadmierne poruszanie balonem IAB z powodu jego uwięzienia w koszulce podczas wprowadzania może spowodować krwawienie lub uszkodzenie tętnicy.

Aby uniknąć uwięzienia balonu IAB w koszulce, proszę pamiętać, aby:

- **NIE PRÓBOWAĆ PRZEPYCHAĆ BALONU IAB PRZEZ KOSZULKĘ SIŁA**, jeżeli podczas wprowadzania przez koszulkę napotkany zostanie nietypowy opór. Wycofać balon IAB z koszulki, zachowując dostęp do naczynia i przygotować do wprowadzenia kolejnego balonu IAB.
- Jeżeli przy rozpoczęciu zabiegu IABP prędkość ma znaczenie krytyczne, rozważyć użycie koszulki teflonowej dostarczanej z zestawem do wprowadzania, która umożliwia bardziej elastyczne rozwiązania i „więcej wybacza” podczas wprowadzania balonu IAB.
- Uważnie stosować się do instrukcji użytkowania, w tym wszelkich ostrzeżeń i środków ostrożności.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub linią pomocy technicznej, która jest dostępna całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

**+353 (0) 9 06 46 08 00**

**1-800-447-4227 lub 1-617-389-6400**