

## Formularz dotyczący informacji o alarmie SynchroMed® II Wydajność baterii

### Ekran programatora klinicznego N'Vision® Model 8840

**Test alarmu**  
Wybierz ikonę Toolkit  
Dostępne są przyciski, aby wywołać alarm

**Przedziały alarmu**  
Wybierz żądany przedział alarmu z dostępnych na ekranie opcji

Pompa posiada dwa różne rodzaje alarmów: alarm **krytyczny** (podwójny dźwięk) oraz alarm **niekrytyczny** (pojedynczy dźwięk).

Rodzaj alarmu	Dźwięk alarmu	Znaczenie alarmu	Dostępne przedziały
Krytyczny	Podwójny dźwięk	Pompa się zatrzymała lub wkrótce się zatrzyma; potrzebna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem	10-minutowe przyrosty w przedziale od 10 minut do 2 godzin
Niekrytyczny	Pojedynczy dźwięk	Nie jest pilne; potrzebna jest szybka konsultacja z lekarzem	1-godzinne przyrosty w przedziale od 1 do 6 godzin