

# INSTRUKCJA RESETOWANIA ŁADOWARKI MODEL 37751

# Medtronic

## 1 POTRZEBNE NARZĘDZIA

- Mały płaski śrubokręt
- Zwykły spinacz do papieru



**UWAGA:** Ładowarka musi być odłączona. Ładowarki nie można resetować, jeśli wciąż jest podłączona do zasilania AC.

## 2 ZDJĄĆ POKRYWĘ



Za pomocą małego, płaskiego śrubokrętu należy odkręcić pokrywę.

## 3 ODSZUKAĆ OTWÓR RESETOWANIA

Otwór z przyciskiem do resetowania




Należy odszukać otwór resetowania.

## 4 RESET



Należy wyprostować spinacz do papieru. Należy włożyć końcówkę spinacza do otworu resetowania.

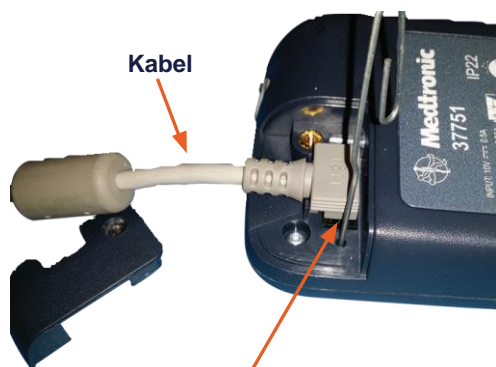

Należy przyciskać przycisk przez 2 sekundy. Należy ponownie założyć pokrywę i przykręcić śrubę.

**Uwaga:** Przed nałożeniem pokrywy należy upewnić się, że kabel jest wciąż prawidłowo podłączony.

## 5 CZYSZCZENIE EKRANU



Zielony przycisk

Na wyświetlaczu ładowarki pojawi się ekran ładowania AC. Należy nacisnąć zielony przycisk, aby wyczyścić ekran.

## 6 POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY RESETOWANIA



Aby rozpocząć kolejną sesję ładowania należy ponownie wcisnąć zielony przycisk. Jeśli ładowarka nie działa należy skontaktować się z Przedstawicielem firmy Medtronic.