

Dräger Polska sp. z o.o.

Siedziba Spółki

ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
tel. (052) 346-14-33, fax 346-14-37

Siedziba Zarządu

Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
tel. (0-22) 594-44-15, fax 594-44-10

NIP:554-023-26-10

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000072965 z dnia 17.12.2001
Kapitał Zakładowy 4.655.300 zł
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. NR 83 1030 1090 0000 0000 0006 6201

Drägermedical

A Dräger and Siemens Company

e-mail: info.polska@draeger.com
<http://www.draeger.com>

Bydgoszcz, dn. 12.03.09

***Do użytkowników aparatów do znieczulania
typu Titus (wszystkie warianty z podstawą jezdną)***

**Ważna wskazówka dotycząca bezpieczeństwa!
Zapewnienie stabilności aparatu, naklejka ostrzegawcza oraz uzupełnienie
instrukcji obsługi**

Szanowni Państwo,

W ramach obserwacji pracy aparatów firmy Dräger na całym świecie doniesiono nam o przypadkach, gdzie, co prawda nikt nie poniósł szkody, ale, przez które uznaliśmy za konieczne uzupełnienie informacji zawartej w instrukcji obsługi i na aparacie.

Aparaty do znieczulania z rodziny Titus od wielu lat mają zastosowanie w wielu placówkach ochrony zdrowia i sprawdzają się jako niezawodne. Jednak poinformowano nas, że w sporadycznych sytuacjach aparaty te mogą się wywrócić podczas przemieszczania. Analizując takie pojedyncze przypadki stwierdziliśmy, że aparaty na swojej podstawie jezdnej posiadały różnego rodzaju akcesoria, które mogły stanowić zagrożenie dla ich stabilności.

Jako producent widzimy konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na niebezpieczeństwa związane z transportowaniem aparatu.

Uznaliśmy za konieczne dodatkowe informacje w „Przeznaczenia – wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy” dotyczące stabilność Titusa z podstawą jezdną i jego transportu i zostały zawarte w załączniku do niniejszego pisma.

Prosimy przekazać informacje użytkownikom aparatów do znieczulania Titus z podstawą jezdną i jeszcze raz zwrócić uwagę na dopuszczone akcesoria zgodnie z listą zamówieniową (patrz instrukcja obsługi). Prosimy również o spowodowanie dołączenie zmian do wszystkich instrukcji obsługi znajdujących się w Państwa placówce przez doklejenie dodatkowej strony (załącznik) jak również umieszczenie odpowiedniej naklejki ostrzegawczej na danym aparacie.

W razie potrzeby proszę bezpłatnie zamówić dodatkowe strony uzupełniające i naklejki ostrzegawcze w serwisie firmy Dräger.

Przepraszamy za niedogodności wynikające z niniejszej akcji, prosimy o zrozumienie i z góry dziękujemy za współpracę.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z serwisem firmy Dräger Polska sp. z o.o..

Z poważaniem

Andrzej Koźlicki

Kierownik Serwisu Dräger Polska sp. z o.o.

REGION CENTRALNY

Al.Jerozolimskie 176
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 594-44-11
fax (0-22) 594-44-10

REGION ZACHODNI

ul. Warzywna 10
61-658 POZNAŃ
tel. (0-61) 826-86-05
fax (0-61) 826-81-25

REGION POŁUDNIOWY

ul. Żelazna 1
40-851 KATOWICE
tel. (0-32) 359-09-62, 63
fax (0-32) 359-09-64

CENTRUM SERWISOWE

tel. 0 800 20 44 20
e-mail: serwis.polska@draeger.com
**Sprzedaż części zamiennych
i akcesoriów** tel. (052) 346 14 35