



Lipiec 2010 r.

Nazwa Produktu	Nr Kat.	Jednostka	Numer Serii	Data Ważności
Zestaw z Testem Lateksowym BBL™ Staphyloslide™ dla Gronkowców	240952	100 Testów	16604110	30/04/2010
			16605410	31/07/2010
			16640910	31/07/2010
			16679310	31/08/2010
			16750910	31/08/2010
			16778710	30/09/2010
			16781210	30/09/2010
			16831557	31/10/2010

Szanowny Kliencie,

Firma BD ustaliła, że wyżej wymienione numery serii zestawów mogą wykazywać fałszywą aglutynację w przypadku kolonii innych niż *Staphylococcus aureus*, a także odczynnika do kontroli ujemnej. Jak podano w instrukcji dołączonej do opakowania, Kontrolę Jakości należy przeprowadzać każdego dnia, kiedy używany jest zestaw. Zestawu nie należy używać, jeśli reakcje z organizmami kontrolnymi są niepoprawne.

Nasza dokumentacja wskazuje, że w okresie pomiędzy 14 lipca 2009 r. a chwilą obecną dostarczono Państwu produkt o wymienionym wyżej numerze serii. Prosimy zaprzestać stosowania produktu o tym numerze serii i zutilizować wszelkie pozostające w Państwa posiadaniu materiały. Za zutilizowane produkty otrzymacie Państwo zamienniki. Produkt na wymianę powinien być dostępny we wrześniu 2010 roku.

Dla celów nadzoru, prosimy o wypełnienie załączonego formularza, **niezależnie od tego, czy posiadają Państwo produkt na stanie**, abyśmy mogli potwierdzić otrzymanie przez Państwa niniejszego powiadomienia i skonsolidować ilość. Prosimy **wypełnić formularz i przesłać faksem** do osoby kontaktowej w lokalnym biurze dystrybutora produktów BD.

W celu zorganizowania wymiany wymienionych numerów serii prosimy o kontakt z lokalnym biurem dystrybutora.

Firma BD jest zaangażowana w dostarczanie Państwu produktów najwyższej jakości.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogła spowodować ta sytuacja i dziękujemy za Państwa nieustające wsparcie.



Helping all people
live healthy lives

PROSIMY ODESŁAĆ NINIEJSZY FORMULARZ,
ABYŚMY MOGLI POTWIERDZIĆ OTRZYMANIE PRZEZ PAŃSTWA NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA

Od:

Placówka:

Ulica:

Miasto/Kod

PRODUKT, KTÓREGO DOTYCZY KWESTIA, I STOSOWNY STATUS

Nazwa (Nazwy) produktu	Numer (Numery) kat.	Numer (Numery) serii Numer seryjny Numer wersji oprogramowania	Status	Ilość (Ilości)
Zestaw z Testem Lateksowym BBL™ Staphyloslide™ dla Gronkowców	240952	16604110	<input type="checkbox"/> Otrzymane	
			<input type="checkbox"/> Zużyte	
			<input type="checkbox"/> Zniszczone	
		16605410	<input type="checkbox"/> Otrzymane	
			<input type="checkbox"/> Zużyte	
			<input type="checkbox"/> Zniszczone	
		16640910	<input type="checkbox"/> Otrzymane	
			<input type="checkbox"/> Zużyte	
			<input type="checkbox"/> Zniszczone	
		16679310	<input type="checkbox"/> Otrzymane	
			<input type="checkbox"/> Zużyte	
			<input type="checkbox"/> Zniszczone	
		16750910	<input type="checkbox"/> Otrzymane	
			<input type="checkbox"/> Zużyte	
			<input type="checkbox"/> Zniszczone	
		16778710	<input type="checkbox"/> Otrzymane	
			<input type="checkbox"/> Zużyte	
			<input type="checkbox"/> Zniszczone	
		16781210	<input type="checkbox"/> Otrzymane	
			<input type="checkbox"/> Zużyte	
			<input type="checkbox"/> Zniszczone	
		16831557	<input type="checkbox"/> Otrzymane	
			<input type="checkbox"/> Zużyte	
			<input type="checkbox"/> Zniszczone	

Poprzez niniejszy dokument, ja, _____, _____,

Imię i Nazwisko

Stanowisko

zaświadczam, że otrzymałem/-am powiadomienie od BD dot. wymienionego wyżej produktu (lub produktów) i postąpiłem/-am z tymi produktami zgodnie z instrukcjami w powiadomieniu.

Data

Podpis

Prosimy odesłać niniejszy dokument do biura dystrybutora produktów BD.