

## Informacja Dotycząca Przeglądu/Wymiany Urządzenia

### **Pompa ClearStar Enteral Numer Katalogowy M771**

Warszawa, 25.06.2007

Szanowni Państwo,


W związku z możliwością wadliwego działania pomp do żywienia enteralnego ClearStar Companion Enteral Pump (numer katalogowy M771), producent Abbott Laboratories zwraca się z prośbą do użytkowników o kontakt z Działem Medycznym firmy Abbott Laboratories, lek. med. Wioletta Rzeszotarską Matuszewska (tel. 22 606 18 84, e-mail: wioletta.rzeszotarska@abbott.com) lub dr Józefem Haczyńskim (tel. 22 606 10 88, e-mail: jozef.haczynski@abbott.com).

Dywizja Ross Products firmy Abbott Laboratories podjęła decyzję o dobrowolnym przeglądzie i naprawie pomp typu ClearStar Enteral o określonych numerach seryjnych.

Okazało się bowiem, że niewielka ilość pomp posiada wsporniki adaptera (trójkąta), które łatwo mogą ulec połamaniu i potencjalnie spowodować nieprawidłowe dozowanie pokarmu (zaniżanie podawanych ilości).

Prosimy o staranne monitorowanie dozowania pokarmu w celu zapewnienia prawidłowej jego podaży przy odpowiednio zaprogramowanej szybkości przepływu. Jeśli nie zauważyli Państwo żadnych nieprawidłowości w szybkości podaży pokarmu, pompa może pozostać w użyciu do momentu wyznaczenia terminu jej naprawy lub wymiany.

W celu podania 6-cyfrowego numeru seryjnego pompy, który umieszczony jest z tyłu pompy (NIE urządzenia ładującego, jak pokazano poniżej), prosimy o kontakt z dr n. med. Józefem Haczyńskim, Dyrektorem Medycznym firmy Abbott Laboratories Poland, pod numerem telefonu +22 6061088, od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 17.00. Uzyskacie Państwo informację, czy będąca w Państwa użyciu pompa wymaga naprawy, a jeśli tak, wyznaczmy termin jej naprawy lub wymiany.

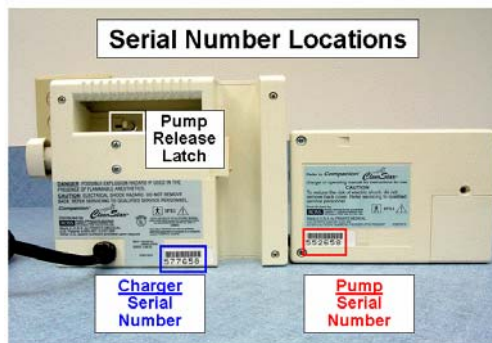

Bardzo cenimy współpracę z Państwem i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogła spowodować ta sytuacja.

Z poważaniem,

dr hab. n. med. Józef Haczyński  
Dyrektor Medyczny Abbott Laboratories Poland