



GENEXO

Od: Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajęczka 26, 01-510 Warszawa

Dotyczy: **Usprawnienie w systemie monitorującym stężenie glukozy we krwi iXell**

Szanowni Państwo,

Od maja 2010 firma Genexo, w celu ułatwienia badania użytkownikowi glukometru, wprowadza usprawnienie technologiczne glukometru iXell, polegające na usunięciu bocznego przycisku wyboru kodu pasków. **Dzięki temu glukometr iXell staje się teraz urządzeniem w pełni nie wymagającym kodowania.**

Glukometry iXell nie zawierające bocznego przycisku kodującego współpracują zarówno z paskami diagnostycznymi z kodem 39, dostępnymi dotychczas na rynku, jak również z **nowymi paskami iXell, wprowadzanymi do obrotu od maja 2010, które nie posiadają już numeru kodu na opakowaniu.**

Glukometr iXell pozbawiony bocznego przycisku kodowania pod względem dokładności i precyzji jest identyczny z glukometrem użytkowanym przez Państwa dotychczas.

Dotychczasowe Glukometry iXell - z przyciskiem kodującym - dokonują pomiarów glikemii wykorzystując zarówno paski oznaczone kodem 39, jak i paski bez oznaczenia kodu. Przed pomiarem należy jedynie sprawdzić na wyświetlaczu dotychczas użytkowanego glukometru iXell, czy został ustawiony kod numer 39. Biorąc pod uwagę, że od lipca 2009 oferujemy wyłącznie paski iXell z kodem 39, wszystkie dotychczas pracujące glukometry powinny być zakodowane na ten numer kodu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: z Infolinią Genexo:

- a) Infolinia dla telefonów stacjonarnych 0 801 808 818*
- b) Infolinia dla telefonów komórkowych 516 203 516**
- c) E-mail office@genexo.pl

z poważaniem

Katarzyna Kołodziejaska

Kierownik Produktu

Grzegorz Bora

Kierownik Działu Diagnostyki

Genexo Sp. z o.o

*koszt połączenia jednego impulsu wg taryfy operatora

** koszt połączenia według taryfy operatora