

# POPRAWKA DOTYCZĄCA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO

25.04.2008

Do: Dyrektor placówki medycznej/ kierownik ds. zarządzania ryzykiem  
Przełożona pielęgniarek  
Dyrektor działu inżynierii biomedycznej

Adres

**Temat:** Potencjalna awaria wyświetlania alarmu przy odłączeniu monitora w S/5 iCentral i iCentral Client

**Produkty, których dotyczy zawiadomienie:** S/5 iCentral wersje L-NET03, L-NETC03, L-NET05, L-NETC05

Szanowni Państwo związani z opieką medyczną:

GE Healthcare pragnie poinformować o problemie związanym z naszym produktem S/5 iCentral wersje L-NET03, L-NETC03, L-NET05 i L-NETC05. Zgodnie z naszymi zapisami obecnie mogą Państwo korzystać z jednego z tych systemów. Nasze dotychczasowe badania wykazały, że:

- Lokalizacje monitora pacjenta wyświetlane w trybie Multi View są definiowane na stronach konfiguracji iCentral. Opcje wyświetlanych lokalizacji to All (Wszystkie), Active (Aktywne), Active alarming first (Najpierw aktywne alarmowe) oraz Alarming only (Tylko alarmowe). Jeśli widok konfiguracji nie jest ustawiony na All (Wszystkie), a monitor podłączony do urządzenia Central ulegnie awarii, nie zostanie wyświetlony komunikat „Utracono połączenie z monitorem”.

Nie zgłoszono przypadków zranienia lub śmierci pacjenta w związku z tym problemem.

Zalecenia GE Healthcare

Wszystkie placówki powinny ustawić opcję All (Wszystkie) w Displayed Locations (Wyświetlane lokalizacje) we wszystkich urządzeniach S/5 iCentral i klientach iCentral.

Uwaga: Patrz załączone instrukcje opisujące procedurę konfiguracji wyświetlanych lokalizacji.

W przypadku dalszych pytań dotyczących tego zawiadomienia, proszę skontaktować się z Centrum pomocy technologicznej **GE Healthcare Technologies Support Center** pod numerem telefonu **1-800-558-7044** - należy wybrać opcję 2 i poprosić o połączenie z pomocą techniczną lub z lokalnym dystrybutorem GE.

Przepraszamy za wszystkie niedogodności i dziękujemy za cierpliwość i wsparcie.

Z poważaniem,



Aimee Klussendorf  
Globalny Kierownik ds. Produktu:  
Clinical Systems Monitoring Solutions  
T: (800) 558-5120 wewn. 2496  
[aimee.klussendorf@med.ge.com](mailto:aimee.klussendorf@med.ge.com)



Gerry Buss  
Dyrektor ds. prawnych  
Clinical Systems

W załączeniu: Instrukcja uruchamiania alarmu „Utracono połączenie z monitorem” w iCentral, M1111032

Nr dokumentu M1125524

20.06.07

Copyright © 2007 General Electric Company. Wszystkie prawa zastrzeżone.

GE Healthcare Finland Oy  
Helsinki, Finlandia  
P.O. Box 900  
FI-00031 GE  
Tel: +358 10 39411  
Faks: +358 9 1463310  
www.gehealthcare.com

## Krótką instrukcją: Jak włączyć alarm „Utracone połączenie z monitorem” w iCentral

Niniejsza krótka instrukcja opisuje sposób ustawiania opcji Displayed Locations (Wyświetlane lokalizacje) na „All” (Wszystkie) oraz jak zmienić hasło serwisowe dla Central i klienta Central.

Wszystkie placówki powinny ustawić opcję **All (Wszystkie) w Displayed Locations (Wyświetlane lokalizacje) we wszystkich** urządzeniach S/5 iCentral i klientach iCentral. Ma to szczególne znaczenie na oddziałach intensywnej opieki medycznej, gdzie pacjenci wymagają stałej kontroli.

Lokalizacje monitora pacjenta wyświetlane w trybie **Multi View** są definiowane na stronach konfiguracji Central. Opcje wyświetlanych lokalizacji to **All (Wszystkie), Active (Aktywne), Active alarming first (Najpierw aktywne alarmowe)** oraz **Alarming only (Tylko alarmowe)**. Jeśli widok konfiguracji NIE jest ustawiony na **All (Wszystkie)**, a monitor podłączony do urządzenia Central ulegnie awarii, nie zostanie wyświetlony komunikat „Utracono połączenie z monitorem”.


Aby zabezpieczyć nowe ustawienie, zaleca się zmianę hasła serwisowego po ustawieniu opcji Wyświetlane lokalizacje.

### 1 Zmiana ustawienia ekranu

Do zmiany większości podstawowych ustawień konfiguracyjnych bez zamykania oprogramowania Central służy dynamiczny widok konfiguracyjny. Ustawienia są zapisywane w pamięci trwałej.

#### Aby otworzyć dynamiczny widok konfiguracyjny

Aby otworzyć dynamiczny widok konfiguracyjny, trzeba uruchomić oprogramowanie Central:

1. Kliknij symbol narzędzia  na pulpicie Central.
2. Podaj nazwę użytkownika („servuser”) i hasło (domyślnie „cccc”). Hasła są konfigurowane w Ustawieniach systemu.
3. Kliknij wybraną zakładkę, aby otworzyć widok ustawień Ekranu 1 i 2.



## Ustawienia ekranu

Na stronach ustawień ekranu możesz wybrać wygląd ekranów.



Osobne strony służą do zmiany ustawień Ekranu 1 i Ekranu 2, trybu Multi View i wyświetlanych lokalizacji:

- W **Displayed Locations (Wyświetlane lokalizacje)** wybierz **All (Wszystkie)**. Jeśli korzystasz z dwóch ekranów, pamiętaj, aby wybrać opcję **All (Wszystkie)** dla obu ekranów.




## 2. Zmiana hasła serwisowego

Przed przystąpieniem do zmiany hasła trzeba zamknąć oprogramowanie Central.

### Aby zamknąć oprogramowanie iCentral



1. Kliknij symbol Otwartego ekranu statusu  na pulpicie iCentral.
2. Kliknij ikonę Ekranu statusu w lewym górnym rogu okna ekranu statusu i wybierz **Stop System (Wyłącz system)**.
3. Podaj nazwę użytkownika (Servuser) i hasło (domyślnie AAAAA), a następnie kliknij **OK**.


### Aby zmienić hasło serwisowe

INFORMACJA: W hasłach używaj tylko międzynarodowych znaków i cyfr. Niedozwolone są znaki specjalne i charakterystyczne dla poszczególnych języków.

Aby włączyć program Ustawień systemu:



1. Otwórz folder sieci D-O i kliknij ikonę **System Setup (Ustawienia systemu)**.
2. Podaj nazwę użytkownika (**Install**) i hasło (domyślnie CCCCC).
3. Kliknij **OK**.

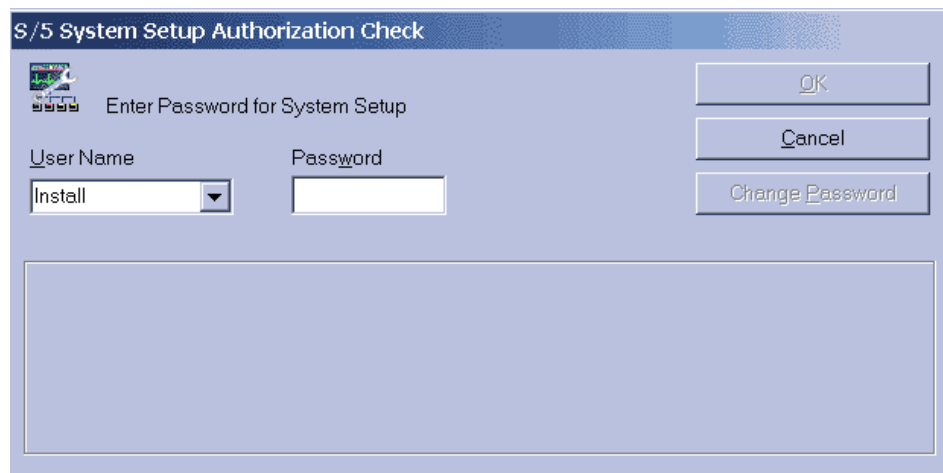

S/5 System Setup Authorization Check

Enter Password for System Setup

User Name: Install

Password: [Empty]

Buttons: OK, Cancel, Change Password

## Aby zmienić hasło serwisowe

1. Na ekranie ustawień systemu wybierz **System Setup - Password - Service password (Ustawienia systemu - Hasło - Hasło serwisowe)**.
2. Podaj nowe hasło w polu **Current Value (Bieżąca wartość)**.
3. Kliknij **Select Value (Wybierz wartość)**.

