
Pilna Nota Bezpieczeństwa

Dotyczy:

Analizatorów ABL505/555, EML105, ABL600, Serii: ABL700, ABL800 FLEX, i ABL800 BASIC
Dodatkowe Instrukcje.

Grudzień, 2009

Szanowni Państwo,

Szczegółowe informacje na temat działań korygujących:

Niniejsze zawiadomienia ma zastosowanie do następujących analizatorów firmy Radiometer:
ABL505/555, EML105, ABL600, ABL700, ABL800 FLEX, ABL 800 BASIC

Opis problemu:

Firma Radiometer niedawno zidentyfikowała problem, iż lek o nazwie „Irenat”, które jest podawany głównie w Niemczech, zakłóca pomiary wapnia zjonizowanego. Stwierdzono, że poziom 1,5 mmol/L na chloran (ClO_4^-) w leku „Irenat” powoduje obniżenie zmierzonej wartości zjonizowanego wapnia o 0,20 mmol/L (przy wartości rzeczywistej 1,25 mmol / L). Zjawisko to zaobserwowano w analizatorach: ABL505/555, EML105, ABL600, serii: ABL700, ABL800 FLEX, ABL800 BASIC .

Zalecenia w zakresie działań podejmowanych przez użytkownika:

W wyniku tej sytuacji Radiometer prosi o współpracę i dołożenie tego pisma w zakładce instrukcji "Uwagi dla użytkowników" znajdującą się przed kopią Państwa Instrukcji Obsługi dla analizatorów: ABL505/555, EML105, ABL600, ABL700 Series, ABL800 FLEX i ABL800 BASIC.

Przekazanie niniejszej Noty Bezpieczeństwa:

Prosimy o przekazanie niniejszej informacji wszystkim zainteresowanym w ramach swojej organizacji, którzy muszą być świadomi dodatkowych zaleceń i instrukcji, jak również do wszystkich użytkowników analizatorów ABL505/555, EML105, ABL600, serii: ABL700, ABL800 FLEX i ABL800 BASIC (jeżeli to dotyczy).

Jeśli mają Państwo pytania związane z powyższą informacją, prosimy o kontakt z dystrybutorem Radiometer.

Uprzejmie przepraszamy za niedogodności.

Z poważaniem,

Radiometer

FAX FORMULARZ ZWROTU

Dotyczy:

Analizatory: ABL505/555, EML105, ABL600, ABL700 Series, ABL800 FLEX, i ABL800 BASIC

Potwierdzamy otrzymanie Noty Bezpieczeństwa dotyczącej analizatorów ABL505/555, EML105, ABL600, ABL700 Series, ABL800 FLEX i ABL800. oraz potwierdzam umieszczenie jej w w zakładce instrukcji "Uwagi dla użytkowników", która znajduje się przed kopią Instrukcji Obsługi.

Informacje nt szpitala:

Szpital

Adres

Osoba kontaktowa

Data Podpis

Prosimy o przesłanie niniejszego formularza faksem do Radiometer Sp. z.O.O., Ul Kijowska 1 03-783 Warszawa; na następujący numer:

Fax : (+48) 22 518 02 41