

Warszawa, 14 lutego 2012r.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaną od producenta, – RMS Medical Products – notatką bezpieczeństwa produktu **ssak ręczny RES-Q-VAC**, dotyczącą bezpiecznego użytkowania w/w wyrobu, przekazujemy ją Państwu w niniejszej korespondencji. Państwa dane adresowe pozyskaliśmy z faktur sprzedaży w/w sprzętu, zakupionego w naszej firmie w poprzednich latach. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn nie są Państwo w posiadaniu wyżej wymienionego wyrobu, prosimy niniejszą notatkę potraktować jako niebyłą.

W przypadku wątpliwości bądź jakichkolwiek pytań dotyczących tego pisma prosimy o kontakt na poniższy adres:

**PARPOL Sp. z o.o.**

02-815 Warszawa, ul. Żołądy 11

tel. +48 22 313 09 39, faks: +48 22 313 09 59

[j.markowski@paramedica.pl](mailto:j.markowski@paramedica.pl)

[www.paramedica.pl](http://www.paramedica.pl)



Z poważaniem

Specjalista ds. dokumentacji technicznej



Jarosław Markowski



## **Pilny komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu**

**Ssak RES-Q-VAC®** z miękką końcówką typu Yankauer oraz filtrem FSP (Full Stop Protection – ochrona całkowitego zatrzymania)

**27 stycznia 2012 r.**

**Typ działania: zalecenie producenta dotyczące sposobu użytkowania produktu**

**Do wiadomości: Wszyscy klienci korzystający ze ssaka RES-Q-VAC® z miękką końcówką typu Yankauer i filtrem FSP.**

### **Dane wyrobów, których dotyczy komunikat:**

Numery seryjne wyrobów, których dotyczy komunikat: P1 F1B110NLED, P1 F1B1AFNLED, P1 F1B1AFSLED, P1 F1H110N, P1 F1S000N, P1 F1S000NE, P1 F1S000NGE, P1 F1S110N, P1 F1S114S, P1 F1S1C1s, P2 F1B1AFN, P2 F1B1AFS, PC F8S181NLED, R1 F1B1AFS, R1 F1S000N, R1 F1S110N, R1 F1S1C1S, RC F8S181N.

Wyjaśnienie numerów seryjnych znajduje się pod poniższym adresem:

[http://www.rmsmedicalproducts.com/downloads/resources/rqv/literature/RQV\\_FL\\_part\\_number\\_matrix\\_03-3024vA.pdf](http://www.rmsmedicalproducts.com/downloads/resources/rqv/literature/RQV_FL_part_number_matrix_03-3024vA.pdf)

**Problem dotyczy wyłącznie stosowania końcówek *miękkich* typu Yankauer.**

**W końcówkach sztywnych typu Yankauer problem NIE występuje.**

### **Opis problemu:**

Duże cząstki pokarmu dostające się do rurki ssącej z miękką końcówką typu Yankauer powodują ich zatkanie na odcinku pomiędzy rurką a kanistrem.

Sytuacja ta stanowi potencjalne ryzyko wyłącznie dla pacjentów korzystających z końcówek miękkich typu Yankauer z filtrem FSP.

### **Zalecenie dotyczące działań, które powinien podjąć użytkownik:**

Zgodnie z tym, co napisano w zmienionej instrukcji dla użytkownika, Wytwórca „zaleca zawsze zapewnienie dostępu do zapasowego kanistra w przypadku korzystania z filtru FSP”.

W razie zablokowania rurki ssącej, Wytwórca zaleca użytkownikom:

1. Niezwłocznie założyć zapasowy kanister, lub – jeśli jest on niedostępny,
2. Zdjęcie pokrywki FSP z kanistra i uderzenie nią o twardą powierzchnię, w celu usunięcia uwięzłej cząstki. Do usunięcia przeszkody można także użyć długopisu lub podobnego przedmiotu.

### **Rozpowszechnienie tego komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa stosowania produktu:**

Proszę przekazać ten komunikat innym organizacjom i użytkownikom, których on dotyczy.

### **Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:**

Dział obsługi klienta firmy RMS Medical Products. Dane kontaktowe – patrz stopka.

Osoba poniżej podpisana potwierdza, że ten komunikat został przekazany do odpowiedniego organu rejestrującego.

Podpis: 27.01.2012

24 Carpenter Road, Chester, NY 10918.USA. Nr bezp. +1-800-624-9600, tel.: +1-845-469-2042, faks **+1-845-469-5518**. [www.rmsmedpro.com](http://www.rmsmedpro.com)