

POŚWIADCZONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

**Dräger**

**Technology for Life**

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck

Klienci korzystający ze stanowisk Perseus A500

czerwiec 2024 r.

**Suplement do instrukcji obsługi  
stanowisk Perseus A500**

Szanowni użytkownicy stanowisk Perseus A500,

w naszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa z grudnia 2023 r. informowaliśmy, że do spontanicznego wyłączenia się stanowisk do znieczulania Perseus A500 dochodziło na skutek awarii wewnętrznego akumulatora zapasowego podczas pracy urządzenia Perseus w sytuacji braku zasilania sieciowego.

Treść tej informacji dotyczącej bezpieczeństwa została obecnie włączona do suplementu do instrukcji obsługi urządzenia Dräger Perseus A500, o którym mowa w temacie niniejszego pisma.

W załączeniu do pisma znajdują Państwo suplement do instrukcji obsługi stanowiska Perseus A500, do którego należy się stosować.

Oznacza to, że nie muszą już Państwo przechowywać otrzymanej wcześniej informacji dotyczącej bezpieczeństwa.

Należy upewnić się, że wszyscy użytkownicy urządzenia Dräger Perseus A500 oraz inne osoby w Państwa organizacji zapoznają się z niniejszymi informacjami.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Dräger.

Dziękujemy za okazywane wsparcie i przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane przedmiotowym działaniem.

Dräger Medical Germany GmbH  
Moisinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Niemcy  
Adres pocztowy:  
23542 Lübeck, Niemcy  
Tel.: +49 800 882 882 0  
Faks: +49 451 882-72002  
dsc@draeger.com  
www.draeger.com

Dane bankowe:  
Commerzbank AG, Lubeka  
IBAN DE97 2304 0022 0013 4270 00  
BIC COBADEFF230  
  
Sparkasse Lübeck  
IBAN DE36 2305 0101 0001 0655 98  
BIC NOLADE21SPL

Siedziba: Lubeka  
Rejestr handlowy:  
Sąd Rejonowy w Lubecie  
HRB 4310 HL  
Nr VAT: DE812362926  
Nr rej. WEEE: DE83436992

Prezes Zarządu:  
Robert Pannwitz

Dyrektorzy generalni:  
Andreas Kendzierski  
Christian Riep







Z poważaniem,  
/-/ podpis nieczytelny

Daniel Wolansky  
globalny kierownik produktu  
Jednostka biznesowa: Terapia, Anestezjologia  
Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck

Załącznik

Ja, mgr **Krzysztof Pasiewicz**, **Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, TP/209/05**,  
zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku  
angielskim. Niniejszy dokument został sporządzony bez żadnych poprawek i uzupełnień.  
Wszystkie logo, znaki towarowe i nazwy handlowe użyte w dokumencie wyłącznie w celu poglądowym należą do ich odpowiednich właścicieli  
Bydgoszcz, dnia **28 czerwca 2024**, nr repertorium **1268 /24**

Tłumaczono w CLKP.PL Spółka z o.o.  85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22/2

  +48 52 / 322-89-50  [www.clkp.pl](http://www.clkp.pl)



**CLKP.pl**  
**TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY**  
**JĘZYKA ANGIELSKIEGO**  
mgr Krzysztof Pasiewicz  
ul. 3 Maja 22/2, 85-016 Bydgoszcz