



PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

GE Healthcare

GE Healthcare IT
540 W. Northwest Hwy
Barrington, IL 60010
USA

Znak wewn. GE Healthcare: FMI 85253

11 września 2012

Do: Dyrektora/Kierownika Oddziału Radiologii
Administradora Szpitala
Ordynatora Oddziału Radiologii
Administradora RIS

DOTYCZY: Utraty ręcznie wpisanych informacji, kiedy po uruchomieniu systemu rozpoznawania głosu użytkownik wybierze sporządzi raport ręcznie

Ostatnio firma GE Healthcare wykryła problem funkcjonowania systemu rozpoznawania głosu w trybie interaktywnym systemu Centricity RIS-i. Należy upewnić się, że wszyscy użytkownicy tych urządzeń w Państwa jednostce zapoznali się z treścią niniejszego powiadomienia oraz z zalecanymi działaniami.

Prosimy upewnić się, że wszyscy potencjalni użytkownicy w placówce zostali poinformowani o tym powiadomieniu dotyczącym bezpieczeństwa oraz o zalecanych działaniach.

Problem dotyczący bezpieczeństwa

Zidentyfikowano problem dotyczący rozpoznawania głosu w systemie raportowania RIS-i w połączeniu z interaktywnym trybem dyktowania. Kiedy użytkownik uruchomi aplikację dyktowania i zamiast dyktować, ręcznie zmieni treść raportu oraz zapisze go w pamięci (pisząc, czytając, czytając wspólnie lub zatwierdzając), tekst wpisany ręcznie od momentu uruchomienia aplikacji dyktowania online oraz zapisania raportu zostanie utracony (tzn. zapisana zostanie w pamięci treść zapisana uprzednio). Utrata treści nie jest oczywista dla użytkownika.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Po uruchomieniu aplikacji do dyktowania online nie należy ręcznie pisać raportu. Należy się upewnić, że aplikacja do dyktowania online jest zamknięta przed rozpoczęciem ręcznej edycji tekstu.

Dane szczegółowe problematycznego produktu

Wersje oprogramowania GE Centricity RIS-i: 4.1.26, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.24, 4.2.25 i 4.2.26

Korekta dotycząca produktu

Aby rozwiązać powyższy problem firma GE wprowadzi stałe rozwiązanie.

Do czasu udostępnienia stałego rozwiązania problemu należy zastosować się do podanych powyżej instrukcji bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań związanych z powyższą "Informacją dotyczącą bezpieczeństwa produktu" bądź z określeniem zakresu objętych nią produktów, uprzejmie prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub serwisu GE.


GE Healthcare potwierdza, iż niniejszy dokument został przekazany do wiadomości odpowiednich organów państwowych.

Pragniemy zapewnić, że utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowi dla nas najwyższy priorytet. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o natychmiastowy kontakt.

Dziękujemy!



Russell Roberson, PhD, P.E.
Wiceprezes QARA
GE Healthcare IT

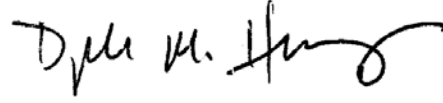

Douglas M. Hansell, M.D., MPH
Dyrektor ds. Medycznych
GE Healthcare