

Warszawa, 14 stycznia 2013

Informacja dotycząca bezpieczeństwa dekontaminacji TJF-Q180V

Szanowni Państwo,

w związku z przypadkami nieprawidłowej dezynfekcji wideoduodenoskopu TJF-Q180V firmy Olympus, i mając na uwadze, jak ważny w całym procesie dekontaminacji jest etap mycia wstępnego, zwracamy się do Państwa z prośbą o:


- dokładne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi w instrukcji dekontaminacji TJF-Q180V;
- zwrócenie uwagi na czynności opisane w załączonej, dodatkowej instrukcji mycia wstępnego, a w szczególności te dotyczące końcówki i elewatora wideoduodenoskopu.

Jednocześnie, pragniemy przypomnieć Państwu, że, podobnie jak pozostałe endoskopy firmy Olympus, również TJF-Q180V przed każdym użyciem, powinien zostać odpowiednio przygotowany i poddany szczegółowemu przeglądowi przez użytkownika. Jeżeli zaobserwują Państwo jakiegokolwiek usterki lub nieregularności, prosimy o nieużywanie endoskopu i kontakt z firmą Olympus w celu zdiagnozowania uszkodzeń i podjęcia decyzji o naprawie. Użycie niesprawnego endoskopu jest niebezpieczne dla pacjenta i operatora oraz może doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń urządzenia.

Więcej informacji dotyczących przygotowania wideoduodenoskopu TJF-Q180V znajdują Państwo w instrukcji obsługi, w rozdziale trzecim „Przygotowanie i przegląd”. Jednocześnie informujemy, że na Państwa życzenie możemy przekazać dodatkowe egzemplarze instrukcji obsługi oraz instrukcji mycia wstępnego.

Jesteśmy przekonani, że powyższe informacje okażą się Państwu pomocne, a w przypadku dalszych pytań lub potrzeby zorganizowania dodatkowego szkolenia z zakresu przygotowania i poprawnej obsługi posiadanego przez Państwa TJF-Q180V firmy Olympus, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym naszej firmy

Z poważaniem,

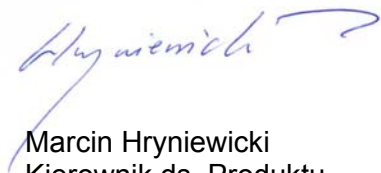

Marcin Hryniewicki
Kierownik ds. Produktu
Dział Endoskopów Medycznych

Formularz Odpowiedzi

Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa

fax: +48 22 831 04 53

email: endoskopy.polska@olympus-europa.com

Informacja dotycząca bezpieczeństwa dekontaminacji TJF-Q180V

Szanowni Państwo,

Niniejszym potwierdzamy otrzymanie od Państwa listu. Zobowiązujemy się do przekazania stosownym działom, których ta informacja dotyczy.

Nazwisko i imię _____

Szpital _____

Oddział _____

Ulica _____

Kod pocztowy/ Miasto _____

Data



Podpis

TJF TYPE Q180V

1



2

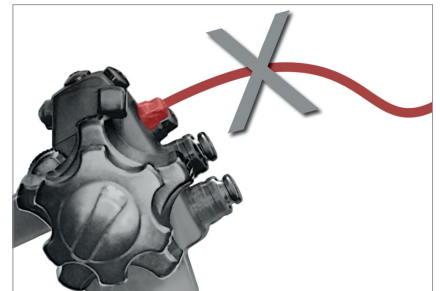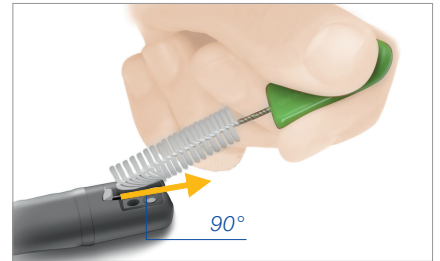

3

