

## Ważna informacja dla odbiorców dotycząca bezpieczeństwa

### SYSTEM PARAWANÓW SILENTIA

Data:	26.06.2012
Produkty:	Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu parawanów Silentia
Rodzaj koniecznych działań:	Wprowadzenie zmiany we wskazówkach dotyczących użytkowania

#### Informacje ogólne

Pojawił się problem wynikający stąd, że w niektórych modelach łóżek ich elementy mogą się dostać pod parawan, gdy łóżko jest opuszczone. Gdy elementy te podnoszą się wraz z łóżkiem, istnieje ryzyko wywierania przez łóżko dużego nacisku na parawan, przez co pojawia się niekorzystne oddziaływanie na jego uchwyty. W wyniku tego parawan może ulec obluźnieniu i przewrócić się. Przewrócenie się parawanu może nastąpić od razu lub przy późniejszym poruszeniu lub wykorzystaniu. W tym roku kilkakrotnie miały miejsce przypadki przewrócenia się parawanu z tego właśnie powodu. Choć nikt nie odniósł obrażeń w wyniku tych zdarzeń, postanowiliśmy zamieścić w instrukcji obsługi stosowne ostrzeżenie, jak poniżej. Największe zagrożenie zdaje się występować w przypadku łóżek podnoszonych i opuszczanych elektrycznie.

#### Porada dla użytkownika



Prosi się użytkowników, by zwrócili baczną uwagę na poniższe ostrzeżenie zamieszczone w instrukcji obsługi.

**Przed podniesieniem łóżka znajdującego się w pobliżu parawanu należy dokładnie sprawdzić, czy jakiegokolwiek elementy łóżka nie znajdują się pod parawanem. Siła, z jaką oddziałuje łóżko, może uszkodzić parawan, akcesoria i/lub zamocowanie.**

**W konsekwencji parawan może się przewrócić, powodując obrażenia pacjentów lub personelu.**

W celu umożliwienia identyfikacji parawanów Silentia są oznaczone logiem Silentia znajdującym się na produkcie.





## Rozpropagowanie niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Niniejszą informację dotyczącą bezpieczeństwa należy rozesłać do wszystkich zainteresowanych osób w Państwa instytucji oraz ewentualnie do przedstawicieli innych instytucji, do których wysłane zostały produkty mogące stwarzać zagrożenie. Prosimy o wypełnienie (i powielenie w razie potrzeby) załączonego potwierdzenia odbioru i przesłanie do miejscowego punktu sprzedaży w ciągu 30 dni.

### Kontakt:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z miejscowym punktem sprzedaży lub producentem.

#### Punkt sprzedaży:

Eres Medical sp. z o.o.  
Plouszowice Kol 64 B  
PL-21-008 Tomaszowice  
Polska

telefon      +48 81 5020 07018  
faks            +48 81 5020 07020  
email:        [info@eresmedical.com.pl](mailto:info@eresmedical.com.pl)

#### Producent:

Silentia AB  
Box 108  
SE-311 22 Falkenberg  
Szwecja

telefon      +46(0)346 485 80  
faks            +46(0)346 485 89  
email:        [qc@silentia.se](mailto:qc@silentia.se)

O wysłaniu niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa poinformowano właściwy organ administracji.

Przepraszamy za niedogodności wynikające z niniejszej informacji i mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania spotkają się z Państwa zrozumieniem.

Örjan Göranson — Dyrektor Wykonawczy

### Załącznik

Formularz potwierdzenia



## Potwierdzenie

Niniejszym potwierdzam, że \_\_\_\_\_ (nazwa instytucji) otrzymał/a ważną informację dotyczącą bezpieczeństwa wysłaną przez Silentia AB w dniu 26.06.2012 i informacja ta została przekazana zgodnie z instrukcją.

\_\_\_\_\_ (nazwisko, stanowisko)

\_\_\_\_\_ (miejscowość, data)

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą zwykłą do Eres Medical:

email: [info@eresmedical.com.pl](mailto:info@eresmedical.com.pl)  
faks: +48 81 5020 07020  
Adres: Eres Medical sp. z o.o.  
Plouszowice Kol 64 B  
PL-21-008 Tomaszowice  
Polska