

Medseven sp. z o.o.
ul. Kurpińskiego 12/12a
85-092 Bydgoszcz
NIP: 554-278-54-31

Bydgoszcz, dnia 2.07.2012r

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące wyrobów, których dotyczy notatka:

Respiratory firmy Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG, HAMBURG, NIEMCY.

Modele VENTiLogic LS i VENTiLogic plus nowej generacji, o numerach seryjnych powyżej 10.000

Opis problemu:

Firma Weinmann dbając o bezpieczeństwo pacjentów cały czas testuje urządzenia, podczas ostatniego wewnętrznego testu urządzeń wykryto nieprawidłowe działanie respiratorów VentiLogic LS i VentiLogic Plus o numerach seryjnych powyżej 10.000. Pod wpływem różnych okoliczności wskaźnik naładowania baterii znajdujący się na wyświetlaczu urządzenia może wskazywać wartości różniące się od faktycznego stanu naładowania baterii wewnętrznej oraz dodatkowej.

Korekta problemu:

Problem może być rozwiązany poprzez zaktualizowanie oprogramowania poprzez zainstalowanie nowej wersji z oznaczeniem V2.05. Nowe oprogramowanie zapewni poprawne wyświetlanie faktycznego stanu naładowania baterii wewnętrznej oraz dodatkowej. We wszystkich respiratorach VentiLogic LS i VentiLogic Plus musi być zainstalowane oprogramowanie w wersji V2.05 możliwie jak najszybciej.

Prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z serwisem dystrybutora urządzeń firmy Weinmann GMBH w Polsce.:

Medseven Sp. z o.o.
Ul. Powstańców 6
86-050 Solec Kujawski
Tel. +48 668-258-404 lub +48 601-160-356

e-mail: info@medseven.eu

