

## PENTAX

**PENTAX Europe GmbH**  
Julius-Vosseler-Str. 104  
22527 Hamburg • Niemcy  
Tel. +49 (0)40 • 561 92 - 0  
Fax +49 (0)40 • 561 92 - 247  
[www.pentax.de](http://www.pentax.de)

### **PILNE POWIADOMIENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA**

Zawiadomienie wydane przez PRODUCENTA odnośnie bezpiecznego użytkowania następujących urządzeń:

Lampy PENTAX BS-LH1; BS-LH2; BS-LL1

06.09.2010

**Nadawca:**

PENTAX Europe GmbH Julius-  
Vosseler-Str. 104  
22527 Hamburg - Niemcy

**Adresaci:**

Użytkownicy i operatorzy

**Dane dotyczące urządzeń:**

- Lampa halogenowa PENTAX BS-LH 1
- Lampa halogenowa PENTAX BS-LH 2
- Lampa LED PENTAX BS-LL 1

**Opis problemu:**

Spółka „HOYA Corporation PENTAX Life Care Division” otrzymała ostatnio raport z wypadku, który miał miejsce w szpitalu w Chinach. Podczas rutynowego badania doszło do eksplozji baterii litowej zamontowanej w lampie halogenowej PENTAX BS-LH2, co spowodowało poważne obrażenia ciała użytkownika, w tym poparzenie rogówki lewego oka. Nie stwierdzono obrażeń ciała pacjenta.

Nasze śledztwo ujawniło, że bateria używana w tym szpitalu nie była baterią określoną w podręczniku użytkownika lampy BS-LH2. Poniżej podajemy modele baterii, które zostały zatwierdzone do bezpiecznego użytkowania z lampami PENTAX:

DURACELL DL 123A

PANASONIC CR 123A

SANYO CR 123A

## **PENTAX**

**PENTAX Europe GmbH**  
Julius-Vosseler-Str. 104  
22527 Hamburg • Niemcy  
Tel. +49 (0)40 • 561 92 - 0  
Fax +49 (0)40 • 561 92 - 247  
[www.pentax.de](http://www.pentax.de)

### **Czynności podejmowane przez adresatów:**

Prosimy zapewnić, aby podczas użytkowania lamp PENTAX (BS-LH1/BS-LH2/BS-LL1) były przestrzegane instrukcje podane w podręczniku użytkownika, a w szczególności były stosowane wyłącznie odpowiednie baterie litowe. Jeśli obecnie używają Państwo baterie inne, niż określone powyżej, prosimy je niezwłocznie wymienić.

Podczas używania baterii litowych należy zachować ostrożność. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do przegrzania baterii lub nawet eksplozji. Prosimy raz jeszcze o szczególną ostrożność podczas używania tych baterii.

### **Dalsze informowanie:**

Prosimy zapewnić, aby wszyscy użytkownicy wymienionych powyżej urządzeń oraz inne osoby mające z nimi kontakt, zostały poinformowane o otrzymaniu niniejszego Powiadomienia. Jeśli urządzenia zostały sprzedane stronom trzecim, prosimy o przesłanie tego Powiadomienia również do nich.

Uprzejmie prosimy o zachowanie tych informacji do chwili zakończenia wszystkich czynności.

### **Osoba kontaktowa:**

**Agnieszka Urbańska**

**Varimed Sp. z o. o.**

**53-332 Wrocław**

**ul. Powstańców Śląskich 5**

Telefon: +48 (0)65 529 36 89 (godziny przyjęć: 8:00 – 16:00)

Faks: +49 (0)65 520 99 78

E-Mail: [agnieszka.urbanska@varimed.com.pl](mailto:agnieszka.urbanska@varimed.com.pl)