


SKRÓCONY PODRĘCZNIK PACJENTA

ŁADOWARKA INTELLIS™ MODEL 97755

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I PIELĘGNACJI

Implantowany neurostymulator firmy Medtronic wymaga ładowania w celu nieprzerwanego prowadzenia terapii. Poniższe wytyczne pomagają w konserwacji i pielęgnacji użytkowanego urządzenia. Należy z nim postępować ostrożnie i z dbałością. Dodatkowe instrukcje, środki ostrożności i informacje na temat sposobu kontaktowania się z firmą Medtronic, jeśli jest to wymagane, zawierają dostarczane wraz z urządzeniem ulotki dotyczące kontrolera i ładowarki, z których treścią należy się zapoznać.

WYKAZ CZĘŚCI SKŁADOWYCH ŁADOWARKI

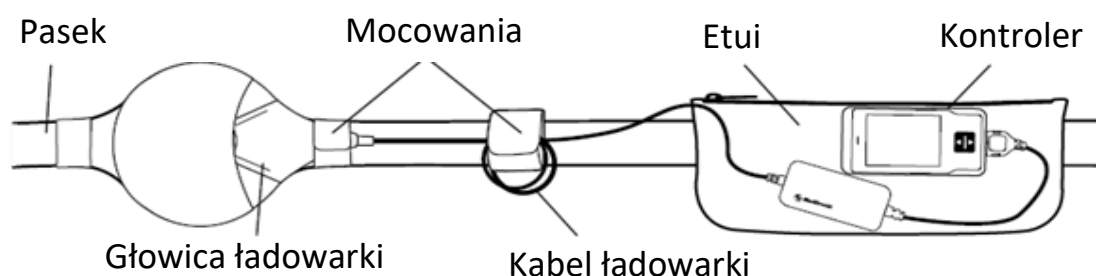

CZYNNOŚCI ZALECANE

- Podczas ładowania implantu korzystać z paska. Jego zadaniem jest podtrzymywanie i zabezpieczanie ładowarki i kabla.
- Jeśli w danej chwili nie jest on dostępny, między skórą a ładowarką umieścić tkaninę przepuszczającą powietrze (np. kawałek bawełny).
- Jeśli temperatura ładowarki jest zbyt wysoka, obniżyć prędkość ładowania i robić przerwy podczas dłuższych sesji ładowania.
- Okresowo sprawdzać kabel pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Przechowywać ładowarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdzać skórę podczas ładowania pod kątem zaczerwienienia.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- NIE siadać i nie kłaść się na ładowarce ani nie wywierać na nią nadmiernego nacisku.
- NIE upuszczać, nie uderzać ani nie przydeptywać części składowych.
- NIE owijać, nie skręcać ani nie zaginać kabla wokół ładowarki.
- NIE ciągnąć za kabel ani za niego nie szarpać. Przy zmianie umiejscowienia ładowarki chwycić za pasek i zmienić jej umiejscowienie za pomocą paska.