

POLSKI

Dodatek

Informacje podane w niniejszym dodatku uzupełniają treści zawarte w Podręczniku użytkownika oraz Podręczniku dla lekarza.

Używanie baterii wewnętrznej

⚠ OSTRZEŻENIE

- Bateria wewnętrzna nie jest przewidziana do stosowania jako podstawowe źródło zasilania. Powinna być używana wyłącznie wtedy, kiedy inne źródła nie są dostępne lub, jeśli jest to konieczne, przez krótki czas, na przykład podczas zmiany źródła zasilania.
- W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemu z zewnętrzną baterią respirator Astral włączy alarm i powiadomi użytkownika, że urządzenie jest zasilane przez wewnętrzną baterię. Wentylacja będzie kontynuowana, użytkownicy powinni jednak jak najszybciej podłączyć urządzenie do alternatywnego zewnętrznego źródła zasilania (np. zasilania prądem zmiennym).