

**PILNE — Korekta urządzenia medycznego**

**Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP**

**Awaria hamulca pionowego**

Szanowni Państwo,

W urządzeniach wymienionych powyżej wykryto problem, którego występowanie może stanowić potencjalne ryzyko dla pacjentów lub użytkowników.

Niniejsze informacje na temat bezpieczeństwa mają na celu poinformowanie:

- na czym polega problem i w jakich sytuacjach może się pojawić;
- jakie działania powinien podjąć klient/użytkownik w celu wyeliminowania ryzyka dla pacjentów lub użytkowników;
- jakie działania zaplanowała firma Philips w celu rozwiązania tego problemu.

**Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące dalszego bezpiecznego i właściwego użytkowania sprzętu medycznego.**

Należy przekazać poniższe informacje wszystkim członkom personelu, którzy powinni się z nimi zapoznać. Istotne jest zrozumienie implikacji wynikających z niniejszego powiadomienia.

Prosimy o dołączenie egzemplarza niniejszego dokumentu do instrukcji obsługi sprzętu medycznego.

Firma Philips otrzymała zgłoszenia informujące o nieprawidłowym działaniu śrub mocujących hamulec pionowy.

W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy w związku z opisanym działaniem korekcyjnym prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub biurem firmy Philips Healthcare:

Philips Polska Sp. z o.o.

Philips Healthcare Dział Serwisu

Tel. 22 571 01 11; e-mail: [serwis.medyczny@philips.com](mailto:serwis.medyczny@philips.com)

Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady proszeni są o kontakt telefoniczny z biurem obsługi klienta ds. rozwiązań technicznych (1 800 722 9377, opcja 5: należy wprowadzić identyfikator ośrodka lub postępować zgodnie z poleceniami).

Niniejsze powiadomienie zostało przekazane właściwym instytucjom nadzorującym.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

Z poważaniem,

Michael McAndrew

Starszy dyrektor ds. jakości i zgodności z przepisami



## PILNE — Korekta urządzenia medycznego

**Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP**

### Awaria hamulca pionowego

<b>PRODUKTY, KTÓRYCH DOTYCZY TEN DOKUMENT</b>	<p>Problem dotyczy tomografów komputerowych wymienionych poniżej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomografy z serii Brilliance: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6</li> <li>○ 10</li> <li>○ 16</li> <li>○ 16 Power</li> <li>○ 40</li> <li>○ 64</li> <li>○ CT Big Bore</li> <li>○ CT Big Bore Oncology</li> </ul> </li> <li>• iCT</li> <li>• iCT SP</li> <li>• Ingenuity Core</li> <li>• Ingenuity CT</li> <li>• i MX8000 Dual v. EXP</li> </ul>
<b>OPIS PROBLEMU</b>	<p>Firma Philips Healthcare otrzymała zgłoszenia informujące o nieoczekiwanym obniżeniu się stołu w momencie, gdy znajdował się na nim pacjent. Firma Philips ustaliła, że przyczyną tego zdarzenia była awaria pionowego hamulca mechanizmu stołu pacjenta spowodowana kruchością tworzywa, z którego wykonane zostały śruby hamulca pionowego.</p>
<b>RYZIKO</b>	<p>Awaria hamulca pionowego może wystąpić wtedy, gdy stół, na którym znajduje się pacjent, jest w pozycji uniesionej. Mimo iż nie zgłoszono wystąpienia jakichkolwiek poważnych urazów, w przypadku awarii hamulca pionowego i nagłego obniżenia się stołu istnieje możliwość doznania przez pacjenta, technika oraz osób stojących w pobliżu urządzenia obrażeń ciała w wyniku uderzenia.</p>
<b>ROZPOZNAWANIE PRODUKTÓW</b>	<p>Jeśli otrzymali Państwo niniejsze powiadomienie, oznacza to, że korzystają Państwo z opisywanych tu produktów. W „Załączniku A” znajduje się lista numerów seryjnych tomografów komputerowych, których dotyczy ten dokument. Numer seryjny można znaleźć na tylnym panelu gantry, w jego dolnej części.</p>
<b>DZIAŁANIA, JAKIE POWINIEN PODJĄĆ KLIENT/UŻYTKOWNIK</b>	<p>W przypadku nieoczekiwanego obniżenia się stołu pacjenta należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z lokalnym inżynierem serwisu.</p>
<b>DZIAŁANIA ZAPLANOWANE PRZEZ FIRMĘ PHILIPS</b>	<p>Inżynier serwisu firmy Philips usunie usterkę poprzez naprawę lub wymianę hamulca w aparacie użytkowanym przez Klienta.</p>



**PILNE — Korekta urządzenia medycznego**

**Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP**

**Awaria hamulca pionowego**

<p><b>DALSZE INFORMACJE I POMOC TECHNICZNA</b></p>	<p>W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy w związku z opisanym problemem prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub z Biurem Obsługi Klienta Philips Healthcare:                  Philips Polska Sp. z o.o.                  Philips Healthcare Dział Serwisu                  Tel. 22 571 01 11;                  e-mail: <a href="mailto:serwis.medyczny@philips.com">serwis.medyczny@philips.com</a>                  Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa</p> <p>Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady proszeni są o kontakt telefoniczny z biurem obsługi klienta ds. rozwiązań technicznych (1 800 722 9377, opcja 5: należy wprowadzić identyfikator ośrodka lub postępować zgodnie z poleceniami).</p>
--	--

**Załącznik A**

Numery seryjne tomografów z serii Brilliance CT 6, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728256, nr seryjny:

3001,3016,3019,3020,3025,3026,3030,3057,3058,3060,3071,3073,3074,3076,3080,3090,3095,3108,3114,3119,3124,3138,3151,3155,3167,3168,3174,3178,3186,3187,3192,3193,3196,3208,3210,3212,3213,3214,3218,3226,3245,3257,3264,3267,3269,3273,3274,3275,3281,3284,3289,3291,3296,3304,3306,3309,3313,3317,3327,3331,3336,3337,3339,3340,3341,3342,3344,3345,3346,3347,3348,3349,3350,3351,3352,3354,3355,3356,3357,3358,3359,3360,3361,3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3378,3379,3380,3381,3382,3383,3384,3385,3386,3387,3388,3389,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3400,3402,3403,3404,3405,3406,3408,3409,3410,3411,3412,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,3423,3424,3425,3426,3427,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3437,3438,3439,3440,3441,3443,3444,3445,3447,3449,3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3460,3461,3462,3463,3464,3465,3466,3467,3468,3469,3470,3471,3472,3473,3474,3475,3476,3477,3478,3479,3480,3481,3482,3483,3484,3485,3486,3487,3488,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3497,3498,3499,3500,3501,3502,3503,3504,3505,3506,3507,3508,3509,3510,3511,3512,3513,3514,3515,3516,3517,3518,3519,3520,3521,3522,3523,3524,3525,3526,3527,3528,3529,3530,3531,3532,3533,3534,3535,3536,3537,3538,3539,3540,3541,3542,3543,3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551,3552,3553,3554,3555,3556,3557,3558,3559,3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3568,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,3576,3577,3578,3579,3580,3581,3582,3583,3584,3585,3586,3587,3588,3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598,3599,3600,3601,3602,3603,3604,3605,3606,3607,3608,3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621,3622,3623,3624,3625,3626,3627,3628,3629,3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3637,3638,3639,3640,3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,3658,3659,3660,3661,3663,3664,3665,3666,3667,3668,3669,3670,3671,3672,3673,3674,3675,3676,3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3693,3694,3695,3696,3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703,3704,3705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,3713,3714,3715,3716,3717,3718,3719,3720,3721,3722,6039,6040,30003,30004,30006,30007,30008,30009,30012,30013,



**PILNE — Korekta urządzenia medycznego**

**Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP**

**Awaria hamulca pionowego**

30015,30016,30021,30026,30028,30029,30030,30031,30036,30037,30038,30039,30046,30047,30050,30053,30054,30057,30060,30062,30065,30066,30072,30073,30075,30078,30079,30082,30083,30089,30090,30094,30100,30101,30103,30105,30109,30110,30111,30117,30118,30120,30122,30124,30125,30126,30128,30129,30130,30131

Numery seryjne tomografów z serii Brilliance CT 10, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728251, nr seryjny:

3008,3098,4006,4007,4010,4011,4012,4016,4023,4031,4039,4050,4058,4061,4062,4063,4064,4065,4066,4067,40004,40005,40006,40007,40008,40009,40010,40011,40012,40014,40015,40016,40017,40018,40021,40025,40028,40030,40032

Numery seryjne tomografów z serii Brilliance CT 16, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728246, nr seryjny:

3012,3013,3015,3017,3023,3027,3031,3043,3070,3072,3160,3185,3189,3191,3224,3295,3448,4018,4019,4024,4025,4043,4051,5001,5005,5006,5007,5013,5014,5016,5019,5022,5023,5024,5025,5028,5029,5032,5034,5036,5038,5046,5051,5052,5053,5055,5058,5059,5061,5063,5064,5069,5070,5074,5075,5077,5083,5086,5097,5102,5105,5106,5107,5108,5110,5111,5112,5113,5115,5116,5117,5119,5122,5123,5124,5125,5127,5130,5136,5137,5138,5139,5141,5143,5150,5151,5156,5158,5161,5169,5174,5179,5183,5184,5187,5188,5190,5195,5198,5202,5207,5211,5215,5217,5218,5220,5221,5224,5226,5228,5229,5230,5234,5249,5250,5252,5254,5265,5270,5274,5278,5282,5283,5285,5286,5287,5290,5291,5295,5296,5299,5309,5313,5315,5316,5317,5318,5319,5323,5328,5329,5331,5334,5343,5364,5365,5366,5367,5370,5371,5372,5375,5376,5377,5378,5379,5380,5381,5382,5383,5384,5385,5386,5387,5388,5389,5391,5392,5393,5394,5396,5397,5398,5399,5400,5401,5402,5403,5404,5405,5406,5407,5408,5409,5410,5411,5412,5414,5415,5416,5417,5418,5419,5420,5421,5422,5423,5424,5425,5426,5427,5428,5429,5432,5433,5434,5435,5437,5438,5439,5441,5442,5443,5444,5446,5447,5448,5449,5450,5451,5453,5457,5458,5459,5460,5461,5462,5463,5464,5466,5468,5471,5473,5474,5477,5478,5479,5480,5481,5482,5484,5485,5486,5487,5488,5489,5490,5491,5492,5493,5494,5496,5497,5498,5501,5502,5503,5504,5505,5506,5507,5508,5509,5510,5511,5513,5514,5515,5516,5517,5518,5519,5520,5522,5523,5524,5525,5526,5528,5530,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,5541,5542,5543,5544,5545,5546,5547,5548,5549,5550,5551,5552,5553,5554,5555,5556,5557,5558,5559,5560,5561,5562,5563,5564,5565,5566,5567,5568,5569,5570,5571,5572,5573,5574,5575,5576,5577,5578,5579,5580,5581,5582,5583,5584,5585,5586,5587,5588,5589,5590,5591,5592,5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599,5600,5601,5602,5603,5604,5605,5606,5607,5608,5609,5610,5611,5612,5613,5614,5615,5616,5617,5618,5619,5620,5621,5622,5623,5624,5625,5626,5627,5628,5629,5630,5631,5632,5633,5634,5635,5636,5637,5638,5639,5640,5641,5642,5643,5644,5645,5646,5647,5648,5649,5650,5651,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,5663,5664,5665,5666,5667,5668,5669,5670,5671,5672,5673,5674,5675,5676,5677,5678,5679,5680,5681,5682,5683,5684,5685,5686,5687,5688,5689,5690,5691,5692,5693,5694,5695,5696,5697,5698,5699,5700,5701,5702,5703,5704,5705,5706,5707,5708,5709,5710,5711,5712,5713,5714,5715,5716,5717,5718,5719,5720,5721,5722,5723,5724,5727,5728,5729,5730,5731,5732,5733,5734,5735,5736,5737,5738,5739,5740,5741,5742,5743,5744,5745,5746,5747,5748,5749,5750,5751,5752,5753,5754,5755,5756,5757,5758,5759,5760,5761,5762,5763,5764,5765,5766,5767,5768,5769,5770,5771,5772,5773,5774,5775,5776,5777,5778,5779,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,5789,5790,5791,5792,5793,



**PILNE — Korekta urządzenia medycznego****Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP****Awaria hamulca pionowego**

5794,5795,5796,5797,5798,5799,5800,5801,5802,5803,5804,5805,5806,5807,5808,5809,5810,5811,5812,5813,5814,5815,5816,5817,5818,5819,5820,5821,5822,5823,5824,5825,5826,5827,5828,5829,5830,5831,5832,5833,5834,5835,5836,5837,5838,5839,5840,5841,5842,5843,5844,5845,5846,5847,5848,5849,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5856,5857,5858,5859,5860,5861,5862,5863,5864,5865,5866,5867,5868,5869,5870,5871,5872,5873,5874,5875,5876,5877,5878,5879,5880,5881,5882,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5889,5890,5891,5892,5893,5894,5895,5896,5897,5898,5899,5900,5901,5902,5903,5904,5905,5906,5908,5909,5910,5911,5912,5913,5914,5915,5916,5917,5918,5919,5920,5921,5922,5923,5924,5925,5926,5927,5928,5929,5930,5931,5932,5933,5934,5935,5936,5937,5938,5939,5940,5941,5942,5943,5944,5945,5946,5947,5948,5949,5950,5951,5952,5953,5954,5955,5956,5957,5958,5959,5960,5961,5962,5963,5964,5965,5966,5967,5968,5969,5970,5971,5972,5973,5974,5975,5976,5977,5978,5979,5980,5981,5982,5983,5984,5985,5986,5987,5988,5989,5990,5991,5992,5993,5994,5995,5996,5997,5998,5999,6000,6001,6002,6003,6004,6005,6006,6008,6009,6010,6011,6012,6013,6014,6015,6016,6017,6018,6020,6021,6022,6023,6024,6025,6026,6027,6028,6029,6030,6031,6032,6033,6034,6035,6036,6037,6038,6039,6040,6041,6042,6043,6044,6045,6046,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6053,6054,6055,6056,6057,6058,6059,6060,6061,6062,6063,6064,6065,6066,6067,6068,6069,6070,6071,6072,6073,6074,6075,6076,6077,6078,6079,6080,6081,6082,6083,6084,6085,6086,6087,6088,6089,6090,6091,6092,6093,6094,6095,6096,6097,6098,6099,6100,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6121,6122,6123,6124,6125,6126,6127,6128,6129,6130,6131,6132,6133,6134,6135,6136,6137,6138,6139,6140,6141,6142,6143,6144,6145,6146,6147,6148,6149,6150,6151,6152,6153,6154,6155,6156,6157,6158,6159,6160,6162,6163,6165,6166,6167,6168,6169,6170,6171,6172,6173,6174,6175,6176,6177,6178,6179,6180,6181,6182,6183,6184,6185,6186,6187,6188,6189,6190,6191,6192,6193,6194,6195,6196,6197,6198,6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218,6219,6220,6221,6222,6223,6224,6225,6226,6227,6228,6229,6230,6231,6232,6233,6234,6235,6236,6237,6238,6239,6240,6241,6242,6243,6244,6245,6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6259,6260,6261,6263,6264,6265,6266,6267,6270,6271,6272,6273,6274,6275,6276,6277,6278,6279,6280,6281,6282,6283,6284,6285,6286,6287,6288,6289,6290,6291,6292,6293,6294,6295,6296,6297,6298,6299,6300,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312,6313,6314,6315,6316,6317,6318,6319,6320,6321,6322,6323,6324,6325,6326,6327,6328,6329,6330,6331,6332,6333,6334,6335,6336,6337,6338,6340,6341,6342,6343,6344,6345,6346,6347,6348,6349,6350,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6358,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367,6368,6369,6370,6371,6372,6373,6374,6375,6376,6377,6378,6379,6380,6382,6383,6384,6385,6386,6387,6388,6389,6392,6393,6394,6395,6397,6398,6399,6400,6401,6402,6403,6404,6405,6406,6407,6408,6409,6410,6411,6412,6413,6414,6415,6416,6417,6418,6419,6420,6421,6422,6423,6424,6425,6426,6427,6428,6429,6430,6431,6432,6433,6434,6435,6436,6437,6438,6439,6440,6441,6442,6443,6444,6445,6446,6447,6448,6449,6450,6451,6452,6453,6454,6455,6456,6457,6458,6459,6460,6461,6462,6463,6464,6465,6466,6467,6468,6469,6470,6471,6472,6473,6474,6475,6476,6477,6478,6479,6480,6481,6482,6483,6484,6485,6486,6487,6488,6489,6490,6491,6492,6493,6494,6495,6496,6497,6498,6499,6500,6501,6502,6503,6504,6505,6506,6507,6508,6509,30019,30041,30044,30067,30069,30070,30071,30097,30119,40002,40022,40027,40035,50002,50003,50004,50009,50010,50011,50013,50014,50015,50018,50022,50023,50029,50031,50032,50033,50035,50036,50041,50042,50044,50045,50046,50049,50050,50051,50052,50055,50058,50059,50061,50062,50063,50064,50065,50066,50068,50069,50070,50073,50074,50078,50080,50081,50082,50083,



**PILNE — Korekta urządzenia medycznego**

**Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP**

**Awaria hamulca pionowego**

50084,50086,50087,50089,50090,50091,50092,50093,50094,50095,50097,50098,50099,50101,50102,50103,50106,50109,50110,50114,50122,50124,50125,50126,50128,50129,50131,50132,50133,50134,50135,50136,50137,50138,50140,50141,50142,50153,50154,50155,50156,50157,50158,50159,50160,50161,50162,50163,50164,50165,50166,50167,50168,50169,50170,50171,50172,50173,50175,50176,50177,50178,50179,50180,50181,50182,50183,60015,60020

Numery seryjne tomografów z serii Brilliance CT 16 Power, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728240, nr seryjny:

5003,5043,5175,5251,5284,5373,5374,5390,5395,5413,5430,5431,5436,5440,5445,5454,5455,5456,5465,5467,5469,5470,5472,5475,5476,5483,5495,5499,5500,5512,5521,5527,5822,6006,6009,6010,6011,6013,6021,6024,6026,6027,6028,6029,6030,6031,6032,6033,6034,6035,6036,6041,6045,6046,6047,6048,6049,6054,6055,6057,6058,6059,6060,6064,6066,6067,6069,6070,6071,6072,6075,6080,6081,6082,6083,6085,6089,6090,6095,6096,6099,6100,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6112,6113,6115,6117,6119,6121,6123,6127,6129,6130,6131,6133,6134,6136,6137,6138,6139,6141,6144,6146,6148,6150,6154,6155,6156,6157,6159,6160,60002,60005,60009,60011,60012,60014,60018,60021,60022,60025,60027,60029

Numery seryjne tomografów z serii Brilliance CT 40, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728235, nr seryjny:

9031,9036,9039,9061,9085,9088,9094,9097,9103,9104,9114,9116,9125,9129,9130,9132,9144,9146,9147,9149,9152,9153,9156,9157,9164,9167,9168,9169,9170,9174,9178,9181,9183,9186,9188,9189,9190,9191,9200,9203,9211,9212,9220,9233,9260,9265,9272,29008,29010,29011,29012,29015,29017,29019,29020,29023,29024,29028,29030,29033,29042,29043,29046,29048,29051,29055,29059,29060,29061,29062,29065,29067,29070,29071,29072,29075,29077,29078,29080,29084,29085,29086,29087,29088,29089,29090,29091,29092,29093,29094,29095,29096,29097,29098,29099,29100,29101,29102,29103,29104,29105,29106,29107,29108,29109,29111,29112,29113,29114,29116,29117,29118,29119,29120,29121,29122,29123,29124,29125,29126,29127,29128,29129,29130,29131,29132,29134,29135,29136,29137,29138,29139,29140,29141,29142,29143,29144,29145,29146,29147,29148,29149,29150,29151,29152,29153,90034,90043,90046,90048,90051,90053,90056,90058,90059,90064,90065,90069,90071,90075,90076,90083,90095,90101,90103,90108,90110,90111,90121,90122,90125,90126,90128,90130,90134,90144,90145,90146,90148,90149,90153,90155,90164,90166,90171,90172,90173,90176,90178,90179,90181,90184,90186,90187,90189,90191,90192,90195,90196,90197,90200,90204,90206,90213,90214,90221,90223,90224,90225,90226,90227,90228,90229,90230,90231,90232,90233,90234,90235,90236,90237

Numery seryjne tomografów z serii Brilliance CT 64, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728231, nr seryjny:

4001,4003,4016,4021,9009,9037,9038,9041,9044,9045,9048,9049,9052,9056,9059,9062,9066,9069,9074,9075,9077,9080,9087,9089,9092,9105,9108,9118,9120,9137,9142,9143,9160,9162,9166,9175,9195,9197,9201,9202,9205,9206,9208,9214,9216,9217,9501,9502,9503,9514,9522,9526,9533,9538,9540,9541,9543,9544,9547,9552,9553,9554,9556,9561,9564,9566,9568,9569,9570,9575,9577,9578,9580,9584,9585,9586,9588,9590,9592,9596,9599,9607,9612,9615,9617,9620,9625,9627,9628,9630,



**PILNE — Korekta urządzenia medycznego****Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP****Awaria hamulca pionowego**

9640,9641,9650,9654,9659,9663,9664,9670,9672,9675,9676,9678,9684,9688,9690,9694,9695,9696,9697,9703,9706,9709,9712,9713,9714,9718,9729,9731,9735,9736,9737,9738,9740,9747,9750,9751,9758,9761,9765,9766,9767,9772,9774,9777,9780,9782,9787,9788,9792,9794,9795,9797,9805,9807,9808,9811,9812,9813,9818,9820,9822,9824,9828,9830,9833,9834,9835,9837,9838,9840,9841,9843,9846,9848,9857,9866,9870,9871,9873,9874,9877,9882,9883,9902,9909,9916,9924,9933,9939,9956,9957,9958,9959,9960,9961,9962,9963,9964,9965,9966,9967,9968,9969,9970,9971,9972,9973,9974,9975,9976,9977,9978,9979,9980,9981,9982,9983,9984,9985,9986,9987,9988,9989,9990,9991,9992,9993,9994,9995,9996,9997,9998,9999,10000,10001,10002,10003,10004,10005,10006,10007,10008,10009,10010,10011,10012,10013,10014,10015,10016,10017,10018,10019,10020,10021,10022,10023,10024,10025,10026,10027,10028,10029,10030,10031,10032,10033,10034,10035,10036,10037,10038,10039,10040,10041,10042,10043,10044,10045,10046,10047,10048,10049,10050,10051,10052,10053,10054,10056,10057,10058,10059,10060,10061,10062,10063,10064,10065,10066,10067,10068,10069,10070,10071,10072,10073,10074,10075,10076,10077,10078,10079,10080,10081,10082,10083,10084,10085,10086,10087,10088,10089,10090,10091,10092,10093,10094,10095,10096,10097,10098,10099,10100,10101,10102,10103,10104,10105,10106,10107,10108,10109,10110,10111,10112,10113,10114,10115,10116,10117,10118,10119,10120,10121,10122,10123,10124,10125,10126,10127,10128,10129,10130,10131,10132,10133,10134,10135,10136,10137,10138,10139,10140,10141,10142,10143,10144,10145,10146,10147,10148,10149,10150,10151,10152,10153,10154,10155,10156,10157,10158,10159,10160,10161,10162,10163,10164,10165,10166,10167,10168,10169,10170,10171,10172,10173,10174,10175,10176,10177,10178,10179,10180,10181,10182,10183,10184,10185,10186,10187,10188,10189,10190,10191,10192,10193,10194,10195,10196,10197,10198,10199,10200,10201,10202,10203,10204,10205,10206,10207,10208,10209,10210,10211,10212,10213,10214,10215,10216,10217,10218,10219,10220,10221,10222,10223,10224,10225,10226,10227,10228,10229,10230,10231,10232,10233,10234,10235,10236,10237,10238,10239,10241,10242,10243,10244,10245,10247,10248,10249,10250,10251,10252,10253,10254,10255,10256,10257,10258,10259,10260,10261,10262,10263,10264,10265,10266,10267,10268,10269,10270,10271,10272,10273,10274,10275,10276,10277,10278,10279,10280,10281,10282,10283,10284,10285,10286,10287,10288,10289,10290,10291,10292,10293,10294,10295,10296,10297,10298,10299,10300,10301,10302,10303,10304,10305,10306,10307,10308,10309,10310,10311,10312,10313,10314,10315,10316,10317,10318,10319,10320,10321,10322,10323,10324,10325,10326,10327,10328,10330,10331,10332,10333,10334,10335,10336,10337,10338,10339,10340,10341,10342,10343,10344,10345,10346,10347,10348,10349,10350,10351,10352,10353,10354,10355,10356,10357,10358,10359,10360,10361,10362,10363,10364,10365,10366,10367,10368,10369,10370,10371,10372,10373,10374,10375,10376,10377,10378,10379,10380,10381,10382,10383,10384,10385,10386,10387,10388,10389,10390,10391,10392,10393,10394,10395,10396,10397,10398,10399,10400,10401,10402,10403,10404,10405,10406,10407,10408,10409,10410,10411,10412,10413,10414,10415,10416,10417,10418,10419,10420,10421,10422,10423,10424,10425,10426,10427,10428,10429,10430,10431,10432,10433,10434,10435,10436,10437,10438,10439,10440,10441,10442,10443,10444,10445,10446,10447,10448,10449,10450,10451,10452,10453,10454,10455,10456,10458,10459,10460,10461,10462,10463,10464,10465,10466,10467,10468,10469,10470,10471,10472,10473,10474,10475,10476,10477,10478,10479,10480,10481,10482,10483,10484,10485,10486,10487,10488,10489,10490,10491,10492,10493,10494,10495,10496,10497,10498,10499,10500,10501,10502,10503,10504,10505,10506,10507,10508,10510,10511,10513,10514,10515,10516,10517,10518,10519,10520,10521,10522,10523,10524,10525,10526,10527,10528,10529,10530,10531,10532,10533,10534,10535,10536,10537,10538,10539,10540,



**PILNE — Korekta urządzenia medycznego**

**Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP**

**Awaria hamulca pionowego**

10541, 10542, 10543, 10544, 10545, 10546, 10547, 10548, 10549, 10550, 10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10617, 10618, 10619, 10620, 10621, 10622, 10623, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10630, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10637, 10638, 10639, 29016, 29027, 29035, 29037, 29044, 29045, 29049, 29057, 29066, 64015, 64045, 64051, 90029, 90036, 90037, 90041, 90045, 90070, 90072, 90077, 90080, 90081, 90082, 90085, 90086, 90089, 90091, 90097, 90099, 90106, 90107, 90117, 90120, 90123, 90124, 90132, 90135, 90136, 90137, 90141, 90151, 90152, 90154, 90156, 90161, 90162, 90167, 90168, 90169, 90170, 90177, 90182, 90185, 95009, 95011, 95013, 95016, 95020, 95021, 95022, 95023, 95025, 95026, 95030, 95033, 95034, 95035, 95036, 95038, 95043, 95044, 95045, 95050, 95052, 95054, 95055, 95056, 95058, 95060, 95062, 95065, 95067, 95068, 95069, 95071, 95073, 95074, 95075, 95078, 95079, 95081, 95084, 95087, 95088, 95090, 95092, 95093, 95095, 95096, 95097, 95098, 95100, 95103, 95104, 95105, 95106, 95107, 95108, 95114, 95116, 95118, 95120, 95123, 95125, 95126, 95130, 95132, 95133, 95134, 95136, 95137, 95138, 95139, 95140, 95144, 95145, 95146, 95150, 95151, 95153, 95156, 95158, 95159, 95160, 95163, 95164, 95165, 95166, 95176, 95178, 95191, 95193, 95198, 95199, 95203, 95206, 95207, 95208, 95212, 95216, 95219, 95221, 95223, 95224, 95225, 95226, 95232, 95237, 95238, 95239, 95240, 95241, 95242, 95244, 95246, 95249, 95251, 95252, 95254, 95256, 95259, 95261, 95262, 95263, 95265, 95266, 95268, 95270, 95271, 95273, 95274, 95275, 95276, 95277, 95278, 95281, 95285, 95287, 95288, 95291, 95293, 95295, 95299, 95300, 95302, 95303, 95310, 95311, 95312, 95313, 95314, 95315, 95316, 95317, 95318, 95319, 95320, 95321, 95322, 95323, 95324, 95325, 95326, 95327, 95328, 95329, 95330, 95331, 95332, 95333, 95334, 95335, 95336, 95337, 95338, 95339, 95340, 95341, 95342, 95343, 95344, 95346, 95347, 95348, 95349, 95350, 95351, 95352, 95353, 95354, 95355, 95356, 95357, 95358, 95359, 95360, 95361, 95362, 95363, 95364, 95365, 95366, 95367, 95368, 95369, 95370, 95371, 95372, 95373, 95374, 95375, 95376, 95377, 95378, 95379, 95380, 95381, 95382, 95383, 95384, 95385, 95386, 95387, 95388, 95389, 95390, 95391, 95392, 95393, 95394, 95395, 95396, 95397, 95398, 95399, 95400, 95401, 95402, 95403, 95404, 95405, 95406, 95407, 95408, 95409, 95410, 95411, 95412, 95413, 95414, 95415, 95416, 95417, 95418, 95419, 95420, 95421, 95422, 95423, 95424, 95425, 95426, 95427, 95428, 95429, 95430, 95431, 95432, 95433, 95434, 95435, 95436, 95437, 95438, 95439, 95440, 95441, 95442, 95443, 95444, 95445, 95446, 95447, 95448, 95449, 95450, 95451, 95452, 95453, 95454, 95455, 95456, 95457, 95458, 95459, 95460, 95461, 95462, 95463, 95464, 95465, 95466, 95467, 95468, 95469, 95470, 95471, 95472, 95473, 95474, 95475, 95476, 95477, 95478, 95479, 95480, 95481, 95482, 95483, 95484, 95485, 95486, 95487, 95488, 95489, 95490, 95491, 95492, 95493, 95494, 95495, 95496, 95497, 95498, 95499, 95500, 95501, 95502, 95503, 95504, 95505, 95506, 95507, 95508, 95509, 95510, 95511, 95512, 95513, 95514, 95515, 95516, 95517, 95518, 95519, 95520, 95521, 95522, 95523, 95524, 95525, 95526, 95527, 95528, 95529, 95530, 95531, 95532, 95533, 95534, 95535, 95536, 95537, 95538, 95539, 95540, 95541, 95542, 95543, 95544, 95545, 95546, 95547, 95548, 95549, 95550, 95551, 95552, 95553, 95554, 95556, 95557, 95559, 95560, 95561, 95562, 95563, 95564, 95565, 95566, 95567, 95569, 95571, 95572, 95573, 95574, 95576, 95577, 95578, 95579, 95580, 95581, 95582, 95583, 95584, 95585, 95586, 95587, 95588, 95589, 95590, 95591, 95592, 95593, 95594, 95595, 95596, 95597, 95598, 95599, 95600, 95601, 95603, 95604, 95605, 95606, 95607, 95608, 95609, 95610, 95611, 95612, 95613, 95614, 95615, 95616, 95617, 95618, 95619, 95620, 95621, 95622, 95623, 95625, 95626, 95627, 95628, 95629, 95631, 95632, 95633, 95634, 95635, 95636, 95637, 95638, 95639, 95640, 95641, 95642, 95643, 95644, 95645, 95646, 95647, 95648, 95649, 95650, 95651, 95652, 95653, 95654, 95655, 95656, 95657, 95659, 95660, 95661, 95662, 95663, 95666, 95667, 95668, 95669, 95670, 95671, 95672,





**PILNE — Korekta urządzenia medycznego**

**Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP**

**Awaria hamulca pionowego**

95673,95674,95675,95676,95678,95679,95680,95681,95682,95683,95684,95685,95686,95687,95688,95689,95690,95691,95692,95693,95694,95695,95696,95697,95698,95699,95700,95701,95702,95703,95704,95705,95706,95707,95708,95709,95710,95711,95712,95713,95714,95715,95716,95717,95718,95719,95721,95722,95723,95724,95725,95726,95727,95728,95729,95730,95731,95732,95733,96494

Numery seryjne tomografów Brilliance CT Big Bore, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728243, nr seryjny:

7006,7008,7014,7016,7019,7025,7026,7027,7029,7030,7031,7033,7039,7042,7043,7047,7049,7050,7054,7071,7073,7076,7078,7081,7084,7086,7087,7088,7093,7095,7098,7099,7101,7102,7103,7110,7113,7114,7115,7117,7122,7124,7125,7127,7128,7130,7132,7133,7134,7136,7138,7140,7141,7142,7144,7147,7150,7151,7152,7153,7154,7156,7157,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7166,7167,7168,7169,7170,7171,7173,7174,7175,7177,7178,7179,7181,7183,7184,7185,7186,7187,7188,7189,7191,7192,7193,7194,7195,7196,7197,7198,7199,7201,7202,7203,7204,7205,7206,7207,7208,7209,7210,7211,7212,7213,7214,7215,7216,7217,7218,7219,7220,7221,7222,7223,7224,7225,7226,7227,7228,7229,7230,7231,7232,7233,7234,7235,7236,7237,7238,7239,7240,7241,7242,7243,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7253,7254,7255,7256,7257,7258,7259,7260,7261,7262,7263,7264,7265,7266,7267,7269,7270,7272,7273,7274,7275,7276,7277,7278,7279,7280,7281,7282,7283,7284,7285,7286,7287,7288,7289,7290,7291,7292,7293,7294,7295,7296,7297,7299,7300,7302,7303,7304,7305,7306,7307,7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7319,7320,7321,7322,7323,7324,7325,7326,7327,7328,7329,7330,7331,7332,7333,7334,7335,7336,7337,7338,7339,7340,7341,7342,7343,7344,7345,7346,7347,7348,7349,7350,7351,7352,7353,7354,7355,7356,7357,7358,7359,7360,7361,7362,7363,7364,7365,7366,7367,7368,7369,7370,7371,7372,7373,7374,7376,7377,7378,7379,7381,7382,7385,7387,7388,7389,7391,7392,7393,7394,7395,7397,7398,7399,7400,7401,7403,7404,7405,7406,7409,7410,7411,7412,7413,7414,7415,7416,7417,7418,7419,7420,7421,7422,7423,7424,7425,7426,7428,7429,7431,7432,7433,7434,7435,7436,7437,7438,7440,7441,7442,7443,7444,7445,7446,7447,7448,7449,7450,7451,7454,7455,7456,7457,7459,7460,7461,7462,7463,7464,7465,7466,7467,7468,7469,7470,7471,7472,7473,7474,7475,7476,7477,7478,7479,7480,7481,7482,7483,7484,7485,7487,7488,7489,7490,7491,7492,7493,7494,7495,7496,7497,7498,7499,7500,7501,7502,7503,7504,7505,7506,7507,7508,7509,7511,7512,7513,7515,7516,7517,7518,7519,7521,7522,7523,7524,7525,7526,7527,7528,7529,7530,7531,7532,7533,7534,7535,7536,7537,7538,7539,7540,7541,7542,7544,7545,7546,7547,7548,7549,7550,7551,7552,7553,7554,7555,7556,7557,7558,7559,7560,7561,7562,7563,7564,7565,7566,7567,7568,7569,7570,7572,7573,7574,7575,7576,7577,7578,7579,7580,7581,7582,7583,7584,7585,7586,7587,7588,7589,7590,7591,7592,7593,7595,7596,7597,7598,7599,7601,7602,7603,7604,7605,7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,7613,7614,7615,7616,7617,7618,7620,7622,7623,7624,7625,7626,7627,7628,7629,7630,7631,7632,7633,7634,7635,7637,7638,7639,7640,7641,7642,7643,7644,7645,7646,7647,7648,7649,7650,7652,7655,7656,7657,7658,7659,7661,7662,7663,7665,7666,7667,7671,7672,7673,7674,7675,7677,7678,7679,7680,7681,7682,7684,7685,7686,7687,7689,7690,7691,7692,7693,7695,7696,7698,7699,7700,7701,7702,7703,7704,7705,7706,7707,7709

Numery seryjne tomografów Brilliance CT Big Bore Oncology, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728244, nr seryjny:

7052,7155,7172,7176,7180,7182,7190,7200,7244,7252,7268,7271,7301,7318,7375,7380,7383,7384,



**PILNE — Korekta urządzenia medycznego**

**Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP**

**Awaria hamulca pionowego**

7386,7390,7396,7402,7407,7408,7427,7430,7439,7452,7453,7458,7486,7510,7514,7520,7543,7571,7600,7619,7621,7636,7651,7653,7654,7660,7664,7668,7669,7670,7676,7683,7688,7694,7697,7708,7710

Numery seryjne tomografów iCT, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728306, nr seryjny:

100019,100020,100021,100022,100023,100024,100025,100028,100031,100032,100037,100038,100039,100040,100042,100043,100044,100045,100046,100047,100048,100049,100050,100051,100052,100053,100054,100055,100056,100057,100058,100059,100060,100061,100062,100063,100064,100065,100066,100067,100068,100069,100070,100071,100072,100073,100074,100077,100078,100079,100081,100082,100083,100084,100085,100086,100087,100088,100089,100090,100091,100092,100093,100094,100095,100096,100097,100098,100099,100100,100101,100102,100103,100104,100105,100106,100107,100108,100109,100110,100111,100112,100113,100114,100115,100116,100117,100118,100119,100120,100121,100122,100123,100124,100125,100126,100127,100128,100129,100130,100131,100132,100133,100134,100135,100136,100137,100138,100139,100140,100141,100142,100143,100144,100145,100146,100147,100148,100149,100150,100151,100152,100153,100154,100155,100157,100158,100159,100160,100161,100162,100163,100164,100165,100166,100167,100168,100169,100170,100171,100172,100173,100174,100175,100176,100177,100178,100179,100180,100181,100182,100183,100184,100185,100186,100187,100188,100189,100190,100191,100192,100193,100194,100195,100196,100197,100198,100199,100200,100201,100202,100203,100204,100205,100206,100207,100208,100209,100210,100211,100212,100213,100214,100215,100216,100217,100218,100219,100220,100221,100222,100223,100224,100225,100226,100227,100228,100229,100230,100231,100232,100233,100234,100235,100236,100238,100240,100241,100242,100243,100244,100245,100246,100247,100248,100249,100250,100251,100252,100253,100254,100255,100256,100257,100258,100259,100260,100261,100262,100263,100264,100265,100266,100267,100268,100269,100270,100271,100272,100273,100274,100275,100276,100277,100278,100279,100280,100281,100282,100283,100284,100285,100286,100287,100288,100289,100290,100291,100292,100293,100294,100295,100296,100297,100298,100299,100300,100301,100302,100303,100304,100305,100306,100307,100308,100309

Numery seryjne tomografów iCT SP, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728311, nr seryjny:

200003,200004,200005,200006,200007,200008,200009,200010,200012,200013,200014,200015,200016,200017,200018,200019,200020,200021,200022,200023,200024,200025,200026,200027,200028,200029,200030,200031,200032,200033,200034,200035,200036,200037,200038,200039,200040,200041,200042,200043,200044,200045,200046,200047,200048,200049,200050,200051,200052,200053,200054,200055,200056,200057,200058,200059,200060,200061,200062,200063,200064,200065,200066,200067,200068,200069,200070,200071,200073,200074,200075,200076,200077,200078,200079,200080,200081,200082,200083,200084,200085,200086,200087,200088,200089,200090,200091,200092,200093

Numery seryjne tomografów Ingenuity Core, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728321, nr seryjny:



**PILNE — Korekta urządzenia medycznego**

**Tomografy komputerowe z serii Brilliance (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore oraz CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT i MX8000 Dual v. EXP**

**Awaria hamulca pionowego**

310001, 310002, 310003

Numery seryjne tomografów Ingenuity CT, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728326, nr seryjny:

300003,300004,300005,300006,300007,300010,300011,300012,300013,300014,300015,300016,300017,300018,300019,300020,300021,300022,300024,300025,300027,300028,300029,300030,300031,300032,300033,300034,300035,300036,300037,300038,300039,300040,300041,300042,300043,300044,300045,300046,300047,300048,300049,300050,300051,300052,300053,300054,300055,300056,300057,300058,300059,300060,300061,300062,300063,300064,300065,300066,300068,300069,300070,300071,300072,300073,300074,300075,300076

Numery seryjne tomografów MX8000 Dual v. EXP, których dotyczy to powiadomienie

Nr kodu aparatu: 728130, nr seryjny:

