

**WAŻNA INFORMACJA O PRODUKCIE
NORTROL firmy Thermo Fisher Scientific Oy**

nr kat. bioMérieux 28057 (nr kat. Thermo 981043) nr serii: G716A oraz G716B

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy Thermo Fisher Scientific Oy, Finlandia informujemy o wystąpieniu błędów w wartości nominalnej, odchylenia standardowego SD i dopuszczalnego zakresu pomiarowego ($\pm 2SD$) dla kontroli żelaza z użyciem metody jedno-odczynnikowej „Iron 1-reagent method”

(nr kat Thermo: 981236, nr kat. BioMérieux PL 229) w następujących numerach serii:

28057 (981043) NORTROL seria G716A i G716B, data ważności 2014-07:

	Błędny Nominał	Jednos tka	Błędne 1SD	Błędne $\pm 2SD$	Prawidłowy Nominał	Prawidłowe 1 SD	Prawidłowe $\pm 2SD$
Iron	16.1	$\mu\text{mol/l}$	0.97	14.2-18.0	19.1	1.15	16.8-21.4
981236 1-reagent method	90	$\mu\text{g/dl}$	5.4	79-101	107	6.4	94-119
	0.90	mg/l	0.054	0.79-1.01	1.07	0.064	0.94-1.19

Uwaga: Wartości liczbowe przedstawione w arkuszu wartości dla kontroli żelaza z użyciem metody dwu-odczynnikowej są prawidłowe.

Ryzyko błędnej interpretacji wyników pacjenta nie istnieje, jeśli stosuje się rekomendowaną kontrolę na dwóch poziomach (Nortrol i Abtrol).

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Grażyną Trześniowską tel. kom. 665 759 702 lub z Działem Obsługi Klienta.

bioMérieux Polska
ul. Żeromskiego 17
01-822 Warszawa
☎ : 22 569 85 85

Z poważaniem



Ewa Peretkiewicz
Dyrektor ds Obsługi Klienta